



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

für REAL 9000 PLUS Modelle und 6100 PLUS Modelle



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

RAHMEN

Zur Erfüllung verschiedener Anforderungen sind die Rahmen in mehreren Ausführungen erhältlich, z. B. mit eingebauter Fußbremse. Dieser Stuhl lässt sich bremsen, ohne dass man sich hierfür nach unten zum Bremshebel beugen muss. Der PLUS-Rahmen bietet viel Platz für die Füße und die Sitzfläche ist fest auf dem Untergestell montiert. Der Rahmen ist deswegen ideal zum Trippeln; Fortbewegen in sitzender Position.

BREMSHEBEL

Bremshebel sind in verschiedenen Längen erhältlich und lassen sich rechts wie links anbringen. Am Bremshebel lässt sich bei Bedarf ein Rheumatikerkreuz anbringen, um die Bremse leichter zu bedienen. Darüber hinaus ist auch eine elektrische Bremse erhältlich.

RAHMENVERLÄNGERUNG

Mit einer Rahmenverlängerung erhält ein Stuhl erhöhte Stabilität, da sie einem Umkippen des Stuhls entgegenwirkt. Die ideale Zusatzoption für Personen mit spastischer Problematik. Bei der Sitzneigungsverstellung 0-23° ist diese Verlängerung Pflicht.



ROLLEN

Unsere Stühle haben im Standard bereits die hochwertige Leichtlaufrolle XL 100 mm, die insbesondere bei Linoleum und mittelharten Fußböden zum Einsatz kommt. Die Superleichtlaufrolle SL 100 mm hat einen besonders leichtgängigen Lauf und doppelte Kugellager. Sie eignet sich am besten für Fußböden wie Parkett oder Betonböden. Die BSL-Rolle ist eine SL-Rolle in breiterer Ausführung. Die 125- und 150 mm-Rollen eignen sich z. B. ideal für das Überwinden von Türschwellen und Bordsteinen.

FUß-/BEINSTÜTZEN

Ein Fußbügel dient als entlastende Stütze für die Füße. Er lässt sich leicht hoch und herunter klappen, z. B. beim Umsetzen oder wenn mehr Freiraum für die Füße benötigt wird. Der Fußbügel ist in zwei Ausführungen erhältlich und eignet sich für alle REAL 9000-Stühle mit PLUS-Rahmen. Optional sind Beinstützen erhältlich, die vorn am PLUS-Rahmen montiert werden und sich mit Waden- und Kniestützen ergänzen lassen.

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	PLUS-Rahmen 9000 48x53 cm, XL-Rollen (Erwachsene) mit Leichtlaufrollen XL 100 mm mit Superleichtlaufrollen SL 100 mm	802659 802660	6	Schiebebügel PLUS für PLUS-Rahmen 48 Schiebebügel PLUS für PLUS-Rahmen 43	PB1011 PB2011
2	PLUS-Rahmen 9000 43x53 cm (Kinder) mit Leichtlaufrollen XL 100 mm, Hand- und Fußbremse mit Superleichtlaufrollen SL 100 mm, Hand- und Fußbremse Fußbremse für PLUS-Rahmen 9000	802657 802658 802865	7	Schiebegriffe PLUS-Rahmen	PB1010
3	Elektrische Bremse für ein 9000 PLUS EL	803276	8	Rückenlehnenfunktion fest f. hohe Rückenlehne einschl. Schiebegriffe tiefenverst. 2 Stellungen	803903
4	PLUS-Rahmen 9000 PLUS 48 (Erwachsene) mit 4 Bremsfüßen 100 XL Umkehrbremse	804270	9	Bremshebelbefestigung für PLUS-Rahmen Breiteneinstellbar, 7 Breiten Breiteneinstellbar, 2 Breiten	802800 802799
5	Bremshebel für PLUS-Rahmen 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm	BD1020 BD1010 BD1030 BD1040	10	PLUS-Rahmenverlängerung Hinten, Paar Vorne, Paar	BEX20 BEX10
5	Große Kugel 50 mm für Handbremshebel	LB1010	11	Rolle (mit Gabel) Leichtlaufrolle XL 100 mm Superleichtlaufrolle SL 100 mm Extrabreite BXL 100 mm 125 mm 150 mm	801213 801144 803162 800904 800905
5	Kleine Kugel 40 mm Gummi schwarz	LB1040	12	Fußbügel 1/8 PLUS 48, hochklappbar rechts PLUS 48, hochklappbar links PLUS 43, hochklappbar rechts PLUS 43, hochklappbar links	FR1010 FR2010 FR1020 FR2020
5	Kleine Kugel 35 mm rot	LB1030			
5	Kreuzgriff für Bremshebel	RC1010			
5	Bremshebel mit Greifring für PLUS-Rahmen 35 cm	BD1110	13	Fußbügel 1/4 PLUS 48, hochklappbar PLUS 43, hochklappbar	FR3010 FR3020

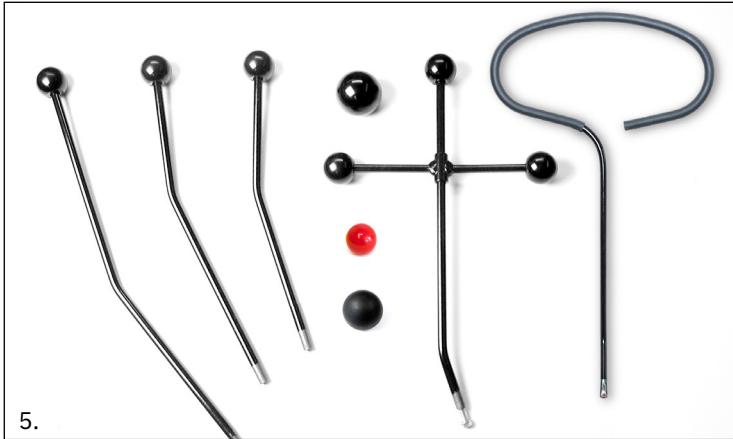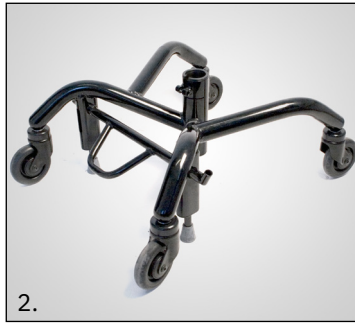

INDIVIDUELL ANPASSBAR

BEINSTÜTZEN

Das zentrale Fußbrett gibt stabilen Halt für die Füße. Es ist mit dem Fuß, oder einem manuellen Hochklappsysteem (optional erhältlich) hochklappbar.

Alternativ sind die Beinstützen Medic mit ganzen oder geteilten Fußplatten in vier Größen erhältlich: S, M, L und XL. Die Maße der Fußplatten sind bei den Ausführungen S bis XL gleich. Die Beinstützen sind in Höhe, Tiefe und Winkel einstellbar. Auch der Winkel der Fußplatten lässt sich einstellen. Die Beinstützen werden vorn am Rahmen montiert und lassen sich mit Waden- und Kniestützen ergänzen. Angebracht werden die Beinstützen an einer speziellen Halterung (Vierkantrohr) unter dem Sitz.

WADENSTÜTZEN

Die Wadenstützen dienen als zusätzliche Stütze für die Waden, wenn die Beinstützen keine ausreichende Stabilisierung bieten. Je nach verwendeten Beinstützen sind die Wadenstützen in

unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Der Wadenstützmechanismus lässt sich einfach über Halterungen an den Beinstützen montieren.

KNIESTÜTZEN

Die Haltung von Beinen und Füßen lässt sich mit Hilfe verstellbarer Kniestützen, die auf die jeweilige Beinlänge abgestimmt werden, korrigieren.

Die Kniestützen sorgen dafür, dass die sitzende Person nicht nach vorn rutschen kann. Sie werden an den Medic-Beinstützen montiert und lassen sich herunterklappen sowie in Höhe und Tiefe verstellen. Die Kniestützenpolster sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.

ADAPTER

Als Option sind Beinstützenadapter erhältlich für die Befestigung der winkelverstellbaren Beinstütze 'Komfort' oder ggf. einer eigenen Beinstütze. Angebracht werden die Adapter am U-Bügel der Armlehnen.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Elektrisch winkelverstellbare längekompensierende zentrale Beinstütze		7	Medic geteiltes Fußbrett	
	Fußbrett 30 cm tief	LS311110		S (18-24 cm)	LS151110
	Fußbrett 25 cm tief	LS311111		M (23-32 cm)	LS151210
	Wadenstütze re+li	CS501458		L (28-41 cm)	LS151310
				XL (38-51 cm)	LS151410
2	Zentrales Fußbrett 32 x 24 cm (BxT)		7	Medic Fußbrett	
	L, Länge 30-38 cm	LS202110		S (18-24 cm)	LS101110
	XL, Länge 37-53 cm	LS202210		M (23-32 cm)	LS101210
				L (28-41 cm)	LS101310
	Zentrales Fußbrett PLUS 29x24 cm (BxT)			XL (38-51 cm)	LS101410
	L, Länge 30-38 cm	LS262110	8	Medic Fußbrett Mini	
	XL, Länge 37-53 cm	LS262210		S (18-24 cm)	LS111110
				M (23-32 cm)	LS111210
	Zentrales Fußbrett Mini			L (28-41 cm)	LS111310
	L, Länge 30-38 cm	LS212110		XL (38-51 cm)	LS111410
	XL, Länge 37-53 cm	LS212210			
3	Zentrales Fußbrett für 6100 PLUS (EL) 29 x 24 cm (BxT)		9	Medic geteiltes Fußbrett Mini	
	L, Länge 30-38 cm	LS312110		S (18-24 cm)	LS161110
	XL, Länge 37-53 cm	LS312210		M (23-32 cm)	LS161210
4	Kante für Fußplatte Mobil 6100			L (28-41 cm)	LS161310
	für Fußbrett 32 x 24 cm	803211		XL (38-51 cm)	LS161410
	für Fußbrett 29 x 24 cm	HS2020	10	Zentrales Fußbrett 32 x 10 cm (BxT) komplett	
5	Kniestütze			Länge 30-38 cm	LS222110
	Rechts 16x8, Kunstleder schwarz	KS111038		Länge 37-53 cm	LS222210
	Links 16x8, Kunstleder schwarz	KS121038	11	Wadenstütze inkl. Anbauset (Paar) für Medic Beinstützen	
6	Kniestütze Mini			Wadenstützenpolster 15 x 13 cm (Br. 37)	CS101038
	Rechts 12x8, Kunstleder schwarz	KS212038		Wadenstützenpolster 10 x 10 cm (Br. 25)	CS201138
	Links 12x8, Kunstleder schwarz	KS222038	12	Adapter für Rollstuhl-Beinstütze Komfort	
				Rechts	AD2011
				Links	AD2012
				Paar	AD2010



SITZPOLSTER UND SITZWINKELFUNKTION

SITZPOLSTER

Das ErgoMedic-Sitzpolster wurde für optimalen Sitzkomfort konzipiert, mit leicht erhöhter Polsterung unter den Oberschenkeln im Vergleich zu der Polsterung unter dem Gesäß. Die Form der Sitzfläche verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert selbst beim Anwinkeln nach vorn ein Vorwärtsrutschen.

Für Stabilität und Komfort sorgt die durchdachte Form des ErgoMedic-Plus-Sitzpolsters, das außerdem weich ist. Auch bei diesem Sitzpolster ist das Polster unter den Oberschenkeln im Vergleich zu der Polsterung unter dem Gesäß leicht erhöht.

Die höhere, abgerundete Form zu beiden Seiten der Oberschenkel stabilisiert Becken und Beine. Das Arthrodesen-Sitzpolster ist geteilt mit individuell verstellbaren Klappen. Es wird vor allem zur Linderung/Rehabilitation orthopädischer Problematik an Hüfte und Oberschenkelknochen eingesetzt.

ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum besteht aus zwei verschiedenen Materialien. Das obere, aus viskoelastischem Schaum, passt sich in der Form an und bietet sowohl eine gleichmäßige Druckverteilung als auch erhöhten Sitzkomfort.

Die Holzplatte ist für das Eingießen bzw. Nachrüsten einer Sitzschale oder individueller Polsterung vorgesehen. Sitze mit Anti-Rutsch-Funktion werden für verschiedene individuell anpassbare Sitzkissen empfohlen.

Zu den Sitzpolstern sind passende Wechselbezüge erhältlich: Inkontinenzbezüge oder solche aus Velours oder Kunstleder.

SITZWINKELFUNKTION

Mercado bietet verschiedene Sitzwinkerverstellungen an. Die Bedienung ist per Drehspindel hinter dem Stuhl, per Gasfeder oder elektrisch möglich. Wird der Sitzwinkel verändert, bewegt sich die Rückenlehne synchron zur Sitzfläche. So wird das Dekubitusrisiko durch Schiebekräfte verringert.

Auf Anfrage stellt Mercado Ihnen gern individuelle Lösungen vor.

Bei bestimmten Modellen lässt sich der Sitzwinkel per Drehspindel von der Begleitperson einstellen und arretieren. Diese Lösung bietet sich besonders in Fällen an, in denen der Sitzwinkel nicht per Gasfeder eingestellt werden kann. Ideal für orthopädische Kliniken, bei denen Patienten in einem bestimmten Winkel sitzen müssen, und für Schulen, wo ein aktives Sitzen der Schüler gefördert werden soll.

Bei der Sitzwinkerverstellung per Gasfeder kann die sitzende Person den Sitzwinkel eigenständig für aktives und passives Sitzen mit der Bedienung unterm Sitz oder unter der Armlehne anpassen.

Das Aufstehen wird erleichtert bei nach vorn angewinkelter Stellung. Diese Stellung wird in Kombination mit einer elektrischen Höhenverstellung eine Aufstehhilfe.



Wenn der/die AnwenderIn die Sitzwinkerverstellung per Gasfeder nicht mit Hilfe seines/ihres Gleichgewichts bewegen kann, eignet sich die elektrische Version. Die Bedienung befindet sich unter der Armlehne.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Sitzwinkerverstellung per Gasfeder Bedienung unter der Armlehne Bedienung unter der Sitzfläche	SAR31 SAR30	5	Sitzwinkelfunktion für 9000 PLUS verstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23° für Polsterbreite 40-54 cm für Polsterbreite 33-39 cm	803070 803071
2	Sitzwinkleinstellung per Drehspindel komplett mit Drehspindel	SAR20	5	Sitzwinkelfunktion für 6100 PLUS verstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23° für Polsterbreite 40-54 cm für Polsterbreite 33-39 cm	803072 803073
3	Sitzwinkerverstellung elektrisch Mit Bedienschalte unter der Armlehne Mit Fernbedienung Infrarot Mit Joystick Mit Kabelfernbedienung	SAR40 SAR41 SAR42 SAR43	6	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler	ST10xx90
4	Elektrosatz für Sitzneigung kompl.	SAR40	7	Sitzgrundplatte in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch	ST10xx61
			8	Sitzpolster ErgoMedic mit Inkontinenzbezug	STxxxx60



Mehr Informationen zu unseren Sitzpolstern finden Sie in der betreffenden Broschüre.

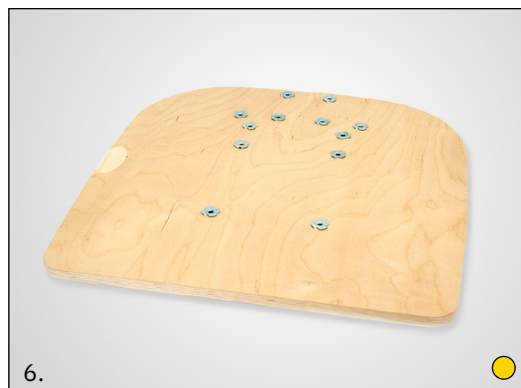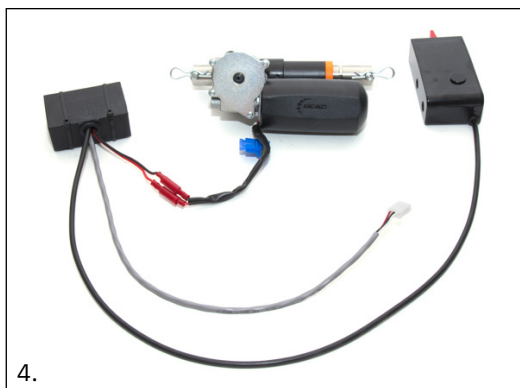

RÜCKENLEHNEN UND RÜCKENLEHNENFUNKTION

RÜCKENLEHNEN

Wir haben Rückenlehnen in verschiedenen Höhen. Unsere niedrige Rückenlehne besteht aus einem ergonomisch konzipierten Rückenpolster, das sowohl optimale Unterstützung für den unteren Rücken als auch Bewegungsfreiheit für den Oberkörper bietet.

Die hohe Rückenlehne bietet mehr Unterstützung und stabilisiert insbesondere nach oben hin, ohne die Bewegungsfreiheit von Oberkörper oder Schulterblättern groß einzuschränken.

Alle Rückenlehnen sind als ErgoMedic und als ErgoMedic Plus auswählbar. Diese beiden ergonomischen Sitzsysteme wurden vom Physiotherapeuten Bengt Engström entwickelt.

Die höhere ErgoMedic Plus-Rückenlehne ist auf Becken und Brustwirbelsäule abgestimmt. In der oberen

Mitte, zwischen den Schulterblättern, hat sie eine weiche Stütze, damit bei aufrechtem Sitzen ein stabiles Anlehnen möglich ist, ohne dass die Schulterpartie eingeeengt wird. Die hohe Rückenlehne ist auch mit tiefer Seitenführung, extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung oder mit speziellem aufblasbarem Lumbalkissen erhältlich.


RÜCKENLEHNENFUNKTION

Unsere Rückenlehneneinstellung Standard lässt sich in Höhe, Tiefe und Neigung einstellen. Mit der Rückenlehneneinstellung Medic kann die Sitztiefe tiefer eingestellt werden. Dies ist z. B. bei Personen mit starker Kyphose hilfreich.

Die Rückenlehnenverstellung Komfort lässt sich per Gasfeder verstellen. Die Rückenlehne federt weich und lässt sich im Sitzen eigenständig regulieren.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Rückenlehneinstellung Standard für eine niedrige Rückenlehne	BRM1000	6	Komfort Rückenlehnenverstellung für eine hohe Rückenlehne Standard Sitztiefe (für Kinder und Arthrodesensitzpolster)	801742
2	Rückenlehneinstellung Standard für eine hohe Rückenlehne	BRM4000		Größere Sitztiefe	801744
3	Rückenlehneinstellung Medic für eine niedrige Rückenlehne 112 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM1800 BRM1900 BRM2000	7	Elektrische Rückenlehnenverstellung für eine niedrige Rückenlehne Elektro-+Relaisatz für Rückenlehnenverstellung	803277
	Rückenlehneinstellung Medic für eine niedrige Rückenlehne 155 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM1500 BRM1600 BRM1700	8	Elektrische Rückenlehnenverstellung für eine hohe Rückenlehne Elektro-+Relaisatz für Rückenlehnenverstellung	803277
4	Rückenlehneinstellung Medic für eine hohe Rückenlehne 112 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM4800 BRM4900 BRM5000	9	Elektrosatz für Rückenlehnenverstellung	803277
	Rückenlehneinstellung Medic für eine hohe Rückenlehne 155 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM4500 BRM4600 BRM4700	10	Verstärkte Rückenlehneinstellung Medic Halterung Rückenlehneinstellung Medic L: 155 mm (waagrecht), 240 mm (senkrecht) L: 112 mm (waagrecht), 240 mm (senkrecht) XL: 155 mm (waagrecht), 340 mm (senkrecht) XL: 112 mm (waagrecht), 340 mm (senkrecht) Oberteil der Rückenlehneinstellung Medic verstärkt	802859 801082 801083 801084 801085 802860
5	Komfort-Rückenmechanismus, niedrige Rückenlehne Standard Sitztiefe (für Kinder und Arthrodesensitzpolster) Größere Sitztiefe	801743 801745		Rückenlehneinstellung Medic verstärkt (doppelt), komplett L 155 mm, H 240 hohe Rückenlehne L 155 mm, H 340 hohe Rückenlehne	BRM5600 BRM5700

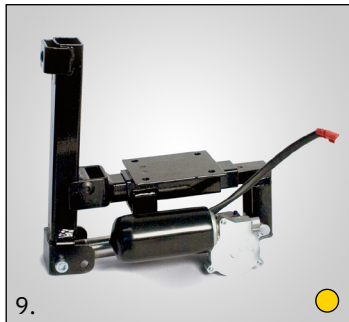

Mehr Informationen zu unseren Rückenlehnen finden Sie in der betreffenden Broschüre.



SICHERHEITSHINWEIS für die Rückenlehnenfunktion bei einer Sitzwinkelverstellung:

Eine verstärkte (doppelte Medic) Rückenlehneneinstellung sollte verwendet werden:

- wenn unwillkürliche Bewegungen der Person die Rückenlehne stark belasten könnten;
- ab einer Körpergröße von 200 cm bei einem Stuhl mit einer SWV nach hinten und Kopfstütze;
- ab einem Körpergewicht von 90 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten.

Eine verstärkte (doppelte Medic) Rückenlehneneinstellung muss verwendet werden:

- ab einem Körpergewicht von 110 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten;
- bei einem Stuhl mit einer SWV bis 23 ° nach hinten;
- wenn die SWV-Einstellung 15-23 ° aufgrund der hohen Belastung gewählt wird;
- Menschen mit sich wiederholenden Schaukelbewegungsmustern durch z.B. Spastik.

ARMLEHNEN UND ARMLEHNENMECHANISMEN

ARMLEHNEN

Die Armlehnen sind ein wichtiger Bestandteil des ErgoMedic-Sitzsystems und tragen maßgeblich zu dessen hohem Sitzkomfort bei. Die Kanten sind an Innen- und Außenseite abgeschrägt, um den Druck auf die Unterarme bei längerem Aufliegen zu minimieren. Hinten ist die Armlehne nach innen gewölbt, damit der Ellenbogen stabil aufliegt. An der Vorderseite bietet sie sicheren Halt beim Aufstehen und sich Hinsetzen.

Die Komfort-Armlehnen sind etwas breiter in der Form und bieten eine weichere Polsterung.

Die Hemiplegie-Armlehne eignet sich insbesondere für Personen mit einem gelähmten Arm, z.B. durch einen Schlaganfall. Der gelähmte Arm findet Halt dank der Form der Armlehne mit seitlicher Unterstützung. Die Armlehne lässt sich auch

drehen und hierdurch kann eine optimale Position zur Unterstützung gefunden werden.

Die ErgoMedic Plus-Armlehnen sind so geformt, dass die Arme seitlich gestützt werden. Hierdurch wird der Oberkörper noch mehr entlastet. Eine Erhöhung unter den Handgelenken bietet zusätzliche Entlastung. Diese Armlehne kann auch gut als Alternative Hemiplegie-Armlehne eingesetzt werden.


ARMLEHNENMECHANISMUS

Der Armlehnenmechanismus 9000 PLUS ist höhen- und breitenverstellbar. Durch vollständiges Absenken oder die nach hinten wegklappbare Ausführung wird ein Umsetzen in seitliche Richtung ermöglicht. Die breiteren Armlehnen lassen sich ggf. nicht vollständig absenken oder nach hinten wegklappen.



ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Armlehnenpolster ErgoMedic		6	Armlehnenpolster Hemiplegie	AR406038
	25 cm	AR101038			
	30 cm	AR102038	7	Armlehnenstütze (T-Stück) für 9000 PLUS	
	35 cm	AR103038		Rechts, 32 cm	802700
	40 cm	AR104038		Rechts, 38 cm	802701
2	Armlehnenpolster Mobil			Links, 32 cm	802702
	25 cm	AR301038		Links, 38 cm	802703
	30 cm	AR302038	8	Armlehnenbefestigung (U-Bügel) rechts	802698
	35 cm	AR303038	9	Armlehnenbefestigung (U-Bügel) links	802699
	40 cm	AR304038			
3	Armlehnenpolster Komfort		10	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück	
	30 cm	AR502038		32 cm für 6100 PLUS ohne Sitzwinkelfunktion	
	35 cm	AR503038		Links	ARM3012
	40 cm	AR504038		Rechts	ARM3011
4	Armlehnenpolster ErgoMedic PLUS		11	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück	
	42 cm Rechts	AR205138		38 cm für 6100 PLUS mit Sitzwinkelfunktion	
	42 cm Links	AR205238		Links	ARM3112
	30 cm Rechts	AR202138		Rechts	ARM3111
	30 cm Links	AR202238	12	Hemiplegie-Mechanismus für klappbare Armlehnen	
5	Armlehnenpolster Mini			Paar	802991
	25 cm	AR111038		Rechts	802989
	30 cm	AR112038		Links	802990
			13	Armlehnenstütze Hemiplegie 9000 PLUS 32 cm	
				Rechts	802992
				Links	802993

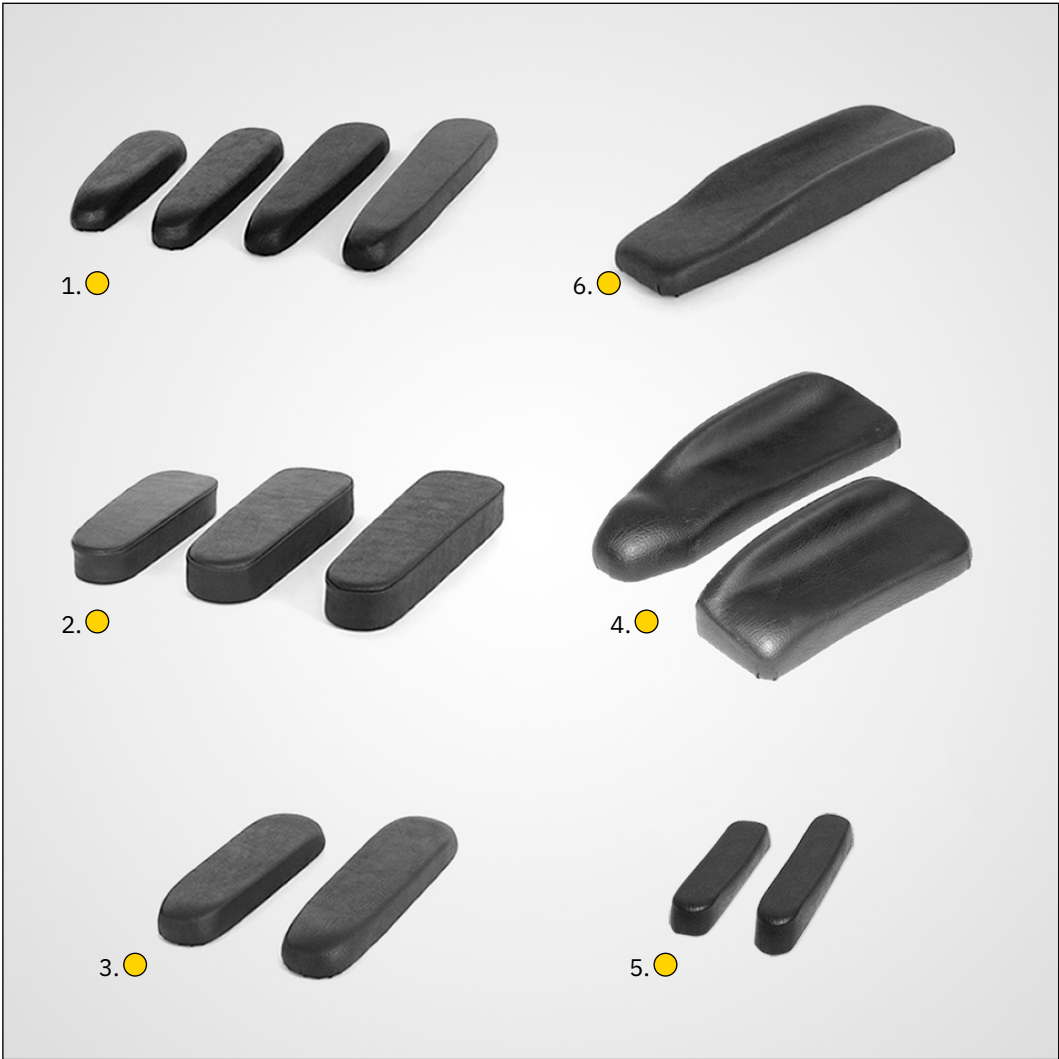

ZUBEHÖRVIELFALT FÜR GROßE FLEXIBILITÄT

SEITENPELOTEN

Unsere Rückenlehnen unterstützen eine aufrechte und aktive Sitzhaltung. Wenn eine umfangreichere Unterstützung benötigt wird, bietet Mercado neben den ErgoMedic PLUS Rückenlehnen verschiedene Arten von Seitenpelotten.

TISCH AUS RAUCHGLAS

Für die gesamte Real 9000-Serie bieten wir einen Tisch an.

TISCH AUS HOLZ

Der Tisch aus Holz hat die Maße 45x30 cm. Er ist zur Seite drehbar und lässt sich je nach Wunsch rechts oder links von der Armlehne anbringen. Auch dieser Tisch ist mit der gesamten REAL 9000-Serie kompatibel.

HÜFTGURT

Ein Hüftgurt verhindert ein vorderseitiges Herausfallen der sitzenden Person. In den Größen S (51-71 cm), M (68-83 cm) und L (83-103 cm) mit verstellbarer Länge erhältlich.

AMPUTATIONSSTÜTZE

Die Amputationsstütze hält das teilamputierte Bein in der richtigen Stellung und ist so geformt, dass der Stumpf so bequem wie möglich darauf ruhen kann. Die Amputationsstütze ist für links und/oder rechts erhältlich und wird mit einer Halterung unter dem Sitz befestigt.

ABDUKTIONSKEIL

Ein Abduktionskeil verhindert ein Aneinanderliegen der Knie/Beine. Die Abduktionskeile sind in zwei Größen erhältlich: 11 und 15 cm. Der Mechanismus ist in drei Längen erhältlich; für Kinder 57 mm sowie für Erwachsene 115 mm und 175 mm.

WECHSELBEZÜGE




Ein Wechselbezug schützt die Polsterung gegen Schmutz und Staub und verlängert ihre Gebrauchsdauer. Der Inkontinenzbezug bietet Schutz gegen Nässe. Die maschinenwaschbaren Wechselbezüge sind für Polsterteile in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.



ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Schwenk- und verstellbare Seitenpelotte Seitenpelottenmechanismus, schwenk- und verstellbar rechts Seitenpelottenmechanismus, schwenk- und verstellbar links Dazugehöriges Kissen (schwenk- und verstellbar)	TS31 TS32 TS2038	7	Abduktionskeil (schwarzes Kunstleder) 11 cm 15 cm	LD1038 LD2038
2	Seitenpelotte mit geradem Halter mit Anbauset rechts mit Anbauset links Seitenpelottenpolster 15 x 13 cm (grauer Velours)	TS11 TS12 TS1046	8	Abduktionskeil-Befestigungsmechanismus 57 mm komplett 115 mm komplett 175 mm komplett	LD15 LD16 LD17
3	Seitenpelotte mit rundem Halter mit Anbauset rechts mit Anbauset links Seitenpelottenpolster 15 x 13 cm (grauer Velours)	TS21 TS22 TS1046	9	Hüftgurt einschl. Halterungen und Schrauben S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm) Hüftgurt ohne Halterung S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm) Befestigung für Hüftgurt - Paar	HB1010 HB1020 HB1030 800952 800953 800954 800878
4	Tisch aus Rauchglas 60x45 cm* f. nicht klappbare Armlehne 9000 PLUS Tisch aus Rauchglas 60x45 cm* f. klappbare Armlehne	TA1010 TA1030	10	Amputationsstütze Amputationsstützmechanismus Befestigung Amputationsstützkissen (grauer Velours)	800827 800786 AS1046
5	Tisch aus Rauchglas 45x37 cm* f. nicht klappbare Armlehne 9000 PLUS Tisch aus Rauchglas 45x37 cm* f. klappbare Armlehne	TA1015 TA1035	11	Überzüge für alle Polsterteile erhältlich	
6	Tisch aus Holz 45x30 cm mit Halterung	TA1020	12	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt Wichtig: Verkauf erfolgt stückweise!	804184

*Beim REAL 6100 nur in Kombination mit NICHT wegklappbaren PLUS-Armlehnen

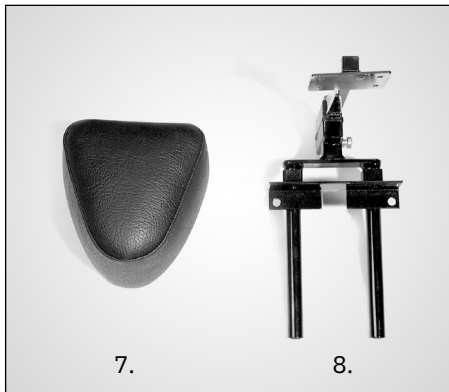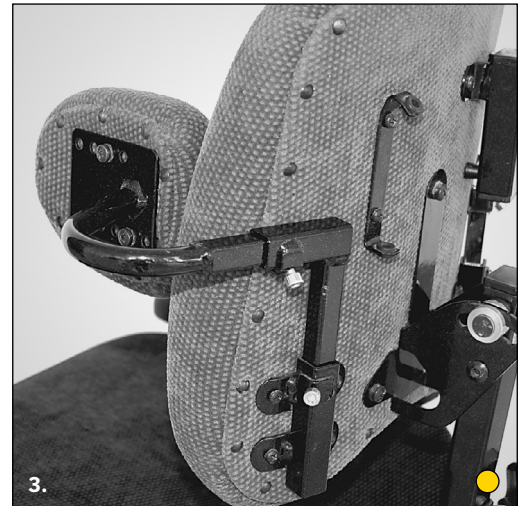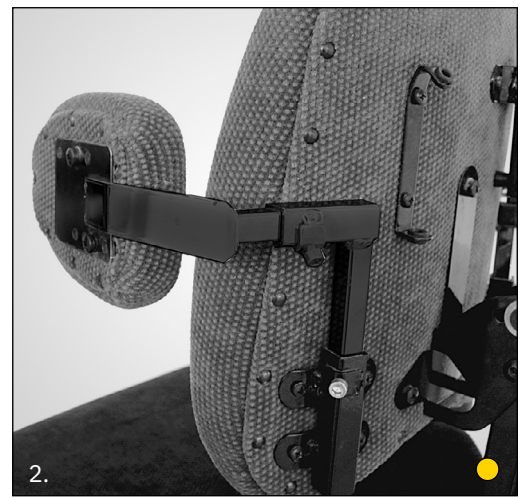

NOCH MEHR OPTIONEN UND DIE ELEKTRIK

KOPFSTÜTZE

Unsere Kopfstütze bietet dem Kopf die optimale Unterstützung und entlastet so Nacken und Rücken bei unzureichender Rumpfkontrolle. Sie lässt sich einfach in die gewünschte Position bringen. Als flaches, geformtes und ErgoMedic PLUS-Kissen erhältlich.

OBERSCHENKELFÜHRUNG

Die Oberschenkelführung bietet der sitzenden Person Stabilität und Unterstützung beim Sitzen.

Die Oberschenkelführung lässt sich in Breite und Höhe positionieren sowie nach vorn und hinten wenden. In vier Größen erhältlich: XS, S, M und L.

ELEKTRISCHE BEDIENUNG DER SITZHÖHEN-/SITZWINKELFUNKTION







Zur Anbringung unter der Armlehne, am Rücken bei separater Steuerung oder zur Steuerung per Joystick.


ELEKTRISCHE BREMSE

Kann der manuelle Bremshebel vom/von der AnwenderIn nicht bedient werden, erleichtert die elektrische Bremse das Bremsen.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Kopfstütze flach, 29x16 cm	NS1046	9	Ladebuchse mit Gehäuse 1 Funktion	803029
2	Kopfstütze geformt, 31x18 cm	NS3046		4 Funktionen	803030
3	Kopfstütze ErgoMedic PLUS 30x23	NS2046	10	Joystick mit Bremsknopf für Trippel-/Therapiestühle mit 2 elektrischen Verstellungen	802742
4	Kopfstütze ErgoMedic PLUS 30x8	NS4046		mit 3 elektrischen Verstellungen	802743
5	Kopfstützmechanismus universal S (H 28 cm) M (H 38 cm) L (H 48 cm)	NS30 NS20 NS10	11	Kabelfernbedienung für eine elektr. Verstellung	802739
6	Kopfstützmechanismus PLUS seitenverstellbar S (H 28 cm) M (H 38 cm) L (H 48 cm)	NS31 NS21 NS11	12	Kabelfernbedienung für 2 - 4 elektr. Verstellungen	802740
7	Oberschenkelführung-Befestigung PLUS Rechts Links Paar	SS11 SS12 802874	13	Fußpedal für elektrisches Anheben/Senken	802688
8	Oberschenkelführung XS (15x8 cm) S (28x8 cm) M (25x14 cm) L (30x16 cm)	SS10XX SS20XX SS30XX SS40XX	14	Akkuladegerät für Elektrostuhl 12 V	802289
			15	Bedienkasten mit flachem Schalter	803893
			16	Bedienkasten mit Schalter 'Zunge'	803034

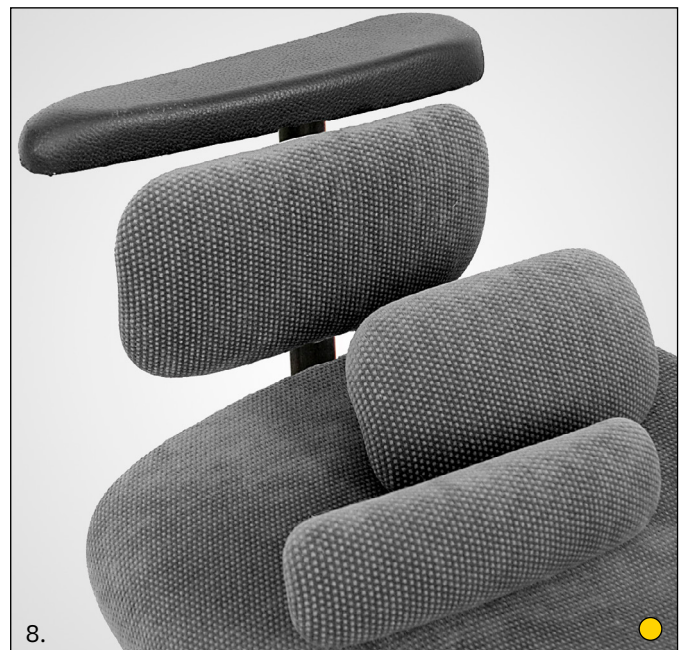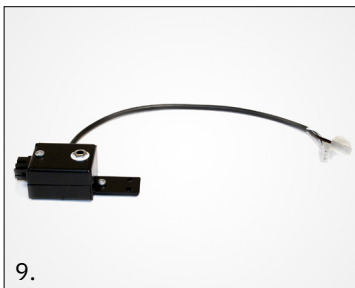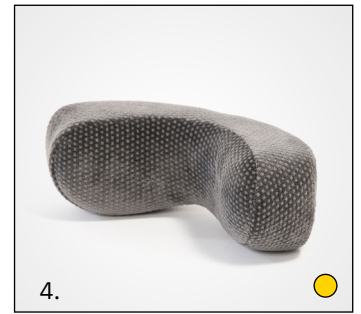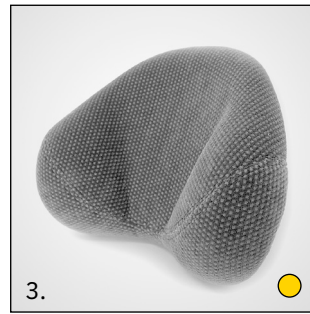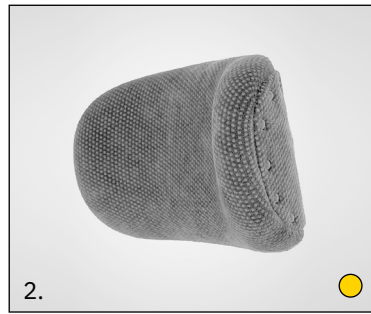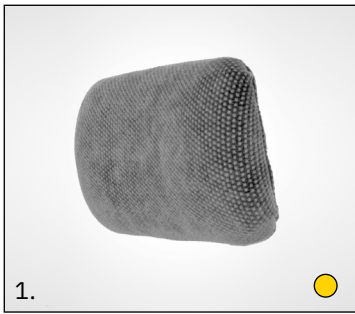

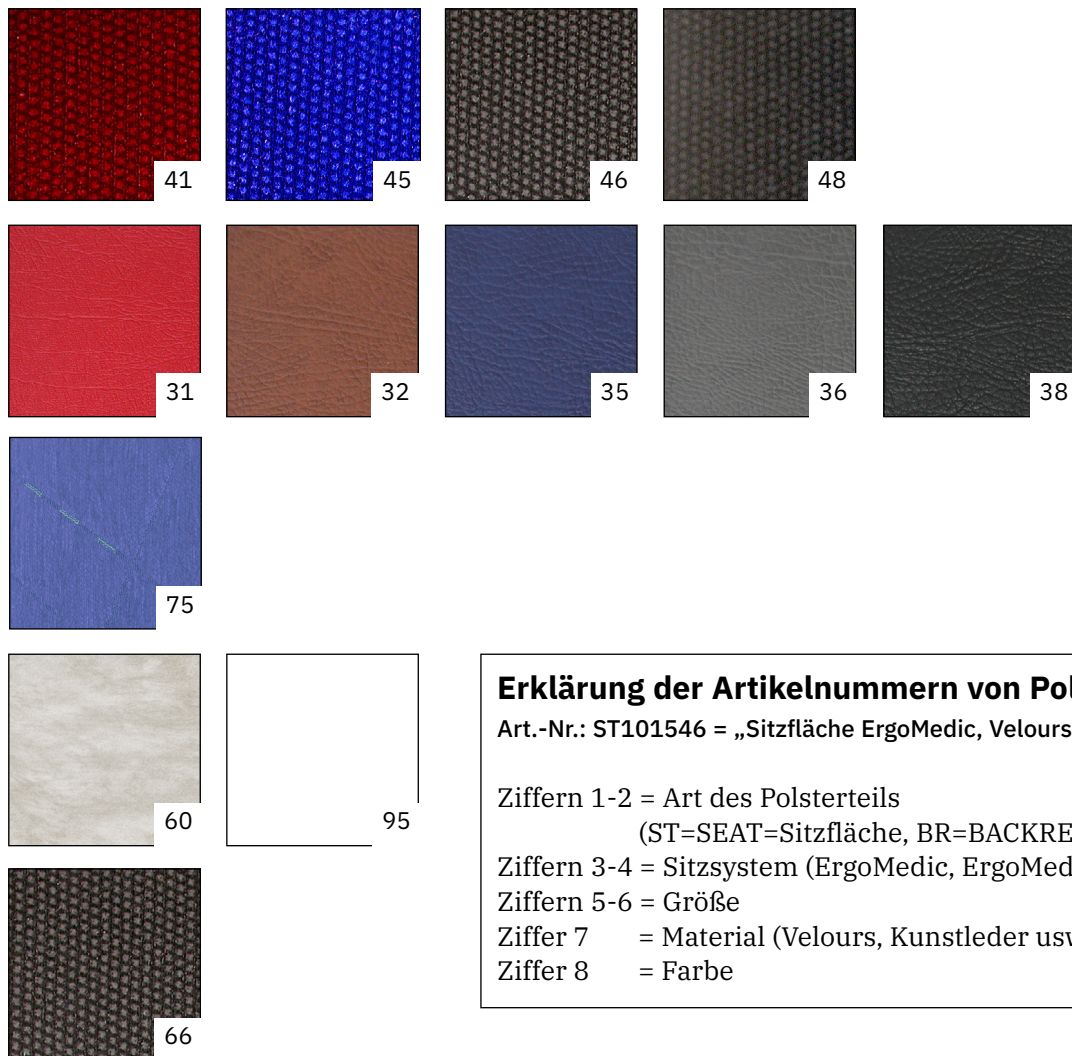

Erklärung der Artikelnummern von Polsterteilen

Art.-Nr.: ST101546 = „Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils

(ST=SEAT=Sitzfläche, BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)

Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS usw.)

Ziffern 5-6 = Größe

Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)

Ziffer 8 = Farbe

BEZÜGE

Velours

41 Weinrot 45 REAL-Blau 46 Grau 48 Schwarz

Kunstleder

31 Rot 32 Braun 35 Blau 36 Grau 38 Schwarz

Gemusterter Stoff Erwachsene

75 Blau

Weitere Bezugsoptionen

60 Inkontinenzbezug 95 ohne Bezug

Wechselbezüge

66 Inkontinenzbezug (Velours mit grauem Kunststoffüberzug)

Für alle Polsterteile von Mercado Medic sind Bezüge erhältlich.