



BÅLSTÖD


TS31



TS2038



TS312038

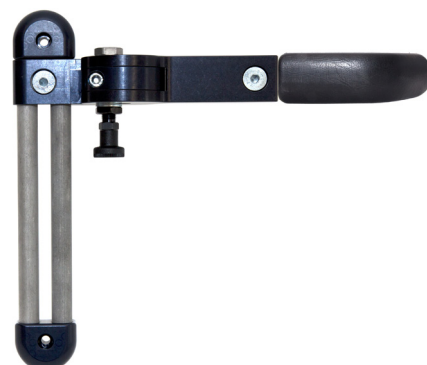

ART. NR.

BESKRIVNING

TS31	Bålstödsmechanism, sväng- och ställbar, höger
TS32	Bålstödsmechanism, sväng- och ställbar, vänster
TS 2038	Bålstöds kudde, sväng- och ställbar
TS311038	Bålstöd sväng&ställbar kompl H Kudde 15x13 Konstläder Svart
TS321038	Bålstöd sväng&ställbar kompl V Kudde 15x13 Konstläder Svart
TS312038	Bålstöd, sväng- och ställbar, kpl, höger, konstläder svart
TS322038	Bålstöd, sväng- och ställbar, kpl, vänster, konstläder svart

PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 6100	Elektrisk rullstol inomhusbruk
REAL 6160PB	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS BARN
REAL 6160PV	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS VUXEN
REAL 9000	Arbetsstol REAL 9000
REAL 9000P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS VUXEN MANUELL max 140 kg
REAL 9100P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS VUXEN EL max 150 kg
REAL 9300P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS BARN MANUELL max 75 kg
REAL 9300PM	Arbetsstol REAL 9000 PLUS MINI MANUELL max 50 kg
REAL 9400P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS BARN EL max 75 kg
REAL 9400PM	Arbetsstol REAL 9000 PLUS MINI EL max 50 kg
REAL 9700P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS COXIT MANUELL max 140 kg
REAL 9800P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS COXIT EL max 150 kg

TSXX

DOK.TSXX.1404

2020.03.01



BRUKSANVISNING

För att ställa in och justera sväng- och ställbart bålstöd:

1. Börja med att lossa skruven (1) med hjälp av en insexnyckel (5 mm). Ställ därefter in det låsta "startläget" på bålstödet. Lås sedan skruven (1) igen.
2. När steg ett är utfört är bålstödsmekanismen låst i det läget den ställts in i. För att svänga ut bålstödet; drag ned plastknoppen som sitter under skruven (1). Detta släpper på låset vilket gör att bålstödet kan svängas fritt tills dess att plastknoppen släpps tillbaka – då kommer bålstödet låsas när det hamnar i "startläget" igen.
3. För att ställa in höjden på bålstödet, lossa på skruv (3) med hjälp av en insexnyckel (5 mm). Ställ därefter in den önskade höjden på bålstödet. Lås sedan skruven (3) igen. Utför detta steg med bålstödet fritt svängandes, då det kan ta i sidan på ryggen om det ställs nedåt i låst läge.
4. För att ställa in djupet på bålstödet, lossa på skruv (4) med hjälp av en insexnyckel (5 mm). Ställ därefter in det önskade djupet på bålstödsudden. Lås sedan skruven (4) igen.



MONTERINGSANVISNING

FÖRBEREDD RYGGPLATTA



1 x **TS31**
bålstödsmekanism sväng-
och ställbar, höger



1 x **TS32**
bålstödsmekanism sväng-
och ställbar, vänster



4 x **803771**
insexskruv M6x30

Börja med att undersöka om just er ryggplatta är förberedd för sväng- och ställbart bålstöd; detta görs enklast genom att trycka tummen emot tyget på baksidan i nederkant, på valfri sida. Drag sedan tummen uppåt längs med sidan på ryggen ungefär 1 cm innanför nitarna. På en förberedd rygg kommer ni att känna två hål på vardera sida med 20 cm mellanrum i höjddled.

Förberedd ryggplatta:

1. Börja med att öppna upp tyget över de förberedda gängorna; detta görs lättast med hjälp av en mattniv. Observera att öppningen inte behöver vara allt för stor, det räcker oftast med att skära upp ett litet kryss i tyget.
2. Placera bålstödsmechanismen (TS31) på ryggen och fäst sedan ett utav fästena med en M6x30 insexskruv (803771).
3. Rikta in bålstödsmechanismen (TS31) så att det andra fästet tangerar den andra förberedda gängan, fäst det sedan på samma sätt som i det tidigare momentet.

Drag åt skruvarna M6x30 insexskruv (803771) utan att lägga tryck mot ryggen så att bålstödsmechanismen (TS31) sitter fast och ej går att vicka eller röra på.

Upprepa dessa fyra moment på motsvarande sida av ryggplattan för att fästa den andra bålstödsmechanismen (TS32 för vänster sida).

1



2



3



EJ FÖRBEREDD RYGGPLATTA



1 x **TS31**
bålstödsmechanism sväng-
och ställbar, höger



1 x **TS32**
bålstödsmechanism sväng-
och ställbar, vänster



4 x **803771**
insexskruv M6x30



4 x **804101**
insatsgänga
M6x4,8

1. Börja med att placera bålstödsmechanismen (TS31) i önskat utgångsläge.

1



forts. MONTERINGSANVISNING

2. Öppna sedan upp ett hål i tyg och ryggplatta med en 6mm borrar. Detta görs lättast och med högst precision genom att borrar hålet igenom hålet i fästet som redan är placerat i korrekt läge på ryggplattan.
3. Flytta nu bort bålstödsmekanismen (TS31) ifrån ryggplattan och borsta eller blås bort träspån.
4. Öppna nu upp det nya hålet med en 9,5 mm borrar. Borsta eller blås bort träspån.
5. Placera en insatsgänga (804101) i det uppborrade hålet.
6. Drag ned insatsgängan (804101) med en 6 mm sexkantsnyckel. Drag den ca 1 mm under träytan på ryggplattan.
7. Placera bålstödsmekanismen (TS31) på ryggen och fäst sedan ett utav fästena med en M6x30 insexskruv (803771).
8. Rikta in bålstödsmekanismen (TS31) så att den ligger i önskat läge med den ena insexskruven (803771) fäst.
Upprepa nu steg 2 till och med 7 på det andra fästet i bålstödsmekanismen (TS31).
9. Drag åt båda insexskruvarna (803771) så att bålstödsmekanismen (TS31) sitter.
Upprepa dessa nio moment på andra sidan ryggen för att fästa den andra bålstödsmekanismen (TS32 för vänster sida av ryggen).



Montering av bålstöds kudde

Drag åt låsskruven för att låsa kudden på plats (se inringat).



DESTRUKTIONSANVISNING

BÅLSTÖDSMEKANISM

– sorteras som *stål*