

# Bord

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Dok.nr: 20-06617

Revision: 01

Ändrad: 2022-12-08

Giltig från: 2007-06-01

## Artikel

Bord 60x45 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS  
 Bord 60x45 cm f fällbart armstöd  
 Bord 45x37 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS  
 Bord 45x37 cm f fällbart armstöd

## Art.nr.

TA1010  
 TA1030  
 TA1015  
 TA1035

## Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

800897

## Utförande

Montera bordet enligt bild A(Armstödsmech. PLUS) eller bild B(Fällbart armstöd), på vänster armstöd. Återmontera armstöden i lämplig höjd så att det ger ett stöd för armbågen med axeln i nedsänkt läge.

Justera fästet(1) till önskad höjd, fritt från andra eventuella reglage. Bordet justeras i höjd så man kan arbeta på bordsytan utan att lyfta axlarna. Placera bordet på armstöden och centrera i bredd med hjälp av skruven(3). Djupledsjustera med ratten(2).

Bordet kan fällas undan eller tas bort för åtkomlighet till stolen med hjälp av ratten(2).

**OBS!** Om bordet monteras på REAL 6100 PLUS kan det vara nödvändigt att göra urtag i bordsskivan för att ha stolens manöverbox i önskad position.

