

Sidostöd PLUS

Dok.nr. 20-06644
Revision 01
Uppdaterad 2020-12-18
Skapad 2015-03-06

Montering/Bruksanvisning

ARTIKEL

SS11XXXX Sidostöd PLUS H

SS12XXXX Sidostöd PLUS V

NÖDVÄNDIGA VERTYGG

800897 T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)

INSTRUKTIONER

Lossa på armstödet och lyft upp ur breddbågen(1). Trä på sidostödet på armstödsröret(2). Säkra genom att dra åt M6-skruven i bakkant på sidostödsfästet. Sätt tillbaka armstödet i breddbågen(3).

OBS! För att lossa på armstöd PLUS måste sprinten längs ned på armstödsröret tryckas in. För att lossa på fällbart armstöd måste låsratten skruvas ut till ändläge.

