

Artikelnummer

600266 Eldonssats för ryggvinkel Real 6100

Nödvändiga verktyg

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

För att montera ryggmekanismen på sittkrysset, skruva fast de fyra skruvarna (1) i stolens sittplatta enligt bilden nedan. För att sedan montera fast ryggplattan på mekanismen, se vår monteringsanvisning för **Ryggplatta**. Ryggmekanismen går att ställa in i åtta olika fasta lägen, varje läge erhåller ett vinkelslag av 35°. Ryggvinklingens intervall justeras med skruv (3). Montera skruv i det främre hålet för justera ryggens intervall längre fram på sitsen. Det bakre hålet ger intervall längre bak på sitsen (större sittdjup). Ryggfällningens djup kan regleras steglöst 45 mm med skruv (4). Skruva upp den och för fästet (5) till önskat läge. Drag åt skruv (4).

För programmering se vidare i Wizard Program 5.5.6.

MANÖVERBOX DX 90

Koppla in eldonskontakt (2) i stolens fördelningskablage (6) ACT 2. Fördelningskablage är monterat under sitsen.

MANÖVERBOX DX 2

Koppla in eldonskontakt (2) i kontakt (8). Kontakten (9) ska föras in i fördelningsboxen slot 3 (7). Fördelningsboxen är monterad under sitsen.

MANÖVERBOX LINX

Koppla in eldonskontakt (2) i fördelningsbox (10). Fördelningsboxen är monterad under sitsen.

