

Armstöd Hemiplegi

REAL 6100 PLUS, REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804568

Ändrad: 1605

Giltig från: 160101

Artikel	Art.nr.
Armstödsmechanism Fällbar Hemiplegi	ARM4XXX
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)	800897

Instruktioner

Skruva ur skruvarna som håller armstödsplattan på plats och avlägsna dem tillsammans med armstödsplattan(1).

Skruva ur skruvarna som håller fästet för armstödsplattan samt eventuell förhöjningsdistans på plats och avlägsna alltsammans(2).

Skruva fast armstödsplattan i fästet med hjälp av skruvarna(3).

Skruva fast hemiplegimekanismen i armstödsmechanismen med hjälp av skruvarna(4).

