

Bålstöd

REAL MOBIL 6100, REAL 6100 PLUS, REAL 9000, REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 802023
Ändrad: 1505
Giltig från: 960601

Artikel	Art.nr.
Bålstödsmech. Medic Rak Hö u stoppdetalj	TS11
Bålstödsmech. Medic Rak Vä* u stoppdetalj	TS12
Bålstödmek. Medic Svängd Hö u stoppdetalj	TS21
Bålstödmek. Medic Svängd Vä u stoppdetalj	TS22
Bålstöd kudde 15x13	TS10XX
	XX färgkoder finns i prislistan och i utprovningsprotokollet.
* Visas på bild.	

Nödvändiga verktyg	Art.nr.
T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897
Stjärnmejsel/Skruvdragare	

Utförande

Montera ihop bålstödet enligt bilden.

Skruva i skruvarna (4) i de befintliga gängorna på bålstödsudden, de kan justeras i fyra olika lägen i djupled.

Justera bålstödet höjd/bredd till mitt i justeringen innan montering. Prova ut lämplig placering av bålstöden och skruva fast bålstödsfästena i ryggplattan med de medföljande självborrande träskruvarna (3).

Bålstödet justeras i höjd med skruven (2), i sidled med skruven (1). Bålstödsplattans placering i djupled kan justeras genom att flytta skruvarna (4) inom bågens hålbild.

