

# Batteribyte

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803014  
Ändrad: 1606  
Giltig från: 070601

## Artikel

Batteri REAL Elstol Vuxen 12V 7.2Ah

## Art.nr.

801134

Batteri REAL Elstol 12V 3.4Ah f Br 33-39

801135

## Nödvändiga verktyg

Inga nödvändiga verktyg

## Instruktioner

Vänd stolen upp och ned.

Lossa remmen och lossa därefter batteriets anslutningar.

Placera batteriet innanför styrvinklarna på sittkrysset. Anslut med svart kabel till batteriets minuspol och röd kabel till batteriets pluspol (1).

Återslut remmen.

**OBS! Förbrukade batterier ska återvinnas i speciella behållare avsedda för batterier.**

