

Artikelnummer

LS302210 Benstöd El Delad Comfort Hö+Vä Längd XL 37-53cm (par)

LS302211 Benstöd El Delad Comfort Hö Längd XL 37-53cm

LS302212 Benstöd El Delad Comfort Vä Längd XL 37-53cm

Nödvändiga verktyg800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)
insexnycklar 4 och 6 mm**Utförande**

Montera adaptern (1) på vänster eller höger armstödsbåge i de främre eller bakre hålen beroende på sitsens storlek.

OBS! De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.

Montera benstödsadapter (2) i benstödsfästet. Håll inne avtryckaren (3), för sedan ner benstödet med del (4) i adaptern. Släpp sedan avtryckaren och kontrollera att benstödet är fixerat i adaptern. Använd insexnycklar i storlek 4, 5 och 6 mm för att göra justeringar i längd, höjd och vinkel.

Justera benstödet längd med skruven (5) insexnyckel 4 mm så att låret vilar mot sitsen. Ställ in vinkeln på fotplattan genom att justera skruven (5) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

