

Benstöd Mittmonterat

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804570

Ändrad: 1706

Giltig från: 0601

| Artikel | Art.nr. |
|---|----------|
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Grund B32xD24, Längd L 30-38cm | LS232110 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Grund B32xD24, Längd XL37-53cm | LS232210 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Mini Grund B25xD18, L 30-38cm | LS242110 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Mini Grund B25xD18, XL 37-53cm | LS242210 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Smal Grund B32xD10, L 30-38cm | LS252110 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Smal Grund B32xD10, XL 37-53cm | LS252210 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Grund B29xD24, Längd L 30-38cm | LS272110 |
| Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Grund B29xD24, Längd XL37-53cm | LS272210 |

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 5 mm (Mercadonyckeln) alt. insexnyckel 6 mm

Ringnyckel 13 mm

Instruktioner

Montera fotplattan med skruvarna (2) i sittkrysset (1). **OBS!** Beroende på sittkryss kan olika längd på skruvar och möjligtvis låsmuttrar behövas. Bilden nedan visar montering på vinkelfast sittkryss.

Justera benstödet med ratten (3) så att låret vilar mot sitsen. Ställ in vinkeln på fotplattan genom att justera skruven (4) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av. Ställ in vinkeln på benstödet genom att släppa på låsskruv (5). Montera in skruven (5) i något av vinkelalternativen. Drag åt.

