

# Adapter benstöd, Cross

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 803307  
Ändrad: 1701  
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Adapter benstöd, Cross H+V	AD4010
Adapter benstöd, Cross H	AD4011
Adapter benstöd, Cross V	AD4012
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897

## Instruktioner

Montera adaptorn (1) på vänster eller höger armstödsbåge (2) i de främre eller bakre hålen, beroende på sitsens storlek.

**OBS!** De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.

Fäst armstödsbågen (2) på sittkrysset (3). Ställ in rätt armstödsbredd och lås fast med ratt eller skruv (4). Lås därefter fast adaptorn i rätt läge genom att dra åt skruvarna (5) med T-nyckeln. Justera till rätt djup och lås med ratten (6).

