

Bord

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802899

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Bord 60x45 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS
 Bord 60x45 cm f fällbart armstöd
 Bord 45x37 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS
 Bord 45x37 cm f fällbart armstöd

Art.nr.

TA1010
 TA1030
 TA1015
 TA1035

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

800897

Utförande

Montera bordet enligt bild A(Armstödsmek. PLUS) eller bild B(Fällbart armstöd), på vänster armstöd.

Återmontera armstöden i lämplig höjd så att det ger ett stöd för armbågen med axeln i nedsänkt läge.

Justera fästet(1) till önskad höjd, fritt från andra eventuella reglage. Bordet justeras i höjd så man kan arbeta på bordsytan utan att lyfta axlarna. Placera bordet på armstöden och centrera i bredd med hjälp av skruven(3). Djupledsjustera med ratten(2).

Bordet kan fällas undan alternativt tas bort för åtkomlighet till stolen. I båda fallen används endast ratten(2).

