

## Artikel

För komplett förteckning över sittplattor, se dokument "Ergonomiska Sittsystem"

## Nödvändiga verktyg

T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)  
Insexnyckel 6 mm  
Ringnyckel 10 mm

## Art.nr.

800897

## Utförande

Demontera först fixlyftmaten från stativet genom att lossa de två skruvarna som sitter på centralröret på stativet och klämmer fast fixlyftmaten. Skruva loss sittplattan (1) från sittkrysset genom att skruva loss de åtta skruvarna (2) som sitter i sittkrysset. Demontera fixlyftmaten genom att skruva loss skruvarna (3). De håller tillsammans med låsmuttrar ihop sittkrysset med fixlyftmaten. Montera manöverspaken. Montera sedan fixlyftmaten i omvänd ordning. Byt ut låsmuttrarna mot nya. Skruvarna i stativet dras åt med 16 Nm på den övre skruven och 20 Nm på den undre.

