



BYTE AV DRIVDÄCK

804291

Du behöver: *insexnyckelsats*.



PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 6100 PB	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS BARN
REAL 6100 PV	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS VUXEN

#804291

DOK.804291.1411

2014.11.11



BYTE AV DRIVDÄCK


1. Lägg en kloss (A) som är minst 4,5 cm hög under frambenets infästning.



2. Skruva loss de fyra (4) skruvarna (A) moturs.



3. Lyft av drivdäcket.

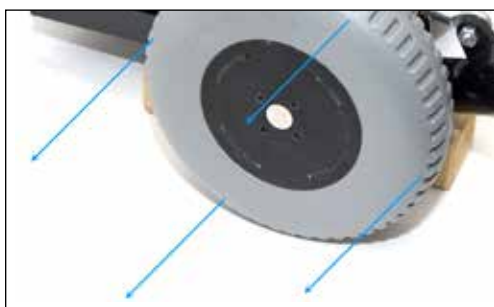

4. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.



5. Lyft på drivdäcket.



6. Drag åt de fyra (4) skruvarna medurs.



Monteringen är klar. 🚩