

Fotring PLUS

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803008
Ändrad: 1701
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Fotring 1/8 H uppfällbar f Plus 48 stativ	FR1010
Fotring 1/8 H uppfällbar f Plus 43 stativ	FR1020
Fotring 1/8 V uppfällbar f Plus 48 stativ	FR2010
Fotring 1/8 V uppfällbar f Plus 43 stativ	FR2020
Fotring 1/4 uppfällbar f Plus 48 stativ	FR3010
Fotring 1/4 uppfällbar f Plus 43 stativ	FR3020

Nödvändiga verktyg

T-nyckel 6 mm insexverktyg
Ringnyckel 13 mm

Instruktioner

Montera fast fotringen enligt bild nedan. Drag åt skruvarna (1) löst. Justera fotringen i höjddled så att klämförbandets överkant ligger i linje med underkanten på slitsen i centralröret. Centra fotringen i sidled. Drag åt skruvarna (1) hårt. Kontrollera fotringens funktion.

