

Artikelnummer

803503 Fyrbromskit till PLUS-stativ 48 inkl. stativförlängare fram

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm

Ringnyckel 19 mm

Utförande

1. Demontera länkhjulen (1) från stativet med en för ändamålet modifierad* ringnyckel 19 mm.
2. Montera stativförlängarna (2) på stativet.
3. Applicera Loc-Tite 243 på M12-skraven (3). Montera skruven och brickan.
Drag åt hårt med ringnyckel 19 mm.
4. Drag åt klämförbandet med skruven (4) hårt med insexnyckel 6 mm.
5. Applicera Loc-Tite 243 på länkhjulens M12-skruv (5).
6. Montera länkhjulen i stativförlängaren. Drag åt hårt med ringnyckel 19 mm.
7. Montera fast bromsstaget på den bakre bromsfoten (6).
8. Kontrollera att stolen står stadigt på jämnt underlag innan den tas i bruk.
9. Kontrollera bromsens funktion.

*Ringnyckeln är nedslipad till en höjd på 7mm.

