

Gasfjäderreglage

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 803021

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Sitsvinkelkit till grundmodell för PLUS armstöd

Art.nr.

SAR31

Nödvändiga verktyg

Torx T25

Utförande

Montera gasfjädern och dess medföljande detaljer enligt bild(1). **OBS! Glöm inte låssprintarna!**

Placera spaken under armstödet enligt bild(2). Spakfästet läggs an mot fyrkantens utsida. Spakens och armstödet framkant ska normalt linjera. Drag de två träskruvarna i armstödet träplatta. Skruvarna är självborrande. (Vid montering av reglage på motsatt sida; lyft på och vänd överdelen av plastboxen 180°.)

Drag vajern innanför armstödet breddjusteringsbåge. Finjustera spelet så att spaken går att lyfta ca 2 mm innan gasfjädern aktiveras. Drag sedan åt vajernippelns kontramutter.

Kontrollera funktionen.

