

Artikelnummer

SAR31 Sitsvinkelkit till grundmodell för PLUS armstöd

Nödvändiga verktyg

Torx Nyckel stl. 25

10 mm och 8 mm fasta nycklar

Utförande

Placera spaken under armstödet enligt bild 1. Spakfästet läggs an mot fyrkantens utsida.

Spakens och armstödet ska normalt linjera. Drag de två träskruvarna i armstödet träplatta.

Skruvarna är självborrande.

 Montera gasfjäders och dess medföljande detaljer enligt bild 2. **OBS! Glöm inte låssprintarna!**

(Vid montering av gasfjäders på motsvarande sida; lyft på och vänd överdelen på plastboxen 180°.)

Drag vajern innanför armstödet breddjusteringsbåge. Finjustera spelet så att spaken går att lyfta

ca 2 mm innan gasfjäders aktiveras. Drag sedan åt vajernippelns kontramutter.

Kontrollera funktionen.

