

# Körbygel & körhandtag

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 803415

Ändrad: 1701

Giltig från: 1001

## Artikel

Körhandtag PLUS(par)  
Körbygel f 48 PLUS-stativ  
Körbygel f 43 PLUS-stativ

## Art.nr.

PB1010  
PB1011  
PB2011

## Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 5 mm (Mercadonyckeln)

800897

## Utförande

De nedre fästena (1) skjuts på stativets bakken enligt bild. **OBS! Länkhjul behöver inte demonteras!** Om stolen är utrustad med stativförlängare bak monteras körbygel och körhandtag på samma sätt, fast på stativförlängaren. Drag åt skruvarna (2) med insexnyckel 5 mm hårt när bygel eller handtag är i lämpligt läge. Justera i lämplig vinkel och drag sedan åt skruvarna (3) hårt med insexnyckel 5 mm. Om stolen är utrustad med sitsvinkling justeras bygeln eller handtagen så att ryggstödet går fritt i sitt bakre läge. Bygeln eller handtagen ställs in i lämplig höjd och låses med vreden (4).

