

Körhandtag Klinik

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803025
Ändrad: 1702
Giltig från: 0710

Artikel

Körhandtag Klinik (fäst under sits)

Art.nr.

PB1012

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

800897

Utförande

Vänd stolen upp och ned. Lämpligast är att placera stolen med sittplattan eller armstödsplattor på ett bord.

Tag bort ryggstolpen. Demontera ryggfällningen(1) genom att lossa de fyra skruvarna(2). Placera körhandtagets fäste(3) på sittplattans undersida. Återmontera ryggfällningen(1) på körhandtagets fäste(3).

Drag åt skruvarna MC65 6x25(2) hårt. **OBS! använd de medföljande skruvarna och inte de ursprungliga.**

Vänd stolen rätt. Återmontera ryggstolpen. Justera körhandtaget till lämpligt läge med hjälp av vreden(5). Körhandtaget är justerbart i djup och höjddled. Drag åt hårt. Se till att körhandtaget inte kolliderar med andra delar på stolen

