



# BYTE AV LÄNKHJUL

804251

Du behöver: *ringnyckel #19.*



## PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 6100 PB	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS BARN
REAL 6100 PV	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS VUXEN

# 804251

DOK.804251.1411

2014.11.11



# BYTE AV LÄNKHJUL

1. Lossa på bulten (A) under benet.



2. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.



3. Applicera rikligt med gänglåsning  
Loctite 243 (A).



4. Drag fast bulten (A) under benet med 81 moment.



*Monteringen är klar.*