

# Byte av ellyftomat

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804220

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

## Artikel

Ellyftomat 20 cm  
Ellyftomat 28 cm  
(fler modeller finns)

## Art.nr.

801106  
801094

## Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)  
6 mm insexnyckel

800897

## Utförande

Börja med att ta loss stolens rygg. Lossa skruvarna(1) vid klämförband i stativ och lyft av överdelen av stolen från stativet. Vänd överdelen upp och ned så att den vilar på armstöden. Lossa batteriremmen och därefter batteriets anslutningar. Lossa sits genom att lossa skruvarna i sittkryssset(2). Lossa skruvarna på sittkrysssets ovasida som är fästa i ellyftomaten(3). Lossa reläkortsboxen från ellyftomatens aluminiumhus genom att skjuta av den från fästet på ellyftomatens hus. Skruva loss reläkortsboxfästet från ellyftomaten. Byt ellyftomaten.

Skruva fast reläkortsboxfästet på den nya ellyftomaten. Fäst reläkortsboxen på ellyftomatens hus genom att skjuta på den. Skruva fast 4st M8x16 skruvar genom sittkrysssets ovan del ned i ellyftomaten(3). OBS! Använd Loctite 243 eller motsvarande för att säkra skruvarna. Skruva fast sits i sittkryssset med rätt skruvar(2) för sittkryssset. Fäst batteriremmen och därefter batteriets anslutningar. Placera batteriet innanför styrvinklarna på sittkryssset. För 12-voltssystem, anslut med svart kabel till batteriets minuspol och röd kabel till batteriets pluspol(A). För 24-voltssystem koppla in ellyftomaten i port 1 på elsystemet(B).

Vänd överdelen av stolen rätt och för ned ellyftomaten i stativets centralrör(4). Rikta överdelen i stolens färdriktning och drag sedan åt skruvarna(1) ordentligt med 6 mm insexnyckel. Avstånd mellan ellyftomatens underdel och golv bör vara 30 mm.

