



BYTE AV MANÖVERBOX

BOXXX

Du behöver: *insexnyckelsats*.



PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 6100	Elektrisk rullstol inomhusbruk
REAL 6100 PB	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS BARN
REAL 6100 PV	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS VUXEN

BOXXX

DOK.BOXXX.1411

2014.11.11



BYTE AV MANÖVERBOX

1. Skruva loss de fyra (4) skruvarna (A) på undersidan av manöverboxen.



2. Separera manöverarmen från manöverboxen (A).



3. Dra ur manöverboxkabeln (B) genom att dra den utåt från manöverboxen samtidigt som låsmekanismen (A) dras bakåt.



4. Tag fram den nya manöverboxen.



5. Plugga in manöverboxkabeln (A) i manöverboxen.



6. För samman manöverboxen och manöverarmen (A).



7. Drag åt de fyra (4) skruvarna (A) på undersidan av manöverboxen.



Monteringen är klar. 