


De REAL-stoel heeft uitwisselbare componenten, accessoires en functies, die afgestemd kunnen worden op de individuele wens. De stoel is slechts bedoeld voor gebruik, waarvoor deze oorspronkelijk is ontworpen. De stoel is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis en mag niet blootgesteld worden aan water, vloeibare middelen of chemicaliën. Tevens mag de stoel niet blootgesteld worden aan hoge temperaturen of langdurig intensief zonlicht. Het is niet toegestaan accessoires of componenten, die niet goedgekeurd zijn door Mercado te monteren. Reparaties en technische aanpassingen mogen alleen verricht worden door technici bevoegd door Mercado Medic AB. Voor gebruik eerst de instructies doorlezen.


## Rugsteun

Er zijn twee types rugmechanismen: Standaard en Medic. De rugsteunen zijn beide in een lage als een hoge versie verkrijgbaar (alle geïllustreerde stoelen zijn voorzien van de hoge versie). Beide mechanismen hebben een aparte instelling voor hoogte (1) en hoek (2). Draai de knop los, verstel naar de gewenste hoogte/hoek en vergrendel dan de knop. Bij het Medic model kan ook de diepte versteld worden door een knop (3). De hoek van de rugsteun zelf kan ook versteld worden door een knop (4).

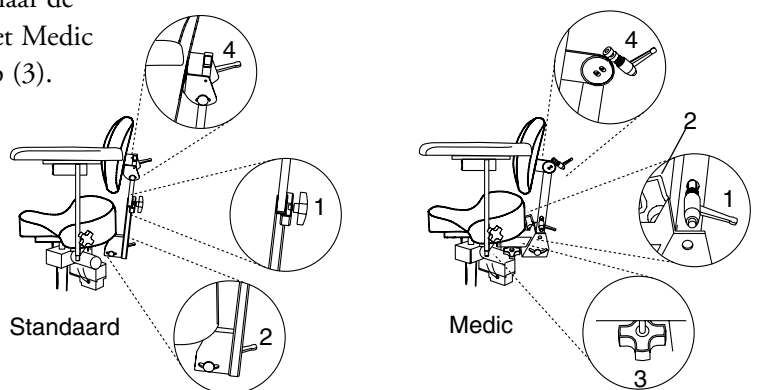


## Armsteun

De armsteunen kunnen in breedte en hoogte versteld worden. Draai knop (1) of knop (2) los om de hoogte of respectievelijk de breedte te verstellen. Om de juiste hoogte of breedte te behouden vervolgens de knoppen weer aandraaien.

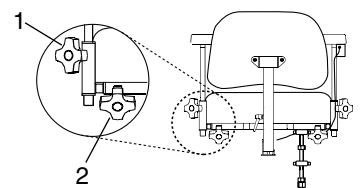


## Zithoogte

De zithoogte is verstelbaar d.m.v. een handel (1) onder één van de armsteunen. Trek de handel omhoog om de zithoogte te veranderen. Bij de EL modellen is de zithoogte te verstellen d.m.v. een drukschakelaar (2). Omhoog: Druk op het bovenste gedeelte van de schakelaar. Omlaag: Druk op het onderste gedeelte van de schakelaar.

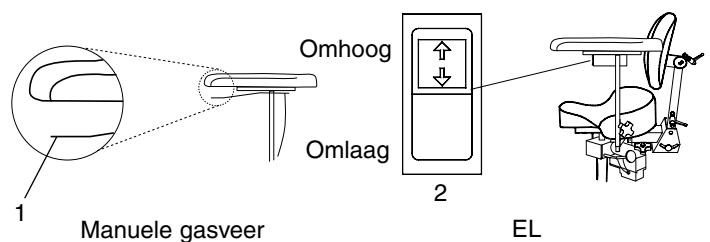


## Rotatieblokkeerinrichting (alternatief voor REAL 9600EL)

Bij stoelen uitgevoerd met deze optie kan de zitunit 360 graden t.o.v. het onderstel draaien. Door knop (1) een kwartslag met de klok mee te draaien, kan men roteren. "LET OP" Zorg er altijd voor dat de stoel vergrendeld is bij het opstaan of zitten gaan.

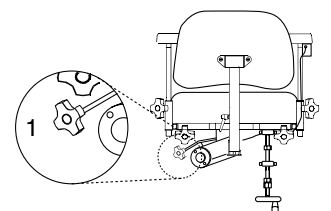


## Reminstallatie

De reminstallatie wordt in werking gesteld door handel (1) voorwaarts te bewegen. De remhandel kan zowel links als rechts geplaatst worden. **Let op!** Stel de rem in werking bij het opstaan of gaan zitten. Controleer de werking van de rem geregeld. De remdoppen kunnen na slijtage vervangen worden. De remfunctie verslechterd bij gebruik op oneffen vloerooppervlak.

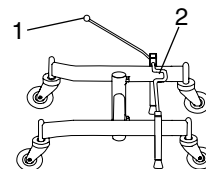

## Zithoek

De handel om de zithoek aan te passen zit onder de stoel. Met behulp van de draaispindel (1) kan de hoek ingesteld worden. Voor een nauwkeurige instelling kan men met behulp van de moeren (2) de hoek veranderen.

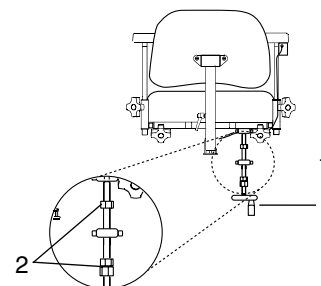

## Schoonmaken, Onderhoud en Opladen

De stoel kan worden afgenomen om deze vrij te houden van stof en vuil. De bekleding kan worden gewassen met droog schuim. De zitting, rugsteun en overige gevulde onderdelen zijn uit praktische overwegingen niet vervaardigd van gesloten materiaal. Bij renovatie moeten de gevulde onderdelen uit hygiënische overwegingen worden vervangen. De elektrische liften moeten regelmatig worden gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit: Zet de zitplaat op de hoogste stand. Reinig met een doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddel. Smeer de cilinder vervolgens met een dunne laag smeermiddel op basis van teflon of siliconen.

We raden aan om de batterijlader Real 9000 Type 2240-12 V met artikelnummer 802289 te gebruiken voor het opladen van de stoel. Neem contact op met Mercado Medic BV voor schriftelijke toestemming als u een andere lader wilt gebruiken. Laad de batterij regelmatig op, indien mogelijk één keer per dag. Voor de levensduur van de batterij is het van belang dat deze nooit helemaal ontlad.

### OPLADEN (VAN TOEPASSING OP DE ELEKTRISCHE STOEL)

Sluit de oplaadstekker van de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op het kastje met de schakelaar voor het verhogen en verlagen van de stoel. Sluit de stekker van de lader vervolgens aan op een stopcontact. De led op de lader geeft aan dat er wordt opgeladen. De batterij is volledig opgeladen wanneer de led verandert van oranje naar groen.

De stoel kan worden verhoogd en verlaagd tijdens het opladen. Dit betreft elektrische stoelen verlost van week 11 2013 of eerder geleverde opgewaardeerde stoelen.

**Let op!** Het opladen van de batterij is vooral van belang op stoelen met elektrische rem, elektrische zittingkanteling en elektrische rug, aangezien voor deze functies een hoge batterijcapaciteit vereist is. Garandeer deze functionaliteit door de batterij een keer per dag op te laden. Zorg bij het verwisselen van de batterij (typeaanduiding: HP7-12 12 V 7,2 Ah) dat de rood gemarkeerde batterijkabel wordt aangesloten op de pluspool van de batterij en de minkabel op de minpool. Als de elektrische functie van de stoel niet meer werkt, is er waarschijnlijk een zekering uitgevallen. Controleer de zekeringen. Deze zijn geplaatst onder de zitting op het snoer tussen de batterij en de instelling. Vervang de defecte zekering door een nieuwe zekering van 25 A.

**Houd rekening met het volgende wanneer u omgaat met batterijen:** Sluit de batterij nooit kort. • Stel de batterij niet bloot aan krachtige stoten of open vuur. • Bij contact met de batterijzuur gedurende circa 30 min. spoelen met water. Raadpleeg een arts. • Lege batterijen moeten correct worden ingezameld.

