

Rygg-/Magplatta

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS, REAL 2000

Artikelnr: 804694

Ändrad: 1701

Giltig från: 9606

Artikel

För komplett förteckning över rygg-/magplattor, se dokument "Ergonomiska Sittsystem"

Nödvändiga verktyg

T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Art.nr.

800897

Utförande

För att montera på en ny rygg-/magplatta, skruva loss skruvarna (1) på baksidan av rygg-/magplattan (tre skruvar på hög ryggplatta respektive två skruvar på låg rygg-/magplatta) med Mercadonyckeln.

Montera därefter på den nya rygg-/magplattan och skruva åt skruvarna igen.

