

Sidostöd PLUS

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804537
Ändrad: 1603
Giltig från: 150306

Artikel	Art.nr.
Sidostöd PLUS fäste H	SS11
Sidostöd PLUS fäste V	SS12
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)	800897

Instruktioner

Lossa på armstödet och lyft upp ur breddbågen(1). Trä på sidostödet på armstödsröret(2). Säkra genom att dra åt M6-skraven i bakkant på sidostödsfästet. Sätt tillbaka armstödet i breddbågen(3).

OBS! För att lossa på armstöd PLUS måste sprinten längs ned på armstödsröret tryckas in.
För att lossa på fällbart armstöd måste låsratten skruvas ut till ändläge.

