

**Artikelnummer**

802874	Sidostöd fäste Plus Hö+Vä kpl.	SS11	Sidostöd PLUS fäste H
SS40XX	Sidostöds kudde L 30x16 cm	SS12	Sidostöd PLUS fäste V
SS30XX	Sidostöds kudde M 25x14 cm		
SS20XX	Sidostöds kudde S 28x8 cm		
SS10XX	Sidostöds kudde XS 15x8 cm		

XX-färgkoder finns i prislistan och i utprovningsprotokollet.

**Nödvändiga verktyg**

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

**Utförande**

Lossa ratten (3). Lyft ur armstödet höjjusteringsrör, trä på sidostödsfästets mekanik (4) på höjjusteringsröret. Mekaniken (4) kan vändas framåt eller bakåt på höjjusteringsröret för att erhålla olika djupjustering, även beslaget på sidostöds kudden kan vändas för ytterligare djupjustering.

Med skruv (1) justeras sidostödets höjd samt vinkel.

Med skruv (2) justeras kuddens vinkel i djup samt bredd.

