

TABLE 5075

Om de tafel hoger of lager te zetten dient u de sterknoppen links en rechts op de verticale buizen los te draaien(1). Nadat de gewenste hoogte bereikt is dient u de sterknoppen weer vast te draaien. Op de verticale buizen kunt u de gewenste hoogte aflezen. Het is aan te raden om de hoog/laag verstelling met 2 personen te doen zodat de tafel gelijkmatig hoger te zetten is.

Om het tafelblad te kunnen kantelen dient u het blad te liften bij het uiteinde(2). Het tafelblad is kantelbaar in 10 posities tot een maximum van 30 graden. Als het tafelblad in de gewenste hoek staat laat u het blad los en deze zal dan automatisch in 1 van de 10 posities blijven staan. Wilt u het tafelblad weer lager zetten dan de gekozen positie dan dient u het blad naar de hoogste kantel positie te brengen en het dan weer te laten zakken.

Let op: het kantelen van het blad is een optie en zit dan ook niet op elke tafel.

