





REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET
MED LÄKEMEDELSVERKET'S FÖRESKRIFTER
2003:11.

⊕ REAL® 9000 PLUS BARN

Vi har barnasinnnet Kvar!

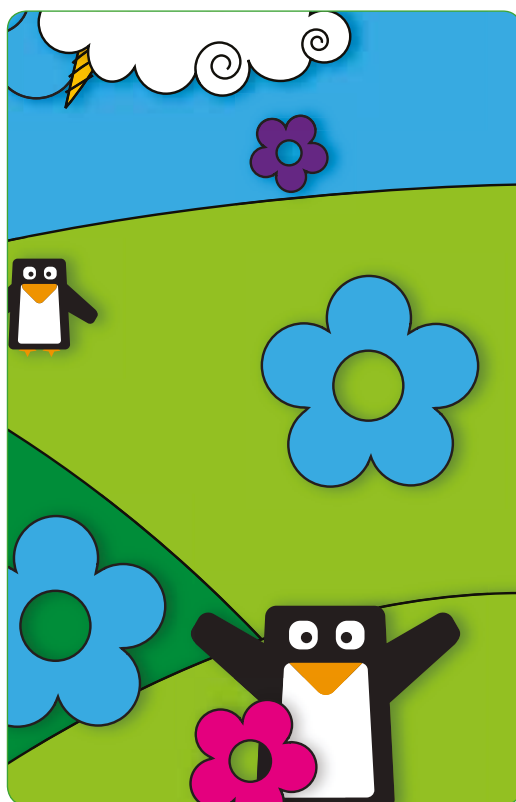

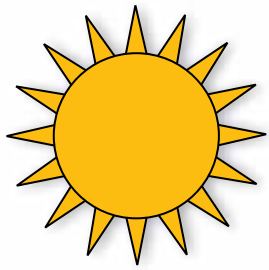

AKTIVT SITTANDE MED STORA MÖJLIGHETER

Många barn med funktionsnedsättningar kan sitta utmärkt vid ett bord utan omfattande stöd, men då behövs en stol med speciella egenskaper. Bland annat måste sitsen lätt kunna vinklas samtidigt som ett stabilt stöd för ryggen och fötterna erbjuds. REAL 9000 PLUS BARN MANUELL /EL för barn är modulstolen där behoven bestämmer utförandet.

Enkel att anpassa

I en REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL med PLUS-stativ får funktionshindrade barn möjlighet att sitta aktivt vid till exempel en skolbänk eller ett bord. Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika bordshöjder och bromsen kan skötas med hand eller fot. Det medför att man lämnar stolen tryggt på den plats man har bestämt. Tack vare att stolen är moduluppbyggd är den enkel att anpassa och komplettera då barnet växer.

Hög kvalitet

REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn är flexibel och dimensionerad för att fungera under en lång följd av år. Det är funktion som har styrt utformningen. Produkterna tillverkas vid egna anläggningar i Lidingö och Halmstad.

ErgoMedic PLUS

- ergonomi utöver det vanliga

För att ytterligare öka sittkomforten på REAL-stolarna har vi dessutom utvecklat komfortsittsystemet ERGOMEDIC PLUS. Det passar utmärkt till barn med sittproblematik. Systemet består av fyra samverkande delar; sits, rygg, armstöd och nackstöd. Sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att för att stabiliteten och komforten ska vara optimal.

Det höga ryggstödet nedre del är format så att man kan sitta med bäckenstöd även om även om ryggstödet är vinklat bakåt. Det finns även höga ryggplattor utrustade med förlängd sidokil på var sida för extra god komfort och positionering (se vår broschyr "Ergonomiska sittsystem").

” **BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR FÅR MÖJLIGHET ATT SITTA AKTIVT VID EXEMPELVIS EN SKOLBÄNK ELLER ETT BORD. TACK VARE ATT STOLEN ÄR MODULUPPBYGGD ÄR DEN ENKEL ATT ANPASSA DÅ BARNET VÄXER.**

Valfrihet

Till REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn kan man välja mellan olika många typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sitsstorlekar, samt en stor mängd funktionella tillbehör. Se vidare på sid 5-6 och i vår tillbehörsbroschyr.

PLUS-stativ 43 BARN

Det lilla smidiga PLUS-stativet tillåter enkel förflyttning av stolen även i trånga utrymmen. PLUS-stativet kombineras med det nya PLUS-armstödet. Nya Medic benstöd med smalare fotplattor finns som tillbehör.

Handreglage

För att lätt kunna reglera stolens funktioner har vi utrustat REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL

med ergonomiskt utformade handreglage. Dessa är lättåtkomliga och enkla att greppa (kan även monteras bakåt för vårdarmanövrering).

Reglagen är även märkta med symbol för avsedd funktion.

Ny mekanism för sitsvinkling

Vår nya patenterade mekanism för sitsvinkling har utökad intervall (+15°/-23°) och är ställbar i tre olika lägen (se bild nr 7 på sid 6). Detta tillval passar till alla våra sitsar och sitsvinklingar. Med ett enkelt handgrepp kan du ändra mellan de olika lägena.

Du har även valfrihet att välja om armstöden ska följa med vinklingen eller inte. På den extraförstärkta mekanismen finns inbyggt benstödsfäste.



REAL® 9000 PLUS BARN

Vi har barnasinnet kvar!



Armstödsmekanism PLUS med mjukstoppade armstödsplattor. Finns i olika längder och material.

ErgoMedic PLUS sittsystem.

Lättmanövrerad broms med breddjusterbart bromsspaksfäste. Fotbromspedal baktill är standard.

Ergonomiskt utformad stjärnratt PLUS. Enkel att greppa och reglera.

Smidigt PLUS-stativ 43x53 cm (alt. MINI 43x48 cm).

Lyftintervall på 20 cm (alt. 14 cm). El 28 cm (alt. 20 cm).

100 mm hjul med kullager från SKF. Finns i fler varianter för olika underlag.

[stolen på bilden är extrautrustad]



REAL 9000 PLUS TRANSPORT alternativt REAL 9000 PLUS TRANSPORT EL med vårdarstyrt PLUS-stativ. Stora, riktningstabila bakhjul. Främre hjulen har en diameter på 125 mm vilket underlättar passage över trösklar och dylikt.

Körbygeln manövreras av vårdare och är justerbar i djupled i två lägen. Bromsning sker via handbroms-reglage placerade på körbygeln.


**HOS MERCADO
SKRÄDDARSSYS STOLEN
EFTER BARNETS UNIKA
BEHOV. GÅ TILL VÅR
WEBSHOP OCH BYGG
BARNETS EGEN STOL!**

ETT SYSTEM DÄR BARNETS UNIKA BEHOV BESTÄMMER UTFÖRANDET

SITTPLATTA

I olika storlekar och material.



SITS-VINKLING

(+15 till -8°)
El, vev eller gas.



RYGGPLATTA OCH MEKANISM

Välj önskat utförande.



SITTHÖJD

EL eller MANUELL.




REGLAGE

Välj utförande och placering.



PLUS-STATIV

I olika varianter.

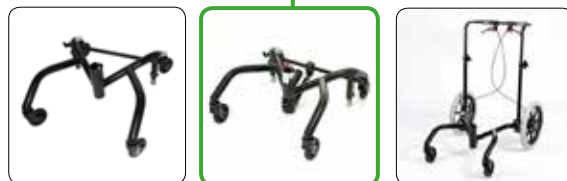

HJUL

För olika golv och i flera storlekar.



KLÄDSEL

Finns i plysch, vävt tyg och konstläder.




TILLBEHÖR

Valfrihet med stort utbud.




=



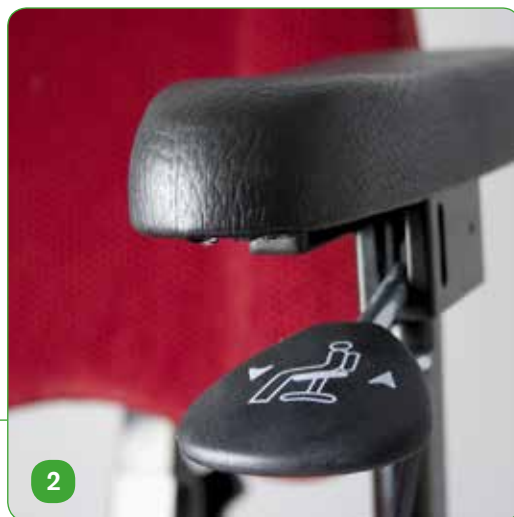


2

DETALJER 9000 PLUS BARN

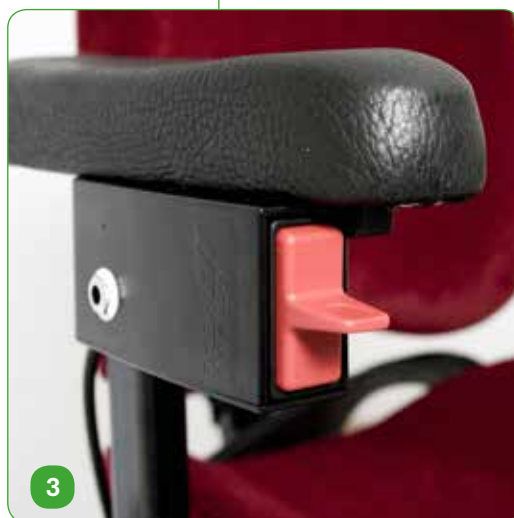


3

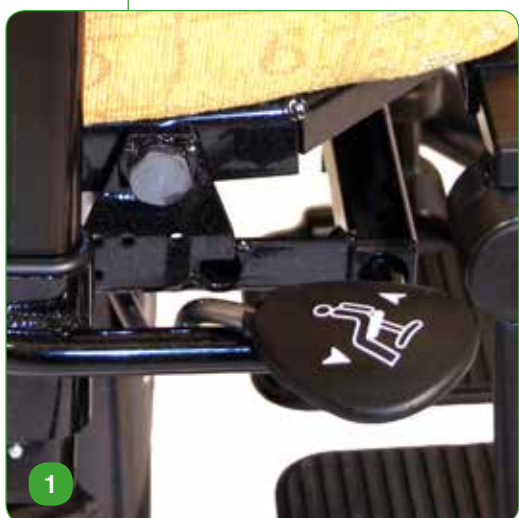

1



4

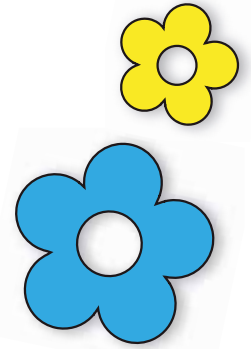

- 1 Paddelreglage PLUS för höj/sänk, vid sits (manuell stol).
- 2 Paddelreglage höj/sänk PLUS (alt. gasvinkling) vid armstöd (manuell stol).
- 3 Elreglage PLUS för höj/sänk vid armstöd (El-stol).
- 4 PLUS-stativ 43 MINI (43 x 48 cm).
PLUS-stativ 43 BARN (43 x 53 cm).
- 5 Höj-, vinkel- och sidojusterbara sidostöd PLUS.
- 6 Ställbart förstärkt sittkryss 9000 BARN, +15 /-23.
Ställbart i tre lägen (tillval).
- 7 Benstöd MINI MEDIC, med delad fotplatta (alt. hel fotplatta).
- 8 Sittsystemet ERGOMEDIC PLUS (tillval).
- 9 Benstöd mobil (BARN, MINI).
- 10 Dubbel hög MEDIC ryggstödsmekanism (tillval).
- 11 Körhandtag PLUS.
- 12 Körbygel PLUS.

REAL® 9000 PLUS BARN

systemöversikt

AB

MODELL

PLUS-stativ barn 43x53 cm (brxdj)

93
94

REAL 9000 PLUS Barnstol Manuell
REAL 9000 PLUS Barnstol EL

Med PLUS-stativ 43. Manuell Fixlyftomat.
Med PLUS-stativ 43. Elektrisk Fixlyftomat.

C

SITSTILT

0
2
3
4
5
6

Utan sitstilt
Vevreglerad sitstilt*
Gasfjäder, reglage vid sits*
Gasfjäder, reglage på armstöd*
Elreglerad sitstilt (EL)*
Förberedd för sitstilt*

Ej vinkelställbar (ej sits för 29x32 cm).
Vevreglage +15° / -8°.
Gasfjäder +15° / -8°.
Gasfjäder +15° / -8°. Reglage på armst.
Eldriven +15° / -8°. För elektrisk stol.
Fast stag.

**Förstärkt ställbart sittkryss kan monteras.*

D

LÅG RYGG

0
1
2
3

Standard ryggmekanism
Medic ryggmekanism
Comfort ryggmekanism
Elreglerad ryggmekanism (EL)

Inställning av höjd, vinkel och djup.
Utökad djupledsinställning.
Gasfjäderreglerad inställning*.
Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.

** Minsta sitsdjup 43 cm.*

HÖG RYGG

5
6
7
8

Standard ryggmekanism
Medic ryggmekanism**
Comfort ryggmekanism
Elreglerad ryggmekanism (EL)

Inställning av höjd, vinkel och djup.
Utökad djupledsjustering.
Gasfjäderreglerad inställning*.
Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.

*** Dubbel Hög Medic kan monteras.*

** Minsta sitsdjup 43 cm.*

E

HJUL

0
2
3

Standard hjul, XL 100 mm
Extra lätttrullat hjul, SL 100 mm
Extra brett lätttrullat hjul, BXL 100 mm

För alla typer av underlag.
Hjul med smal hjulbana för hårt underlag.
XL-hjul med bred hjulbana. Fler alt. finns (125, 150 mm)

F

SITTHÖJD *

0
1

Standard sitthöjd
Låg sitthöjd

Samtliga intervall går att justera +6cm/-2cm.

Manuell 40 - 60 cm. Elektrisk 43 - 71 cm.
Manuell 32 - 46 cm. Elektrisk 36 - 56 cm.

G

SITS

(bredd x djup)

Tillhörande ryggar (bxh):

Armstöd:

5
6
7
8

Barn (7-12 år) 36 x 39 cm
Barn (5-7 år) 33 x 35 cm
Junior (13-16 år) 36 x 43 cm
Mini (3-5 år)* 29 x 32 cm

Låg 30x26 cm, hög 30x34 cm. 30 cm.
Låg 27x22 cm, hög 27x32 cm. 25 cm.
Låg 30x26 cm, hög 30x34 cm. 30 cm.
Låg 23x20 cm, hög 27x23 cm. 25 cm.

** PLUS-stativ barn "mini" 43x48 cm (brxdj)*

H

ANVÄNDARENS VIKT

0
1
3

55 - 75 kg
< 55 kg
0 - 75 kg

Manuell lyftomat
Manuell lyftomat
EL lyftomat

Max brukarvikt 75 kg.

* Mätt utan sitstilt från golv till underkant sits, med sits i planläge.
Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt "allvinkelsittkryss" + 2 cm.