

Artikelnummer

800786 Amputationsstödsfäste Hö+Vä AS13 Amputations Mek H eller V
 AS10XX Amputationsstöd kudde 25x21
 800827 Amputationsstödsmechanism u fäste o stoppdetalj

XX färgkoder finns i prislisan och i utprovingsprotokollet.

Innehåll

1 st fäste för amputationsstöd
 2 st uppsättning erforderliga skruvar muttrar och brickor

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm
 Ringnyckel 13 mm

Utförande

Montera fästet för amputationsstöd (1) med två M8-skruvar genom hålen (2) på fästet och genom motsvarande hål på sittkrysets framsida. Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysets övre del (3). Om stolen ej är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysets nedre del (4). Lås med låsmutter. Brickor skall användas på båda sidor. Amputationsstödet (7) monteras i öppningarna (5) och låses med rattarna (6). Justera amputationsstödet i höjd och vinkel så att amputationsstödsudden ej kommer ovanför sittplattan och i en vinkel som ej ger sträckning i knäleden.

