

Armstödsplatta

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 803308

Ändrad: 1605

Giltig från: 0601

Artikel	Art.nr.
Armstöd platta ErgoMedic	AR10xxxx
Armstöd platta ErgoMedic Mini	AR11xxxx
Armstöd platta ErgoMedic f fällbart	AR1xxxx
Armstöd platta ErgoMedic Plus	AR20xxxx
Armstöd platta Mobil	AR30xxxx
Armstöd platta Mobil 9000 Borråd	AR31xxxx
Armstöd platta Hemiplegi 45x12cm	AR4060xx
Armstöd platta Comfort	AR50xxxx
Armstöd platta extra soft	AR51xxxx
K6S M6x25 Svartkromaterad Möbelskruv M6x25	802039

xx: avgör storlek(25-40cm) eller sida(ErgoMedic PLUS)

xx: avgör färg, färgkoder finns i prislisan och i utprovingsprotokollet.

Nödvändiga vertyg

T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)

800897

Instruktioner

För att montera på en ny armstödsplatta, skruva loss skruv på undersidan av armstödsplattan med Mercadonyckeln. Montera därefter på den nya armstödsplattan och drag åt skruv.

