

Artikelnummer

LS109001	Benstödsfäste Medic f B37 f sitsdjup >=48	LS109002	Benstödsfäste Medic f B37 f sitsdjup >=44
LS451310	Benstöd Medic PlusDelad Fotpl. B31xD22, Längd L 28-41cm, Par	LS119002	Benstödsfäste Medic f B25 f sitsdjup mindre än 48
LS15xxxx	Benstöd Medic delad fotplatta B37xD21, H eller V, Längd 18-24, 23-32, 28-41, 38-51 CM	LS16xxxx	Benstöd Medic Delad Fotpl Mini B25xD18, H eller V, Längd 18-24, 23-32, 28-41, 38-51 CM
KS11	Knästoppsmekanism Hö u kudde	KS12	Knästoppsmekanism Vä u kudde
KS111038	Knästopp H komplett 16x8 Konstläder Svart	KS121038	Knästopp V komplett 16x8 Konstläder Svart
KS1038	Knästopp kudde 16x8 Konstläder Svart		

xxxx: 2 första(11-14) avgör Längd, 2 sista(10-12) avgör Hö, Vä, Par

Innehåll

1 st benstödsfäste
1 st uppsättning erforderliga skruvar, muttrar och brickor/insatsmuttrar för trä

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 5 alt. 6 mm
Ringnyckel 13 mm
Stjärnmejsel
800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

Montera benstödsfästet (1) alt (7) med två M8-skruvar genom hålen (2) på fästet och genom motsvarande hål på sittkrysets (3) framsida. Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysets övre del (3). Om stolen ej är vinkelställbar monteras fästet i sittkryset (4).

Lås med låsmutter. Brickor skall användas på båda sidor.

Fäst benstödsfästet för stor sits (1) genom att:
mätta med benstödsfästet (1), markera hålbilden i sittplattan.

Borra 10 mm håll genom sittplattan.

Montera sedan i medföljande insatsmuttrar.

Skruva sedan fast benstödsfästet (1) genom att dra skruvar i hålen (5).

Medic-benstöden monteras sedan i öppningarna (6).

Ställ in vinkeln på fotplattan genom att justera skruven (9) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

Ring (8) måste lossas (OBS! två st skruvar) för att man skall kunna montera knästoppar.

