


# INSTRUCTIEBLAD REAL MOBIL 6100


## Voetplaat en beenpositie

De voetplaat kan zowel in hoogte als in hoek versteld worden. Om de voetplaat in hoogte te verstellen moet men met behulp van een 3mm inbussleutel schroef (1) losdraaien. Stel de voetplaat tot de juiste lengte in en draai daarna de schroef (1) weer aan. NB: Verzeker u ervan, dat de schroef verzonken is in één van de inkepingen van de voetplaatbuis. De hoek van de voetsteun is instelbaar door schroef (3) met behulp van een 5mm inbussleutel. Men verkleint de hoek door de schroef met de klok mee te draaien. Om de hoek te vergroten geldt de tegengestelde handeling. De beenpositie kan versteld worden in vier verschillende standen. Draai schroef (2) los met behulp van een 5mm inbussleutel. Stel de juiste hoek in en plaats de schroef (2) in het gat van keuze en draai deze vervolgens aan.

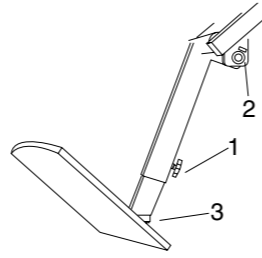

## Positie verstelling van de bedieningsunit

De bedieningsunit kan versteld worden in een diepte of in zijwaartse positie. Diepteverstelling: draai schroef (1) los met behulp van een 5mm inbussleutel. Verplaats de bedieningsunit in de gewenste positie (3 posities mogelijk) en breng de schroef weer aan. De bedieningsunit is ook zijwaarts naar binnen of aan de buitenkant van de armléuning te verplaatsen. De draagarm van de bedieningsunit is op twee punten verbonden. Hierdoor is de bedieningsunit zowel horizontaal als verticaal verstelbaar zonder gebruik van gereedschap. Plaats de bedieningsunit in de vereiste stand en deze vergrendelt zichzelf op deze positie. De bedieningsunit kan zowel aan de rechter armléuning als aan de linker armléuning bevestigd worden.


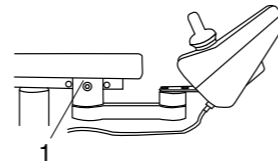



## Onderhoud & opladen

De rolstoel moet af en toe schoongemaakt worden. De bekleding kan gereinigd worden met behulp van een foam reinigingsmiddel. De zitting, rugleuning en andere gepolsterde delen zijn vanwege functionele doeleinden, niet gefabriceerd van waterdicht materiaal. Het is verstandig wanneer men de bekleding vervangt, tevens vanwege hygiënische redenen de schuimvulling te vervangen.

Het hoog/laag systeem moet dikwijls gecontroleerd worden op stof en vuil. Schakel de zitunit in de hoogste positie en reinig de kolom met een droge doek. Gebruik hierbij geen water of andere vloeistoffen. Als reiniging heeft plaatsgevonden smeer de kolom dan in met een dunne laag teflon of een vet op siliconen basis. Een vet gebaseerd op minerale oliën is kleverig en te dik en derhalve niet geschikt.

Als de rode signalering in de accucapaciteitsmeter (4) (zie illustratie bedieningsunit) is bereikt dan rijdt de rolstoel op reserve stroom. De accu's moeten worden opgeladen aangezien nog slechts 10% van totale capaciteit is overgebleven. Als men de rolstoel blijft gebruiken zal de rode signalering gaan knipperen, ten teken dat opladen noodzakelijk is. Laadt de accu's tijdig op. Dit voorkomt schade aan de accu's. Zorg ervoor, dat de rolstoel tijdens het opladen is uitgeschakeld. Steek de laadplug(1) in het laadcontact (2) op de voorkant van de bedieningsunit. Plaats daarna de netsnoerstekker (3) in de wandcontactdoos. Het licht (4) brandt wanneer de accu's aan het laden zijn. Licht (4) brand met een gele gloed als de accu's aan het laden zijn. Wanneer licht (4) stopt met branden zijn de accu's geladen tot 90% van zijn capaciteit en kunnen gebruikt worden. Maar voor de beste levensduur van uw accu's moet u wachten tot licht (5) brandt.

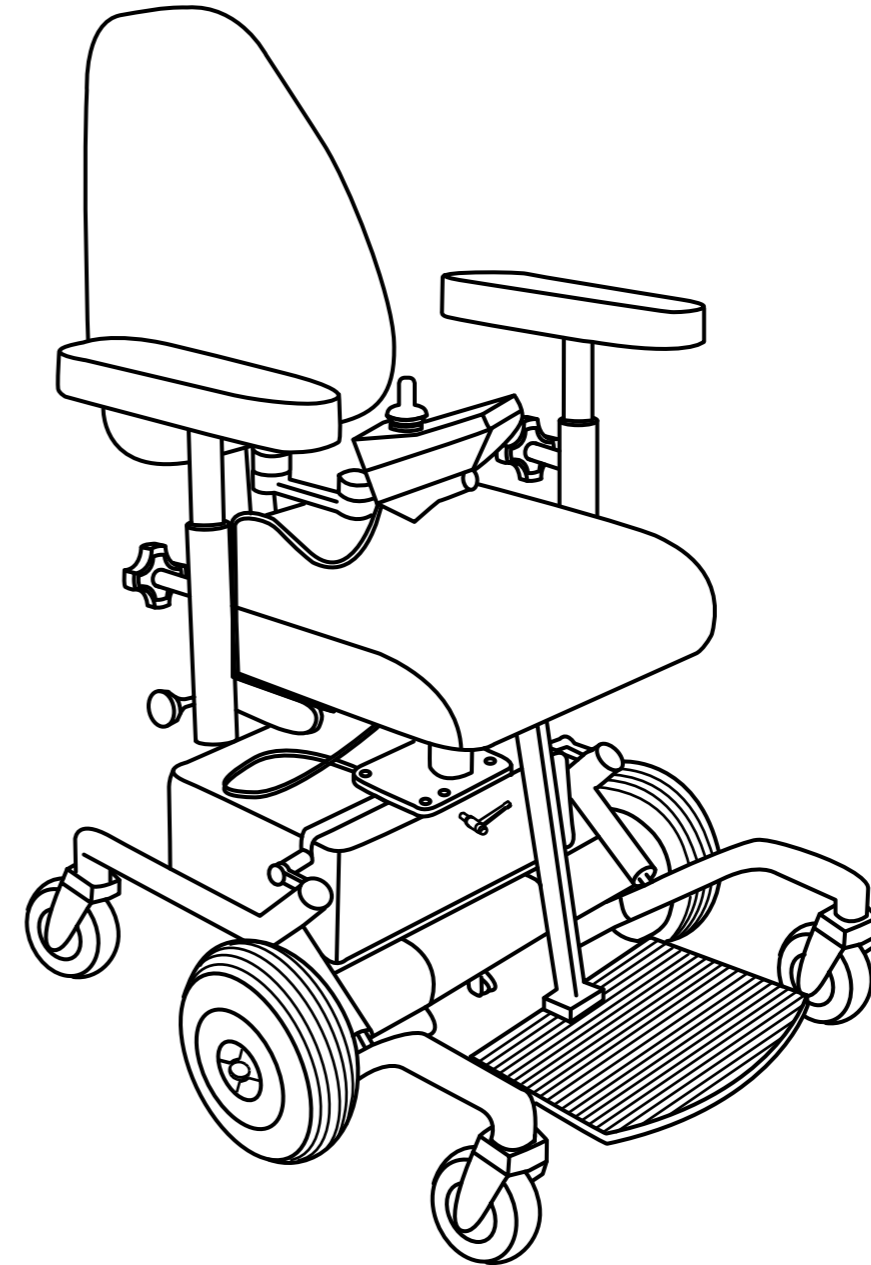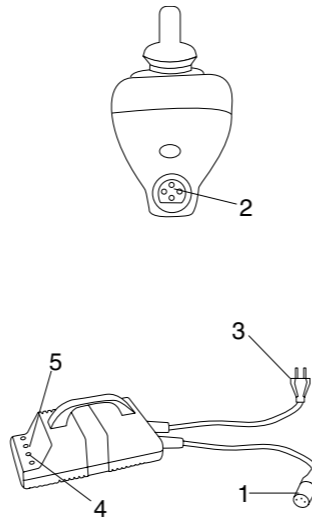

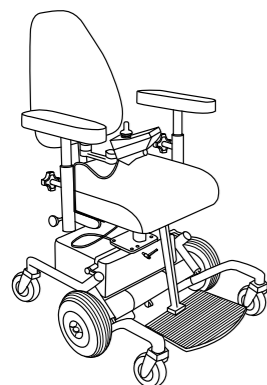


De REAL stoel combineert uitwisselbare componenten, accessoires en functies, met instellingen voor uw individuele behoeften. De stoel mag alleen gebruikt worden door de persoon en met het doel, waarvoor deze is bedoeld. De rolstoel is ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet blootgesteld worden aan water, chemicaliën of andere vloeistoffen. Tevens mag de rolstoel niet blootgesteld worden aan hoge temperaturen en langdurig zonlicht of straling. Het is niet toegestaan de rolstoel te voorzien van andere accessoires of componenten dan zijn goedgekeurd door Mercado Medic AB. Reparaties en andere technische aanpassingen mogen alleen verricht worden door personen, die gemachtigd zijn door Mercado Medic AB. Lees voor gebruik eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing door.

### BELANGRIJK !

De REAL 6100 behoort tot klasse A en is uitsluitend bestemd voor gebruik in huis.  
 Max. gebruikersgewicht: 130 kg.  
 De REAL 6100 is getest en goedgekeurd volgens de EMC-Richtlijn.  
 Mobiele telefoons hebben geen invloed op de rijeigenschappen van de REAL 6100.  
 De REAL 6100 kan elektromagnetische velden zoals een alarmsysteem beïnvloeden.


### Rugkussen

Er zijn drie verschillende typen rugmechanieken: "Basis" (standaard), "Medic" en "Comfort". Het rugkussen is verkrijgbaar in zowel een laag als hoog ontwerp. Ieder rugmechaniek heeft een individuele instelmogelijkheid voor de hoogte (1) en hoek (2). Draai de knop los om de gewenste hoogte of hoek in te stellen en draai deze vervolgens weer aan. Het Comfort mechaniek uitgevoerd met een gasveer verstelt men d.m.v. handel (2) vooruit te duwen. De zitdiepte is bij het "Medic" type verstelbaar m.b.v. knop (3). Bij een hoog rugkussen kan de hoek van het rugkussen zelf d.m.v knop (4) ingesteld worden.

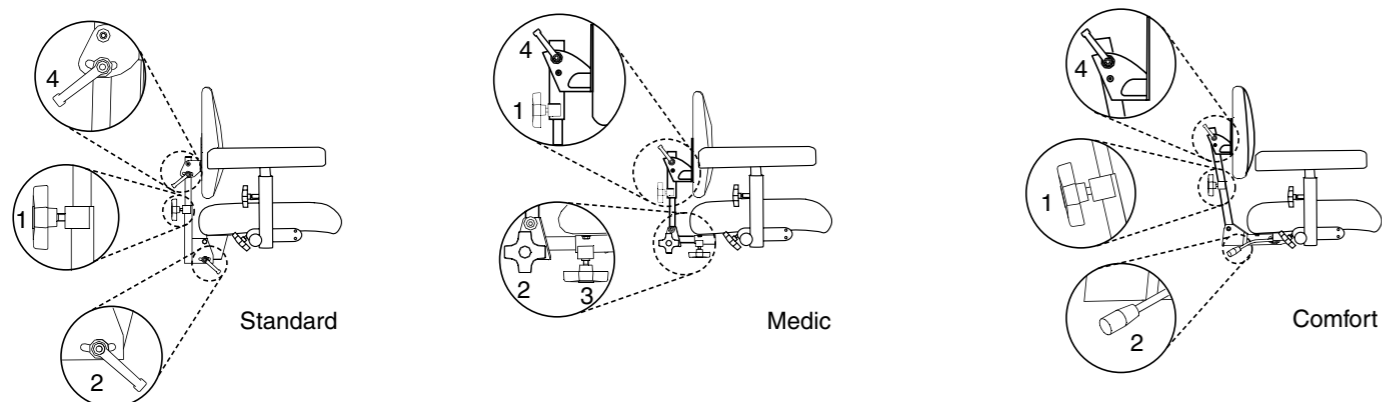


### ArMLEUNINGEN

De arMLEUNINGEN kunnen veresteld worden in hoogte en breedte en zijn achterwaarts wegklapbaar. De hoogteverstelling geschiedt door middel van knop (1). Draai de sterknop (1) los om de arMLEUNING te laten zakken. Omhoog; Draai de sterknop (1) los en trek de arMLEUNING op tot de gewenste hoogte en vergrendel dan de sterknop (1) weer op deze positie. De breedteverstelling van de arMLEUNING geschiedt d.m.v. sterknop (2) los te draaien, en de arMLEUNING in te stellen. Draai daarna sterknop (2) weer aan. Door trekknop (3) uit te trekken kan men de arMLEUNING achterwaarts wegklappen. Als de arMLEUNING weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke stand vergrendelt de arMLEUNING automatisch. Het is mogelijk deze automatische vergrendeling op te heffen door trekknop (3) een kwartslag te draaien.

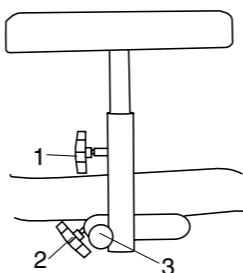


### Zithoek

Er zijn drie alternatieven om de zithoek te verstellen; manueel, gasveer of draaispindel. De bedieningshandel voor de gasveerverstelling is links achter onder de zitting (1) gesitueerd of kan ook onder de arMLEUNING geplaatst worden. De gasveer wordt geactiveerd door op de handel te drukken. Met behulp van de draaispindel (3) kan de hoek ingesteld worden. Voor een ruimere instelling kan men met behulp van moeren (4) de hoek veranderen.

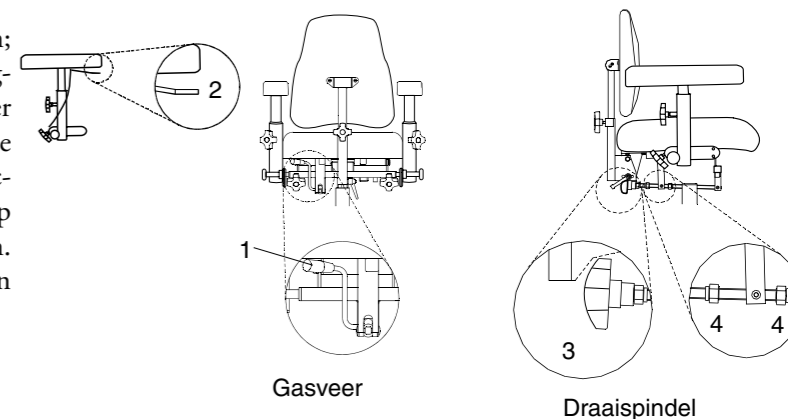

### Remontgrendeling

Ontgrendeling van het remsysteem maakt verplaatsbaarheid van de rolstoel met de hand mogelijk. Draai de ontgrendelplaat (1) van beide aandrijfwielen een kwartslag tegen de klok in los, om de rem te ontgrendelen. Indien dit wordt bemoeilijkt beweeg dan de rolstoel een beetje voorwaarts of achterwaarts. Vergrendeling van het remsysteem geschiedt door de vergrendelplaat (1) van beide aandrijfwielen een kwartslag met de klok mee te draaien. Duw de rolstoel voorzichtig naar voren totdat een hoorbaar "klikgeluid" heeft plaatsgevonden. Onder geen beding de hoofdschakelaar gebruiken om het remsysteem te vergrendelen. Het remsysteem mag nooit met behulp van de motor worden vergrendeld. De stoel mag nooit vervoerd worden met de remmen in een ontgrendelde toestand.

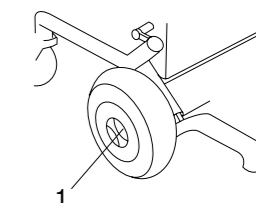

### Bedieningspaneel, bediening


Bediening Rijden:

Zet de hoofdschakelaar op aan (1). Controleer het accupeil (4). Het accupeil mag niet tot de rode markering zijn gedaald (zie "opladen").

Rijden: controleer of functiedisplay (3) de cijfers 2 (normale snelheid) of 1 (lage snelheid) toont. Zo niet, druk dan op functieknop (2) totdat een van deze cijfers verschijnt. Beweeg joystick (5) recht vooruit voor vooruitrijden en schuin naar voren (naar links of naar rechts) om een bocht te maken. De stoel kan ronddraaien door joystick (5) recht naar links of rechts te bewegen. Trek joystick (5) naar achteren om achteruit te rijden.

Bediening ziteenheid:

Voor het verhogen/verlagen van de ziteenheid ofwel het elektrisch kantelen van de zitting/rugleuning of de beensteunen (optie). Druk op keuzeknop (6). De elektrische functies die op de stoel gemonteerd zitten branden op keuzedisplay (7), de elektrische functie die actief is knippert. Beweeg de joystick naar rechts/links om tussen de symbolen in het keuzedisplay te wisselen en naar voren/achteren om de diverse keuzes te sturen. (Symbool stuurt het verhogen/verlagen van de stoel, (Symbool ) het kantelen van de zitting, (Symbool ) het kantelen van de rugleuning en (Symbool ) (Symbool ) het kantelen van de linker/rechter beensteun. De twee verstelbare beensteunen kunnen gelijktijdig worden bediend wanneer (Symbool ) en (Symbool ) voor de linker/rechter beensteun gelijktijdig knipperen. Als de elektrische functie van de stoel gedurende vijf minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen. Druk op hoofdschakelaar (1) om de elektronica op te starten of verplaats joystick (5). Het tijdsinterval voor automatisch uitschakelen is instelbaar. Claxon: druk op knop (8).

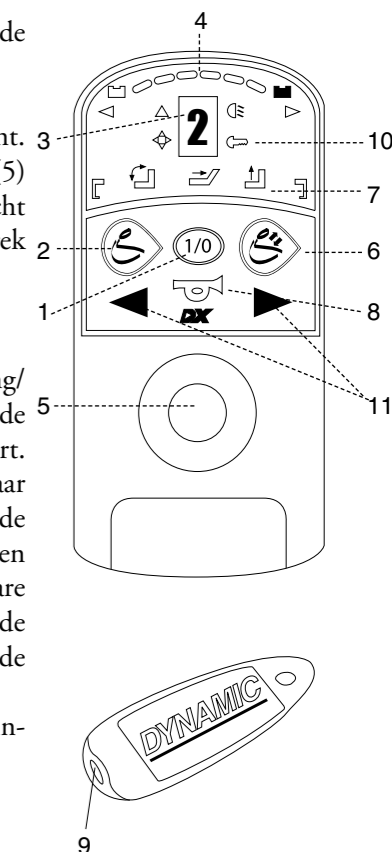

Vergrendelfunctie: om de elektronica te vergrendelen gebruikt u de magneetsleutel (9). De elektronica moet bij vergrendelen/ontgrendelen zijn ingeschakeld met hoofdschakelaar (1). Magneetsleutel (9) wordt voor vergrendelen/ontgrendelen naar het sleutelsymbool gehouden (10). Bij vergrendelen dooft het bedieningspaneel volledig en het sleutelsymbool knippert rood. Om te ontgrendelen moet hoofdschakelaar (1) op aan worden gezet. Als de stoel vergrendeld is (en ingeschakeld), knippert de rode lamp in sleutelsymbool (10). Herhaal de procedure met magneetsleutel (9).

De knoppen (11) zijn niet voor enige functie geprogrammeerd.