



KOPPLINGSGUIDE 24V 1G REAL 9000 PLUS EL



Innehållsförteckning


Styralternativ.	2
Elsystem 24V 1G.	3
Monteringsanvisning sitstilt.	4
Monteringsanvisning ryggtilt.	5
Monteringsanvisning elbroms.	6
Monteringsanvisning reglage.	7

Funktioner *Kopplingsdosa*

1. Styrning för ställdon upp/ned
2. Styrning för sitstilt
3. Styrning för ryggtilt
4. Styrning för elbroms
5. Koppling till *Elssystem kontakt B*

Reglage under armstöd

kopplas till Kopplingsdosa (kontakt 5)

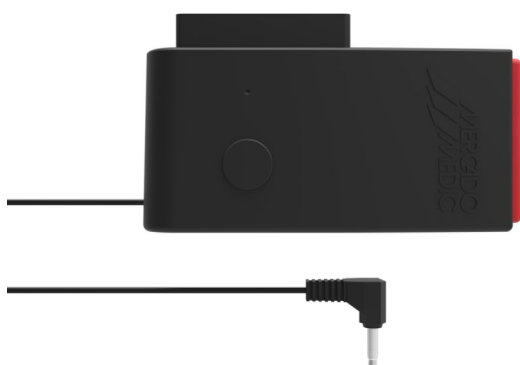

Kopplingsdosa



Handkontroll

*Alternativ till Kopplingsdosa
kopplas direkt till Elsystem (kontakt B)*



Funktioner *Elsystem*

1. Ställdon upp/ned, strömbegränsning 15 A
 2. Eldon sitstilt, strömbegränsning 8 A
 3. Eldon ryggtilt, strömbegränsning 8 A
 4. Eldon broms, strömbegränsning 8 A
- A. Laddjack
B. Input för styrning


Färgmarkerade kontakter

Kontakterna för funktionerna 1-4 har färgade o-ringar som sitter i sista skåran, räknat från kontaktstiftet.

Funktionerna märks enligt följande färger:

- ① **Sitthöjd**, vit märkning
- ② **Sitstilt**, gul märkning
- ③ **Ryggvinkling**, lila märkning
- ④ **Broms**, röd märkning

Elsystem

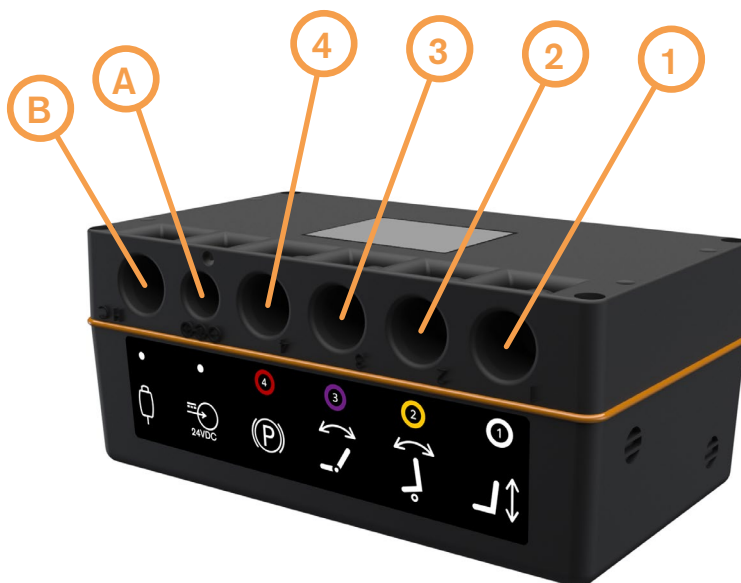

Kontakt


kopplas till Elsystem



Utförande

1. För att demontera den tidigare sitstiltmekanismen, drag ur låsnålarna (A). Drag därefter ur de cylindriska låsbultarna (B). Avsluta med att lyfta ur den tidigare mekanismen.
2. Placera sedan dit den nya sitstiltmekanismen, där den tidigare suttit.
3. Tryck igenom de cylindriska låsbultarna (B) så att SAR44 fixeras. Tryck sedan ned låsnålarna (A) i respektive hål i de cylindriska låsbultarna (B).
4. Koppla in kontakten i uttag ② i elsystemet.

OBS! Vid montering av elektrisk sitstilt skall donet monteras i det främre hålet (C) i den bakre infästningen.

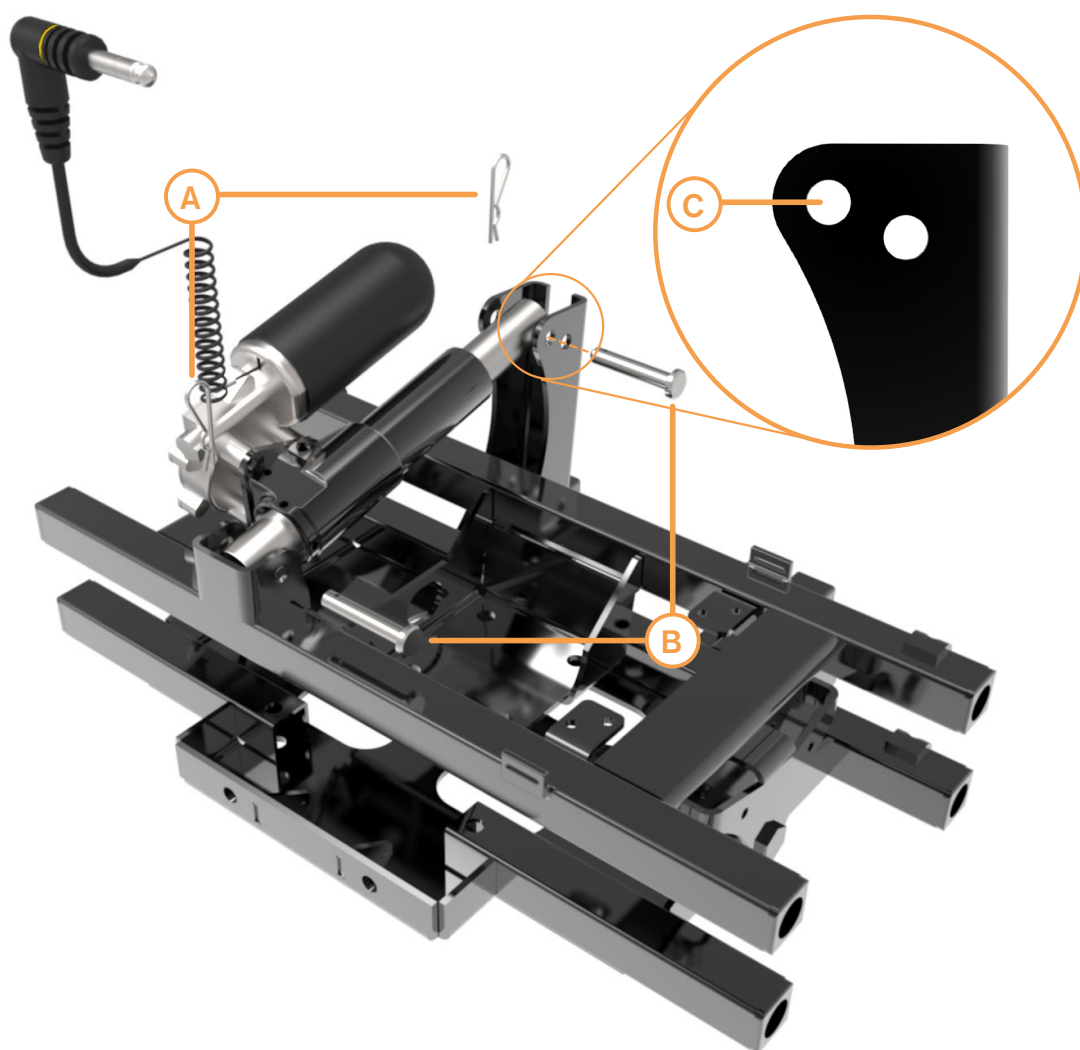


Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel

Utförande

1. För att montera ryggmekanismen, skruva fast de fyra skruvarna (A) i stolens sittplatta enligt bilden nedan. För att sedan montera fast ryggplattan på mekanismen, se vår monteringsanvisning för Ryggplatta.
2. Ryggmekanismen går att ställa in i åtta olika fasta lägen, varje läge erhåller ett vinkelslag av 35°. Ryggvinklingens intervall justeras med skruv (B). Montera skruv i det främre hålet för justera ryggens intervall längre fram på sitsen. Det bakre hålet ger intervall längre bak på sitsen (större sittdjup). Ryggfällningens djup kan regleras steglöst 45 mm med skruv (C). Skruva upp den och för fästet till önskat läge. Drag åt skruv (C).
3. Koppla in kontakten i uttag ③ i elsystemet.

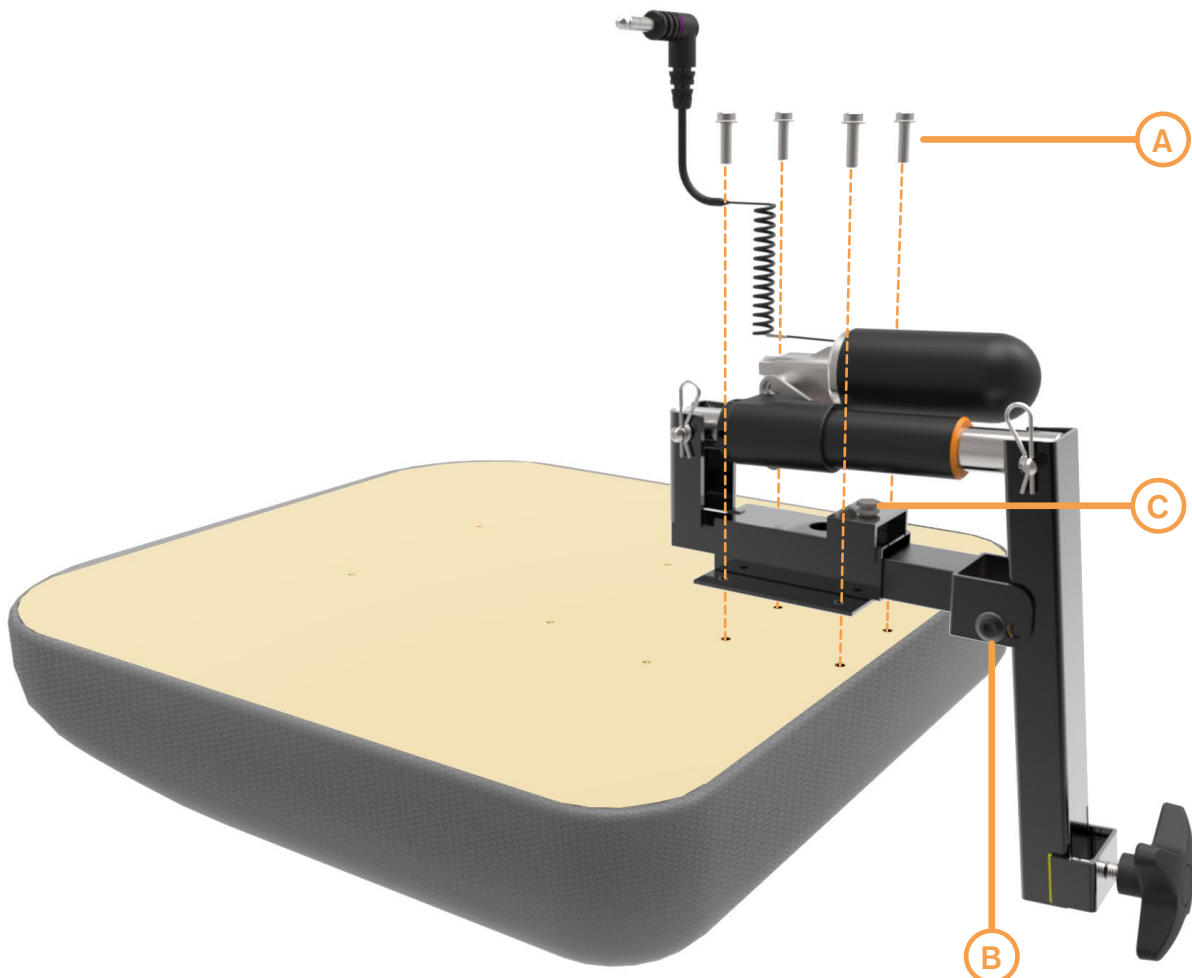


Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel

6 mm insexnyckel

Utförande

1. Demontera överfallet (A) från axelfästet genom att lossa på de fyra M6-skruvarna.
2. Centrumfästet (B) monteras på stativet i höjd med spår enligt streckad linje på bild. Drag åt den bakre M8-skruven (C). Se till att centralfästets två överfall lämnar ett spelrum på ca 1 mm till eldonets fäste. Drag sedan åt de främre M8-skruvarna (D) med handkraft.
3. Se till att stolen är bromsad. Montera tillbaka överfallet (A) på axelfästet (E) så att det är fäst runt bromsaxeln. Applicera M6-skruvarna i fästet (E) utan att dra åt dem. Koppla in elen. Aktivera broms så att eldonet är i maximalt utläge.
4. Lås de två främre M8-skruvarna (D) i centrumfästet, de två plåtarna ska sitta ihop. Lås därefter de fyra M6-skruvarna på axelfästet (E) hårt, med moment 9,8 Nm.
Kontrollera funktion på elbromsen
5. Koppla in kontakten i uttag ④ i elsystemet.


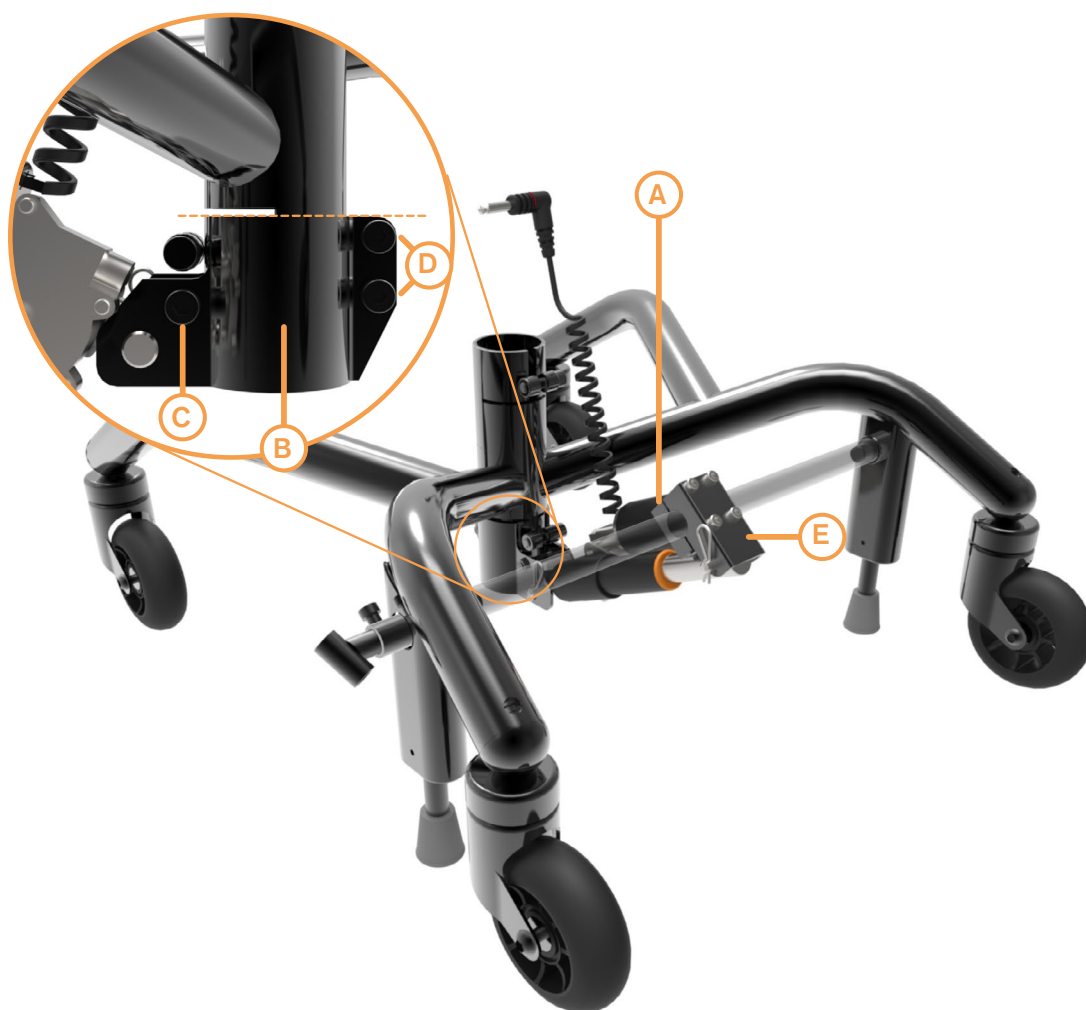


Nödvändiga verktyg

Torxnyckel
eller kryssmejsel

Utförande

Placera reglage(reglage under armstöd) eller reglagets fäste(handkontroll) så att reglaget hamnar strax innanför armstödsplattans framkant. Fäst med medföljande M5 skruv.

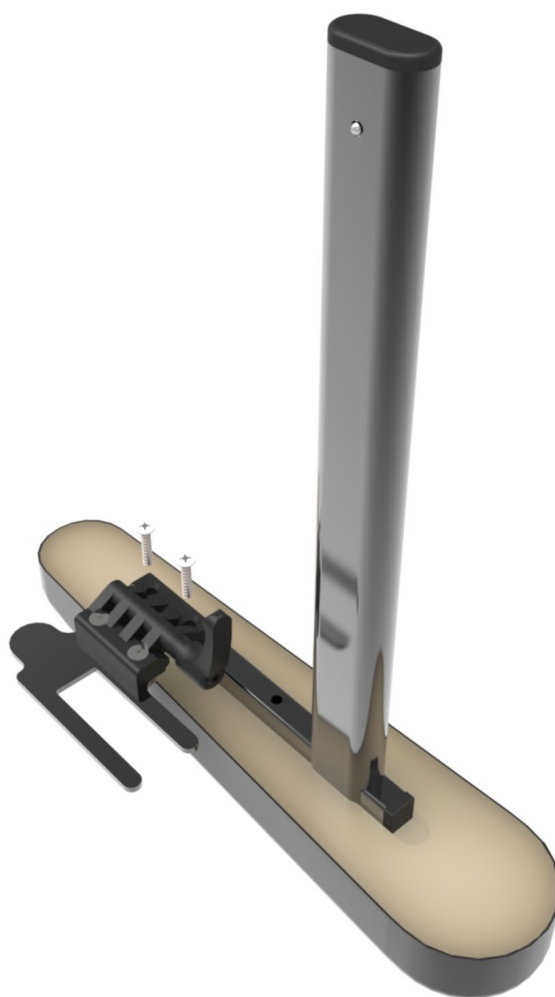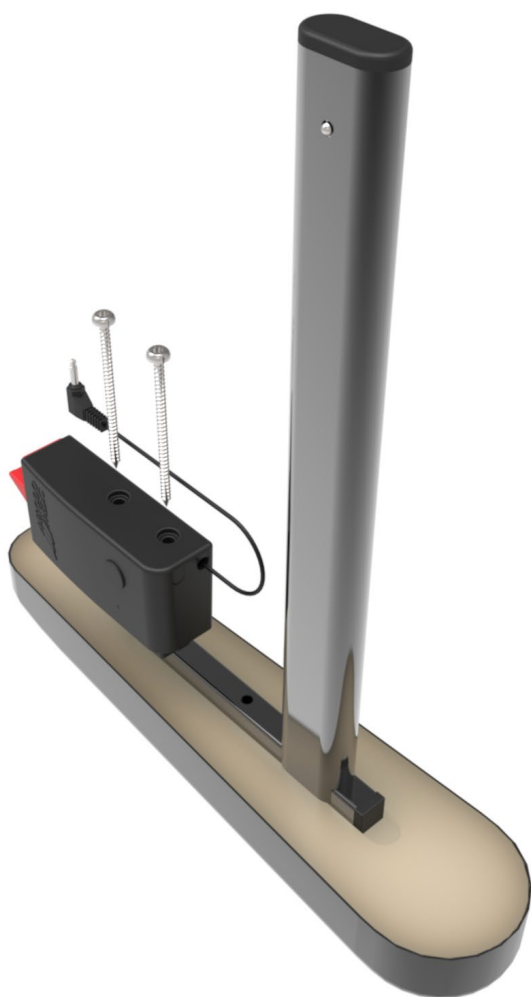

Kontakta Mercado

HUVUDKONTORET

Växeln är öppen mån-fre 08.00-16.30

Tel: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

E-post: info@mercado.se, order@mercado.se

Besöksadress:

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress:

Box 1074, 181 22 Lidingö

SERVICE OCH TEKNISK SUPPORT

Service har telefontid mån-fre

08.00-12.00 samt 13.00-16.00

Tel: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68

E-post: service@mercado.se

Postadress:

Box 1074, 181 22 Lidingö