

Artikelnummer

Ryggar

BR10XXXX	ErgoMedic
BR11XXXX	ErgoMedic Slow Recovery
BR12XXXX	ErgoMedic Slim
BR20XXXX	ErgoMedic Plus
BR21XXXX	ErgoMedic Plus Comfort
BR22XXXX	ErgoMedic Plus Slow Recovery
BR25XXXX	ErgoMedic Plus med Sidokil
BR26XXXX	ErgoMedic Plus Comfort med Sidokil
BR27XXXX	ErgoMedic Plus utan Bula
BR28XXXX	ErgoMedic Plus med Sidokil utan Bula
BR30XXXX	ErgoMedic för Bålstöd

BR31XXXX	ErgoMedic Slow Recovery för Bålstöd
BR35XXXX	ErgoMedic Plus med Förstärkt Sidokil
BR36XXXX	ErgoMedic Plus Comfort med Förstärkt Sidokil
BR50XXXX	Rygg TWIN

Magplattor

BR1090XX	Rygg/Magplatta Classic
BR1190XX	Rygg/Magplatta Classic Slow Recovery
BR40XXXX	Magplatta Medic
BR41XXXX	Magplatta med Dubbel Nos Slow Recovery

Nödvändiga verktyg

800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

För att montera på en ny rygg-/magplatta, skruva loss skruvarna (1) på baksidan av rygg-/magplattan (tre skruvar på hög ryggplatta respektive två skruvar på låg rygg-/magplatta) med Mercadonyckeln. Montera därefter på den nya rygg-/magplattan och skruva åt skruvarna igen.

Hög ryggplatta

Låg rygg-/magplatta

