

Bromspedal

f. PLUSstativ med omvänd broms, REAL 9000 PLUS

 Artikelnr: 802981
 Ändrad: 1506
 Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Bromspedal f PLUS 20mm bromsaxel	802865
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897

Instruktioner

Placera bromspedalen på valfri plats utmed bromsaxeln.

Montera de två överfallen(2) och de fyra skruvarna(1) löst.

Prova ut ett lämpligt läge på pedalen, så att bekväm manövrering erhålls. Se till att inga delar slår i.

Drag åt skruvarna hårt.

Se till att bromsspaken är demonterad alternativt sitter fast ordentligt vid användande av fotbroms.

OBS! Pedalen går endast att montera på "PLUSstativ med omvänd bromsfunktion".

