





LÄNGDKOMPENSERANDE ELBENSTÖD REAL 6100 PLUS

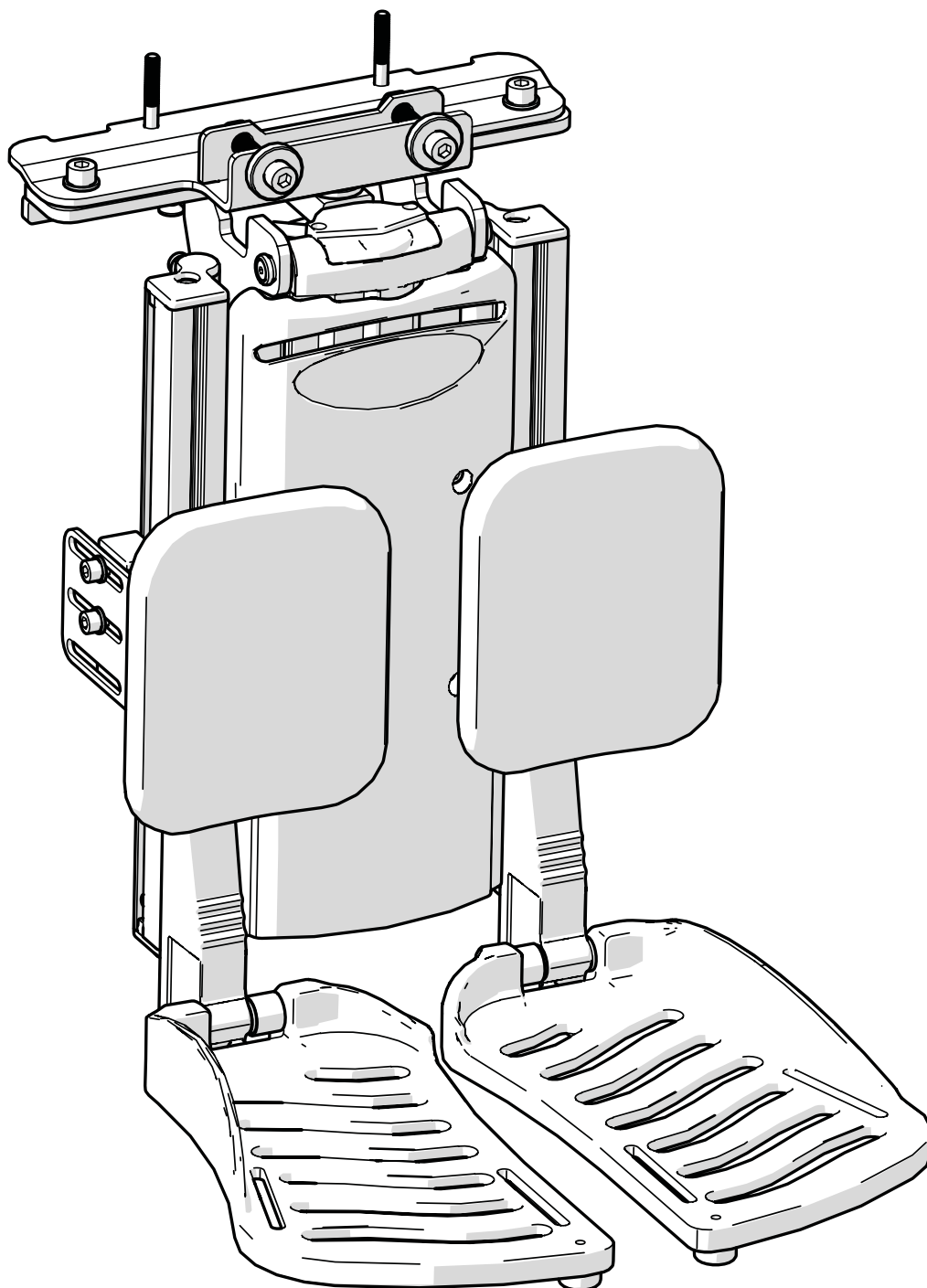

Innehållsförteckning

1. Artikellista	3
2. Varningar	4
3. Monteringsinstruktion	5
3.1. Montera fotplattorna	5
3.2. Montera vadväggstöden	6
3.3. Montera adapterplattan	7
3.4. Montera adapterplattan sitsdjup 48 och större	8
3.5. Montera benstödet	9
3.6. Montera benstödet sitsdjup 48 och större	10
3.7. Koppla in elektroniken	11
4. Skötselråd	12
5. Destruktion och återvinning	12

1. Artikellista

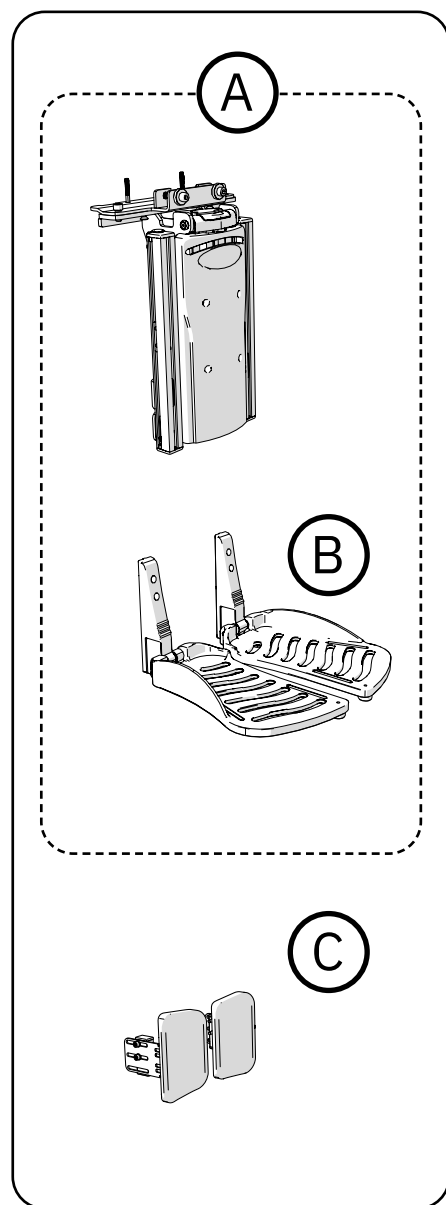


- A** LS311110 Benstöd El H+V Längdkompenserande
Inkl fotplatta 30cm exkl vadstöd
- LS311111 Benstöd El H+V Längdkompenserande
Inkl fotplatta 25cm exkl vadstöd
- LS311112 Benstöd El H+V Längdkompenserande
Inkl fotplatta 30cm exkl vadstöd
f sitsdjup 48 och större
- LS311113 Benstöd El H+V Längdkompenserande
Inkl fotplatta 25cm exkl vadstöd
f sitsdjup 48 och större
- B** 805093 Fotplatta Kort 25cm H+V f Längdkompenserande
Elbenstöd LS3111*
- 805094 Fotplatta Lång 30cm H+V f Längdkompenserande
Elbenstöd LS3111*
- C** CS501458 Vadstöd kpl H+V f Längdkompenserande
Elbenstöd LS3111* Neopren Svart

2. Varningar

**Varning!**


Klämrisk kan uppstå vid manövrering av stolsfunktioner. Var uppmärksam på följande klämrisker:

1. Klämrisk mellan benstöd och sittkryss
2. Klämrisk mellan benstöd och chassi
3. Klämrisk mellan benstöd och golv

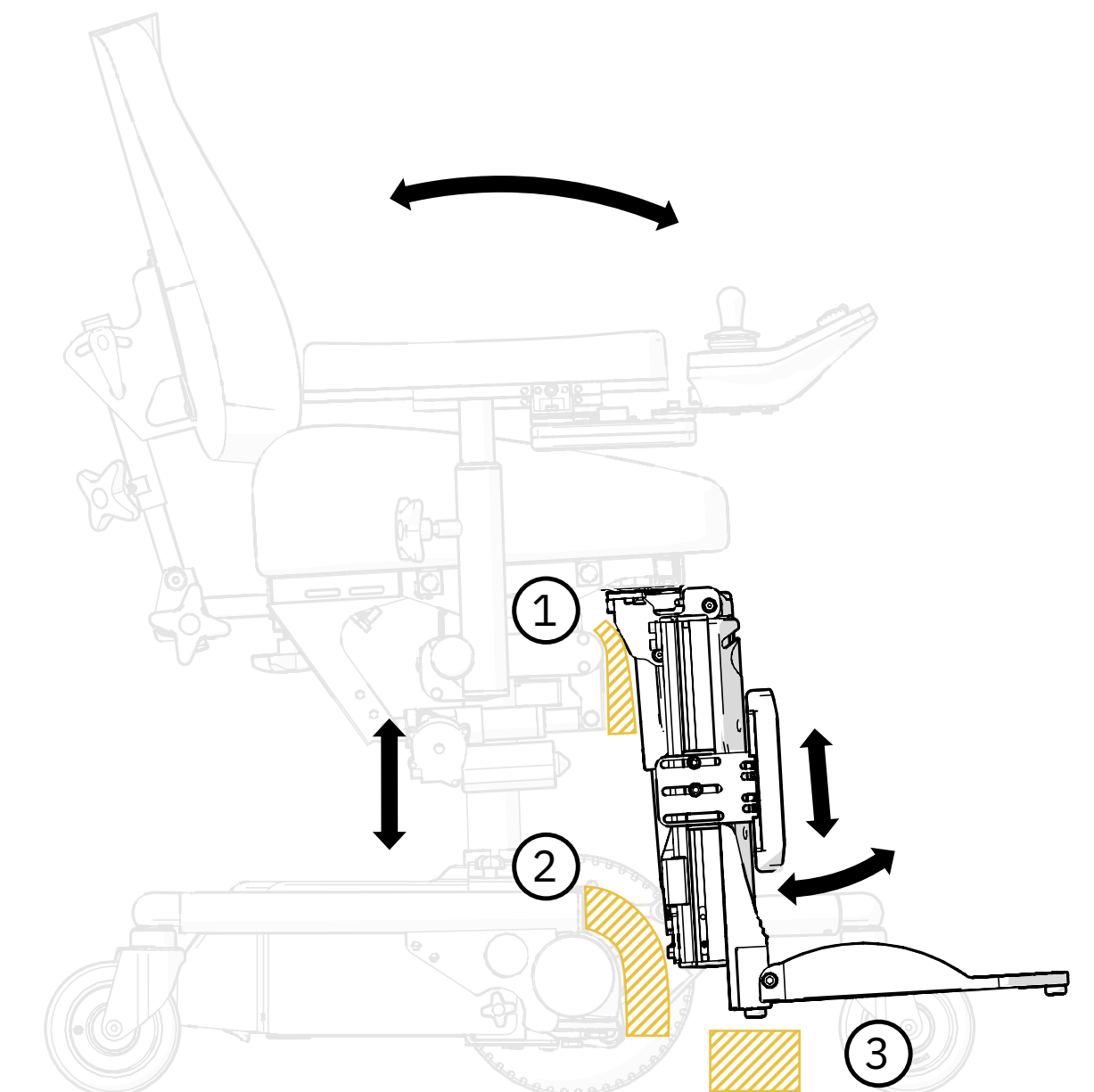


3. Monteringsinstruktion


3.1. Montera fotplattorna

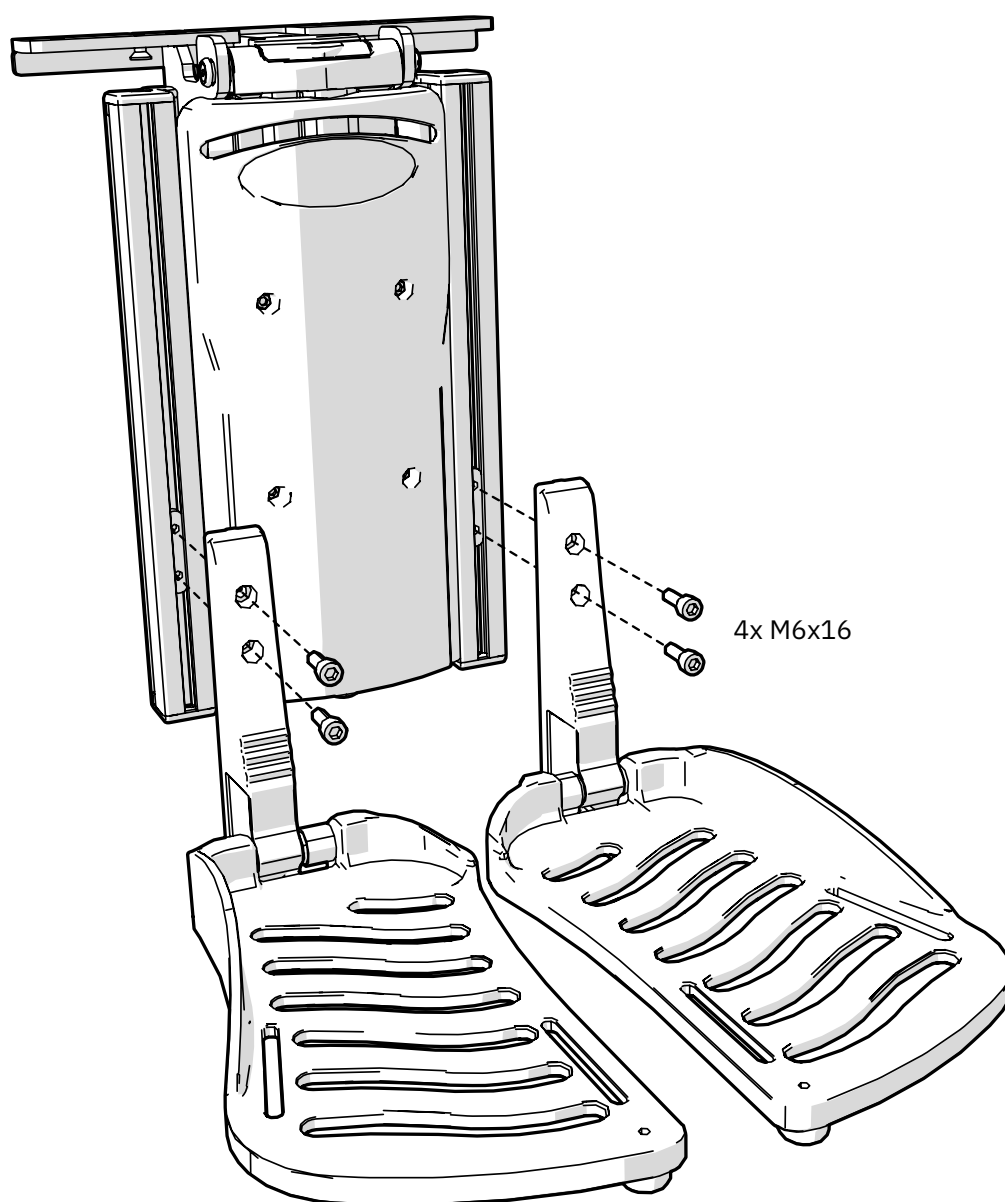


3.2. Montera vadstöden

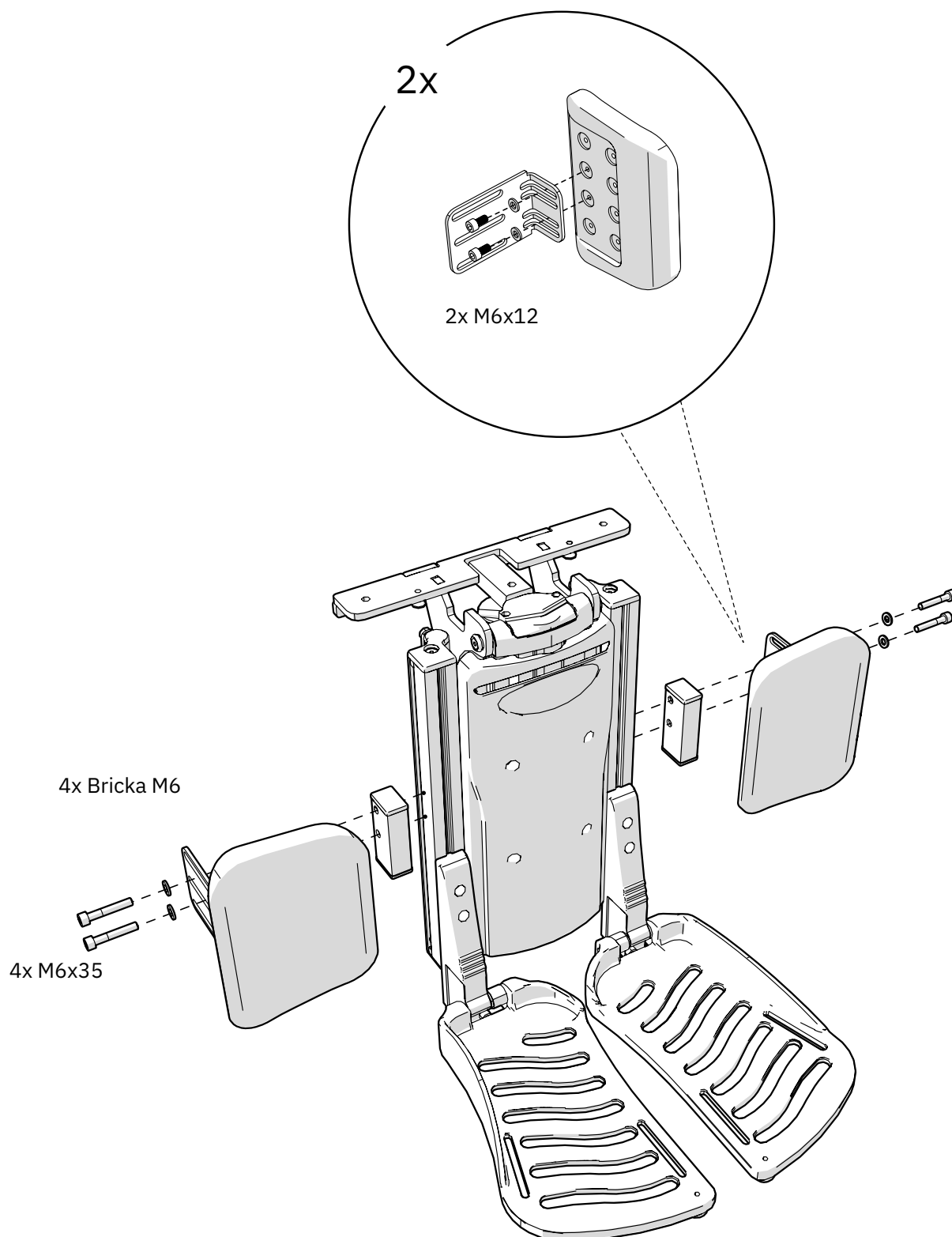


3.3. Montera adapterplattan

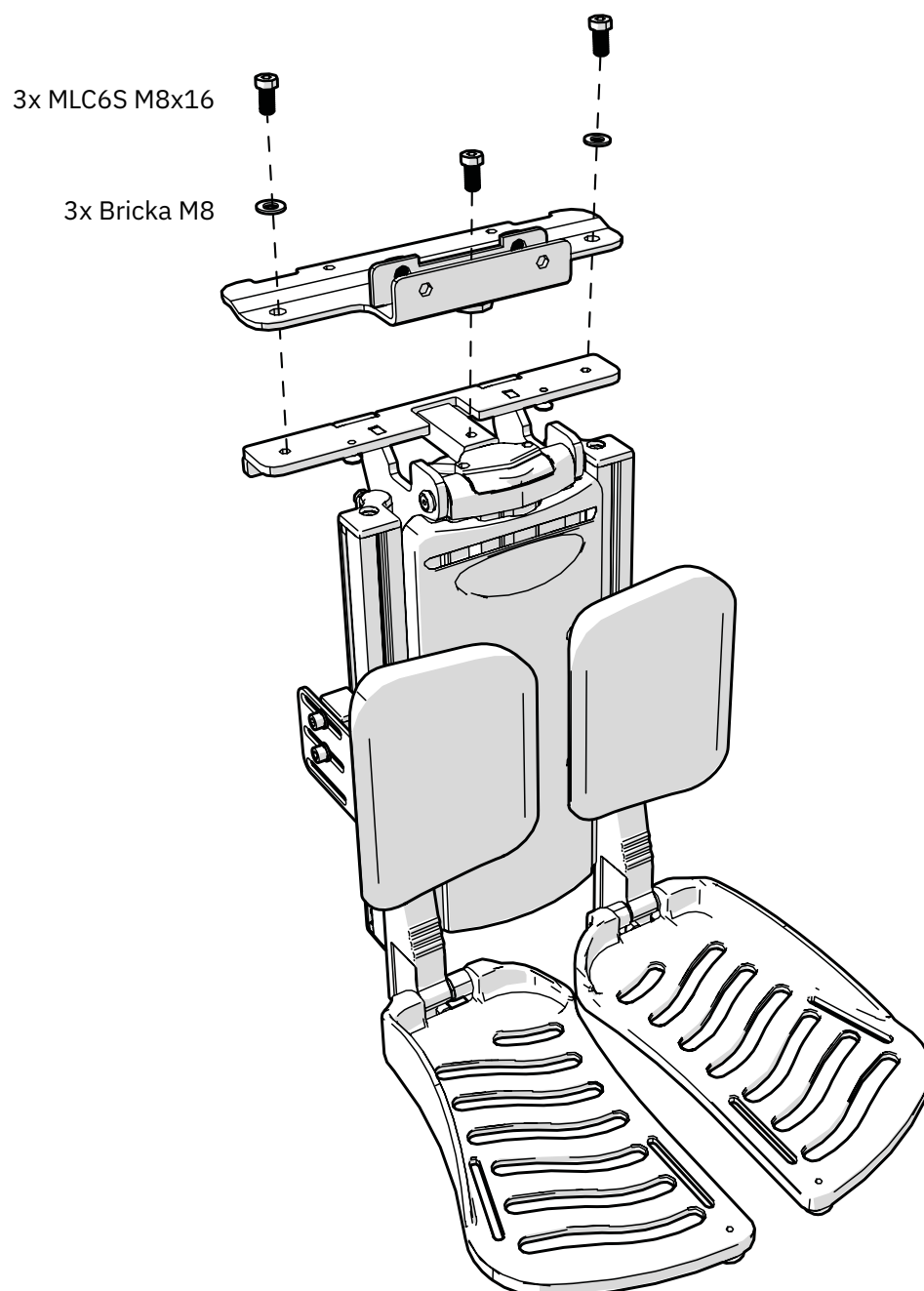

3.4. Montera adapterplattan sitsdjup 48 och större

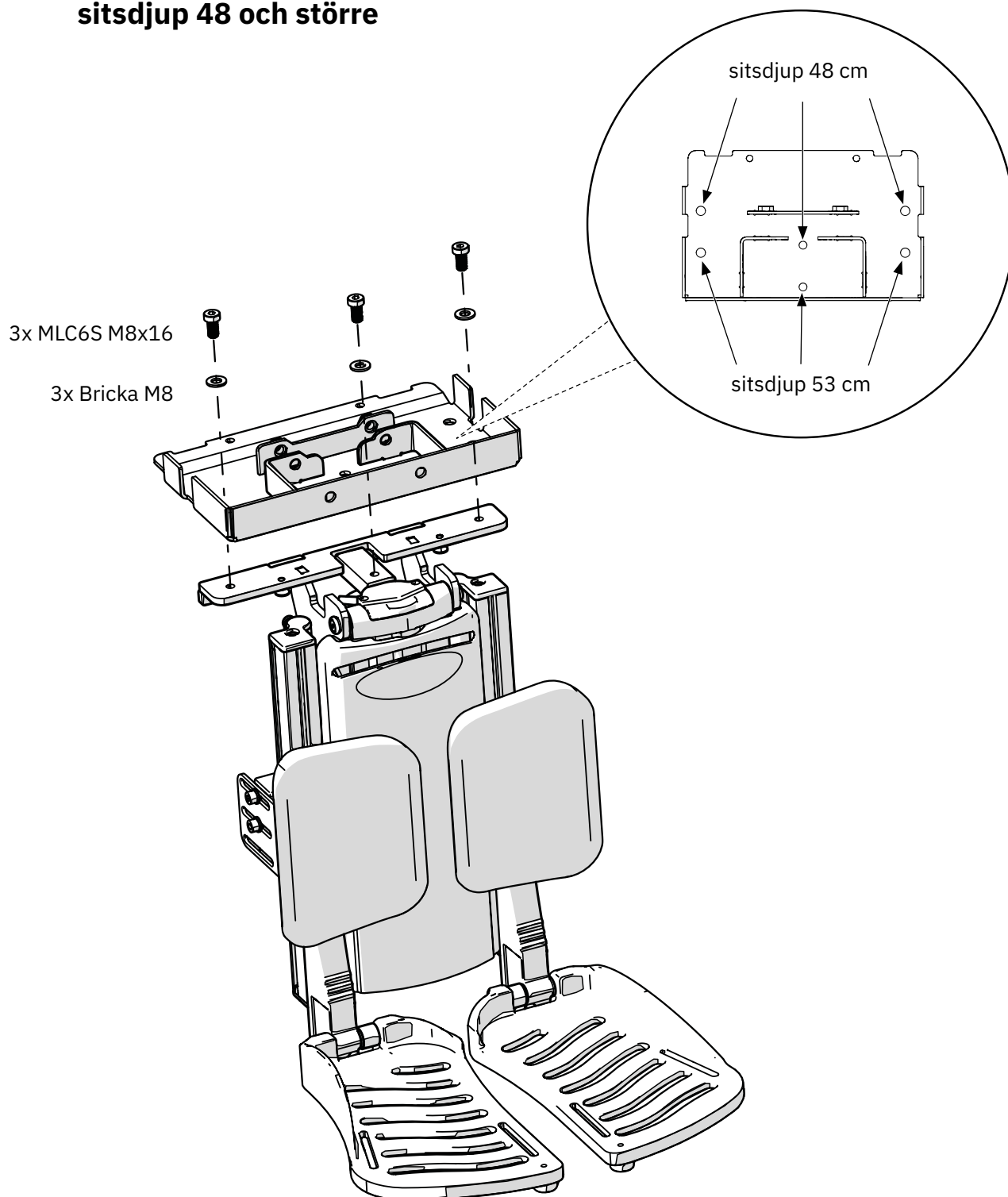


3.5. Montera benstödet

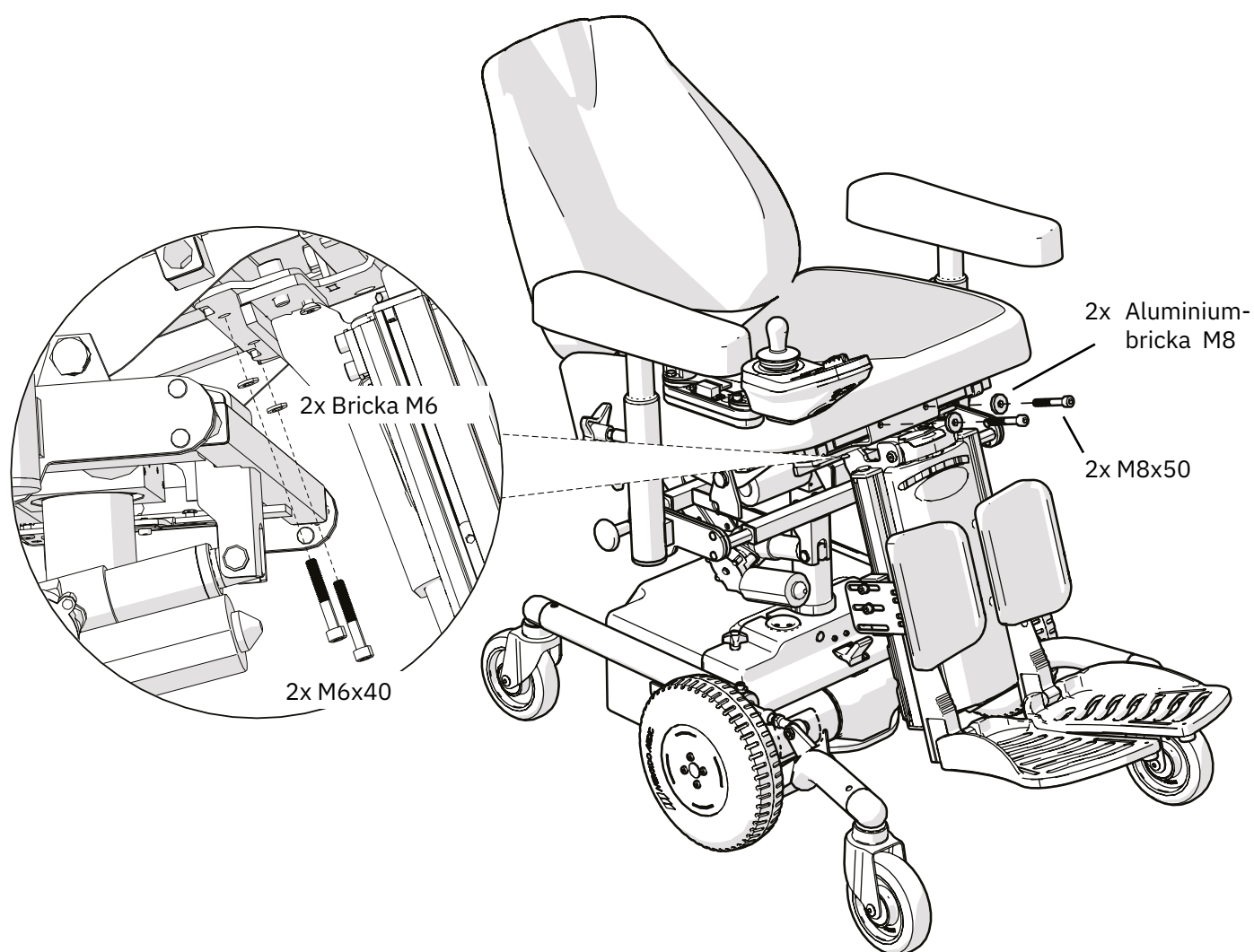


3.6. Montera benstödet sitsdjup 48 och större

1. Skruva loss sitsen, 4 st M6x40.
2. Montera benstödet med adaptern på sittkryset med M8x50 skruvarna. Dessa sitter inuti adaptern.
3. Återmontera sittplattan med M6x40 skruvarna. De två främre skall nu säkra benstödet.

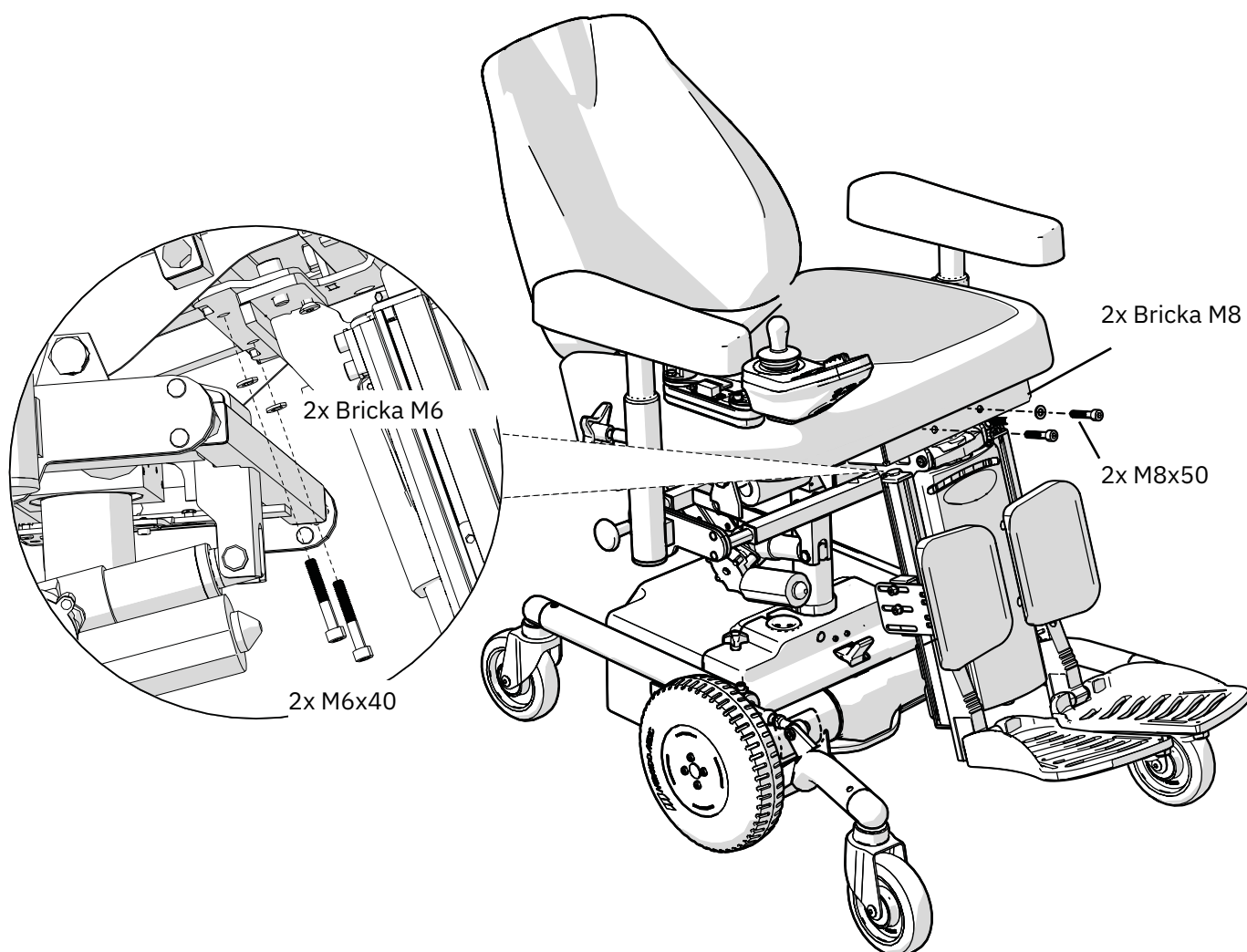

3.7. Koppla in elektroniken

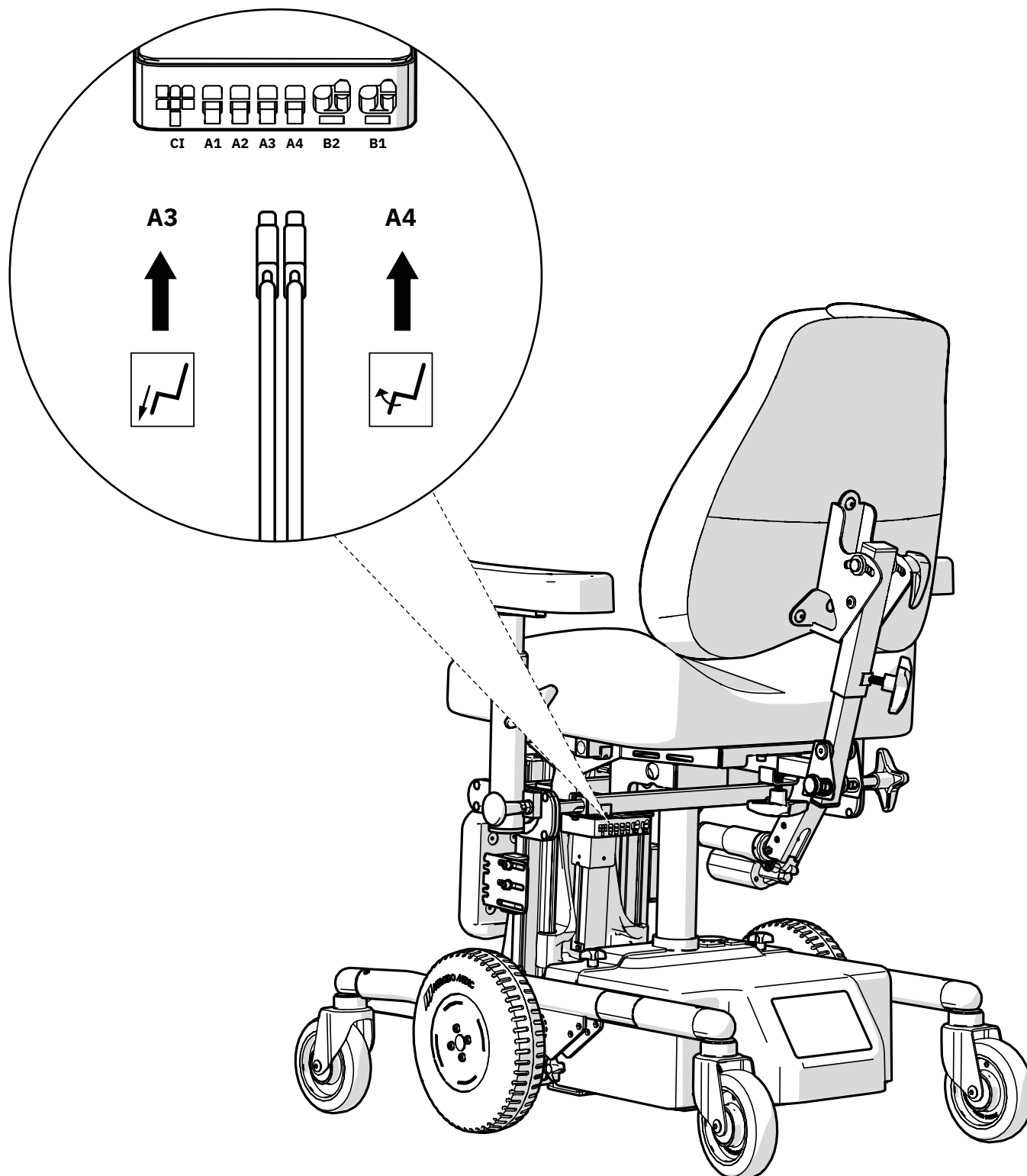

4. Skötselråd

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

5. Destruktion och återvinning

1. Sorteras som metall
2. Sorteras som elektronik
3. Sorteras som brännbart

