

Ryggtilt 24V 1G

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804667

Ändrad: 1611

Giltig från: 1601

Artikel

Eldonssats ryggfällning 24V 1G

Art.nr.

804499

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel

Utförande

För att montera ryggmekanismen, skruva fast de fyra skruvarna (A) i stolens sittplatta enligt bilden nedan. För att sedan montera fast ryggplattan på mekanismen, se vår monteringsanvisning för Ryggplatta. Ryggmekanismen går att ställa in i åtta olika fasta lägen, varje läge erhåller ett vinkelslag av 35°. Ryggvinklingens intervall justeras med skruv (B). Montera skruv i det främre hålet för justera ryggens intervall längre fram på sitsen. Det bakre hålet ger intervall längre bak på sitsen (större sittdjup). Ryggfällningens djup kan regleras steglöst 45 mm med skruv (C). Skruva upp den och för fästet till önskat läge. Drag åt skruv (C).

