

Sitstilt 24V 1G

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804666
Ändrad: 1810
Giltig från: 1601

Artikel

Eldonssats sitstilt 15/8 24V 1G
Eldonssats sitstilt 15/15 24V 1G

Art.nr.

804500
804636

Utförande

1. För att demontera den tidigare sitstiltmekanismen, drag ur låsnålnarna (A). Drag därefter ur de cylindriska låsbultarna (B). Avsluta med att lyfta ur den tidigare mekanismen.
2. Placera sedan dit den nya sitstiltmekanismen, där den tidigare suttit.
3. Tryck igenom de cylindriska låsbultarna (B) så att eldonet fixeras. Tryck sedan ned låsnålnarna (A) i respektive hål i de cylindriska låsbultarna (B).

