




SWE


# HANDKONTROLL 24V 1G REAL 9000 PLUS

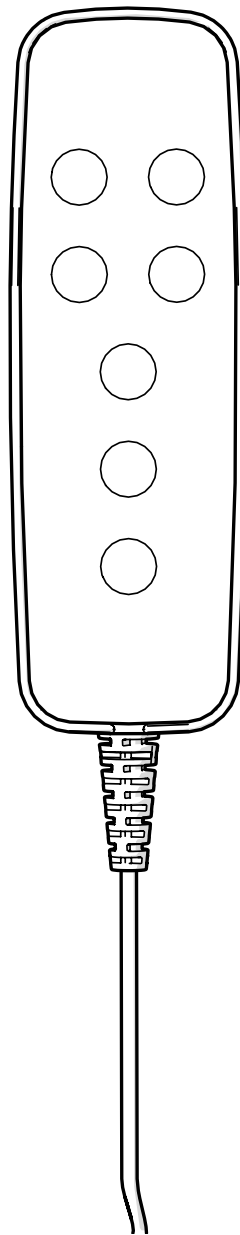

# Innehållsförteckning

1. Artikellista .....	3
2. Monteringsinstruktion .....	4
2.1. Montera fästet .....	4
2.2. Koppla in handkontrollen .....	5
2.3. Montera handkontrollen .....	5
2.4. Justera fästet .....	6
3. Skötselråd .....	7
4. Destruktion och återvinning .....	7


# 1. Artikellista

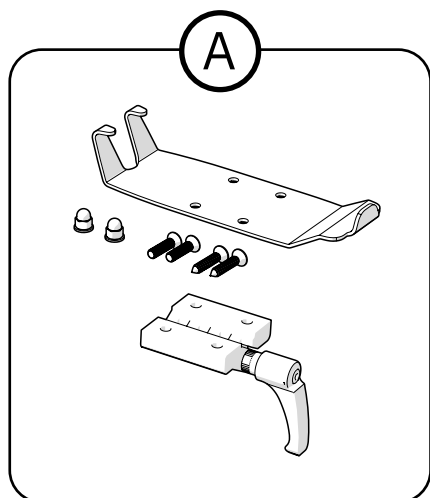

Ⓐ 804516 Fäste för Handkontroll 24V 1G

Ⓑ 804490 Handkontroll 4 funktion 24V 1G

804813 Handkontroll 1 funktion 24V 1G

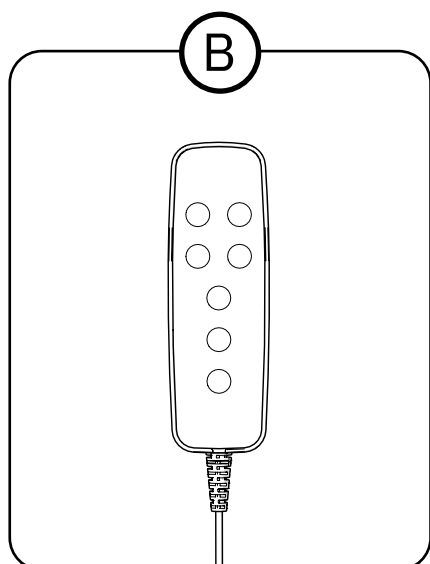





## 2. Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktionen visar hur handkontrollens fäste ska monteras på armstödet samt hur handkontrollen ska kopplas in.

### 2.1. Montera fästet

Fästet går att montera på antingen höger eller vänster armstöds kudde. På höger armstöds kudde ska fästet sitta på höger sida och vice versa. Vid behov går det att flytta gångjärnet till andra sidan av fästet.

Orientera fästet som önskat och skruva fast det mot undersidan av armstödsplattan.

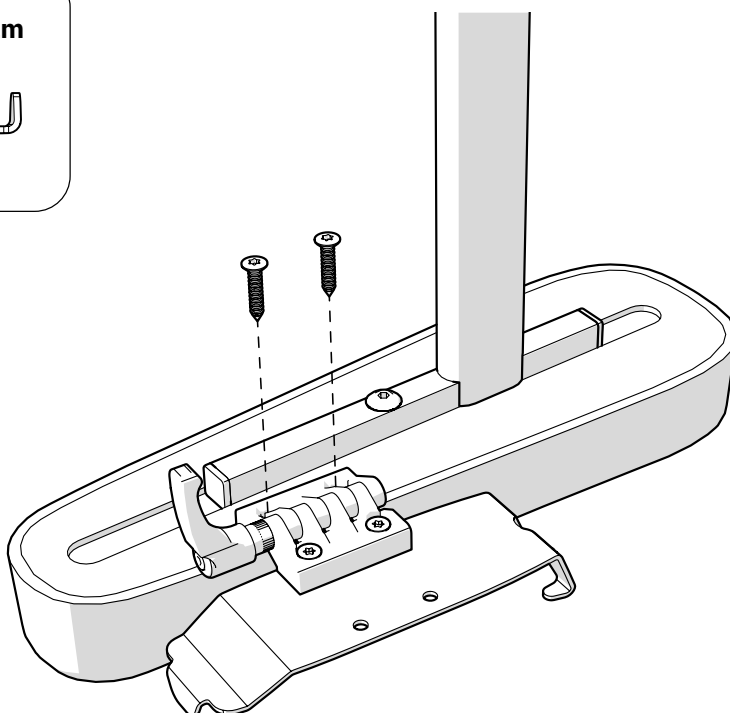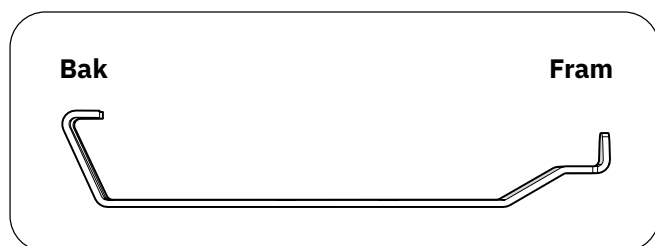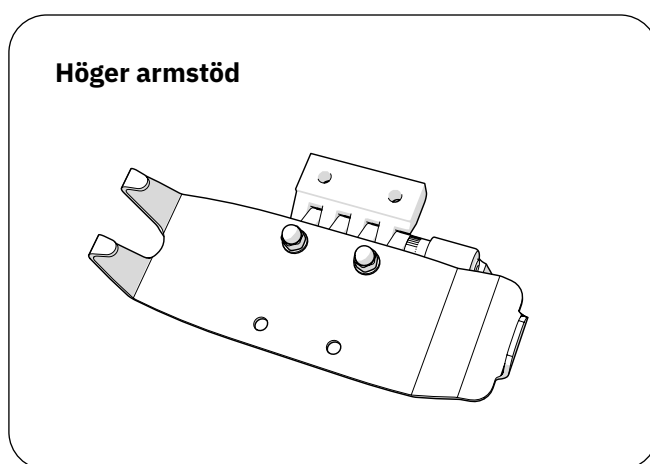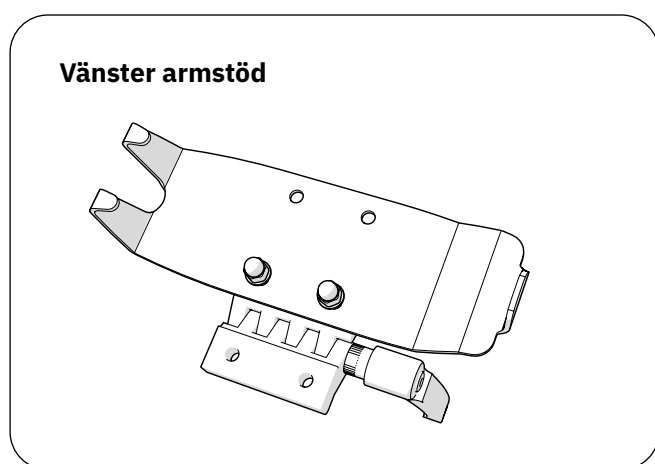


## 2.2. Koppla in handkontrollen

Koppla in handkontrollens kontakt i stolens elsystem. Rätt ingång på elsystemet är markerat med symbol för handkontroll. Tryck in kontakten hela vägen och testa att kontrollen fungerar.





Symbol för handkontroll

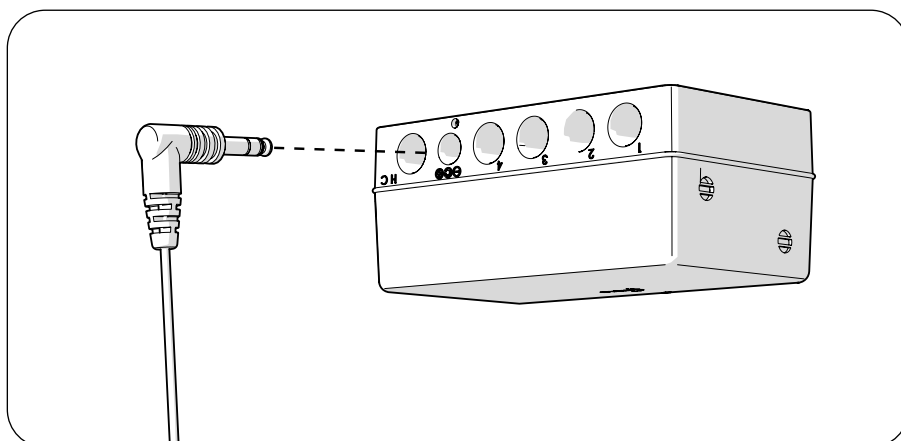


## 2.3. Montera handkontrollen

Placera handkontrollen i dess fäste enligt illustrationen nedan. Handkontrollen har en magnet i framkant som gör att den klickar på plats.

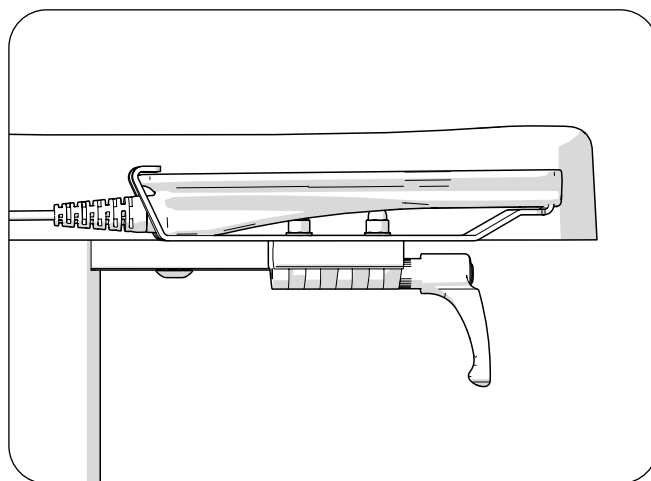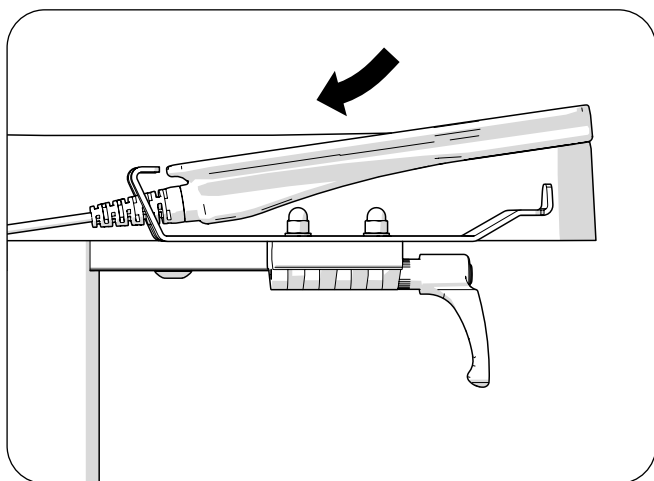

## 2.4. Justera fästet



Använd vredet för att låsa och frigöra vinkeljusteringen av fästet till handkontrollen. Vredet trycks först in och går sen att justera.

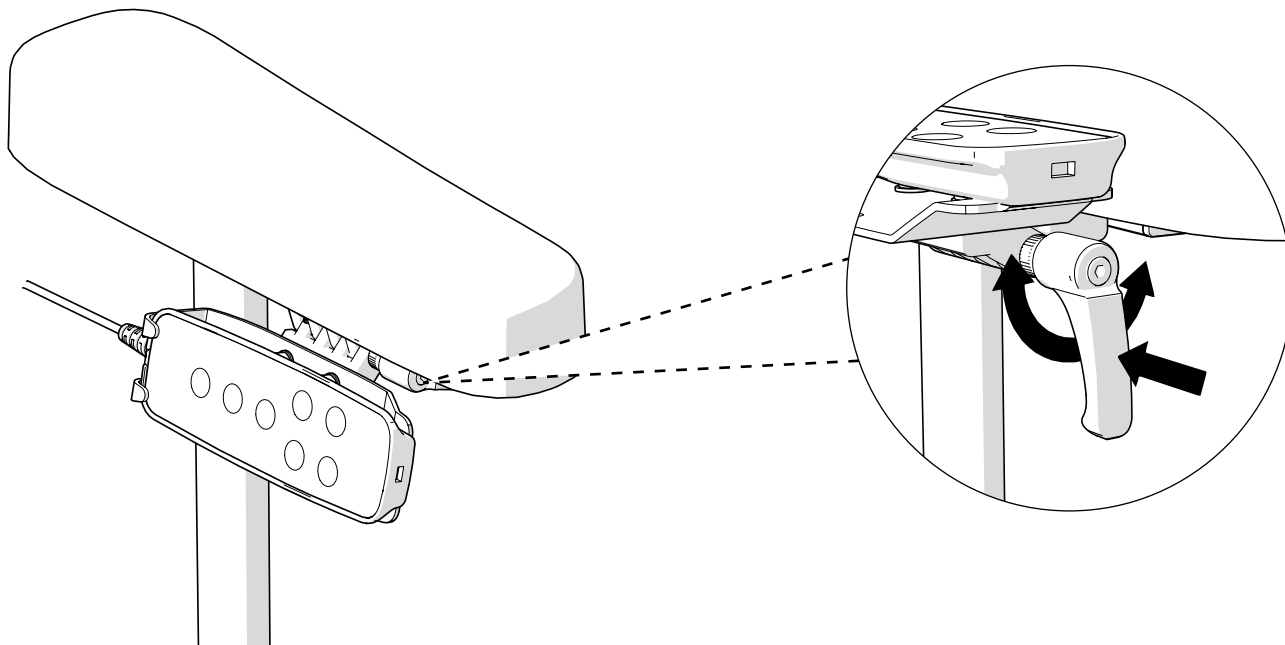


### 3. Skötselråd

Inga specifika skötselråd för denna artikel. Följ råden i bruksanvisningen.

### 4. Destruktion och återvinning

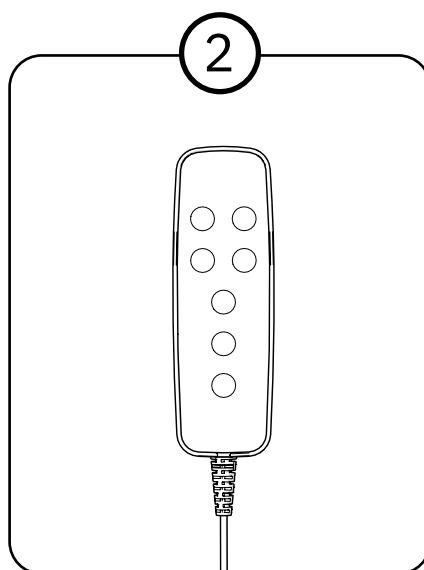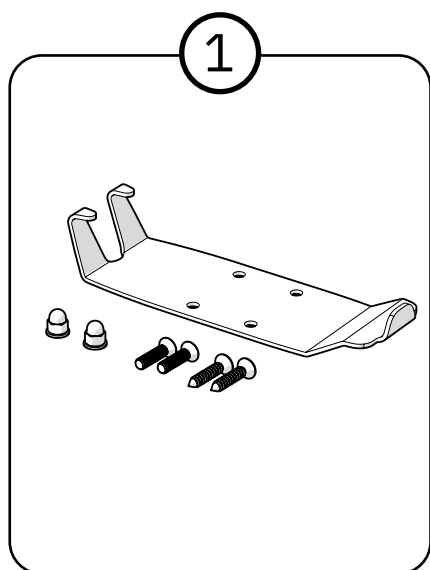

1. Sorteras som metall
2. Sorteras som elektronik
3. Sorteras som blandskrot

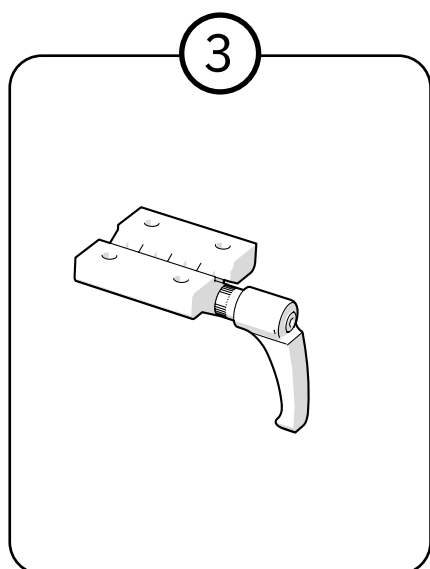

# Kontaktinformation

Mercado Medic AB



Mercado Medic AB  
Tryffelslingan 14  
181 57 Lidingö



08-555 143 00  
Mån-Fre 08.00-16.30



[www.mercado.se](http://www.mercado.se)  
[info@mercado.se](mailto:info@mercado.se)