

# Ryggplatta Twin

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804682

Ändrad: 1612

Giltig från: 1601

## Artikel

Ryggplatta f REAL 9200 TWIN

## Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 5 mm (Mercadonyckeln)

## Utförande

För att montera på en ny ryggplatta, lossa på rattarna (D) och dra ur ryggplatta och ryggstolpar (C) ur ryggfällningen. Skruva loss skruvarna (A) på baksidan av ryggplattan med Mercadonyckeln.

För att den nya ryggen skall vara rätt justerad, skruva in skruvarna (A) löst för hand. Lossa på vreden (B)(E), för ner ryggstolparna (C) i ryggfällningarna. Dra åt skruvarna (A). Ställ in ryggen och dra åt (D)(E)(B), i den ordningen.

