




REAL[®] SPIDER - SPRÄNGSKISS

REAL[®] SPIDER - EXPLODED DIAGRAM

Artikelnr/Article no 803437
Ändrad/Changed 1712
Giltig från/Valid from 111026

P

VERSION 002

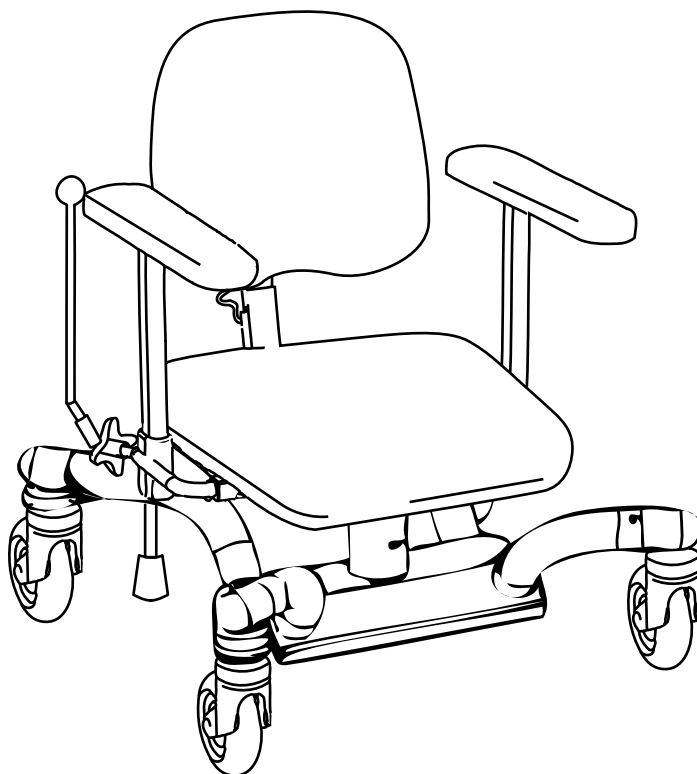

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se


Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR & FÄRGKODER/UPHOLSTERY & COLOUR CODES	3
SITTPLATTA/SEAT	4
SITTKRYSS/SEAT FRAME	7
REGLAGE/CONTROLS	9
LYFTOMATER/LIFTOMATS	11
RYGGPLATTA/BACKREST	12
RYGGMEKANISM/BACKREST MECHANISM	15
ARMSTÖD/ARMRESTS	18
ARMSTÖDSMEKANSIMER/ARMREST MECHANISMS	18
STATIV & BROMSAR/BASE & BRAKES	20
HJUL/CASTORS	22
MANÖVERBOX/REMOTE	23
LADDBOX/CHARGERBOX	25

Klädslar & färgkoder

Clothing & colour codes

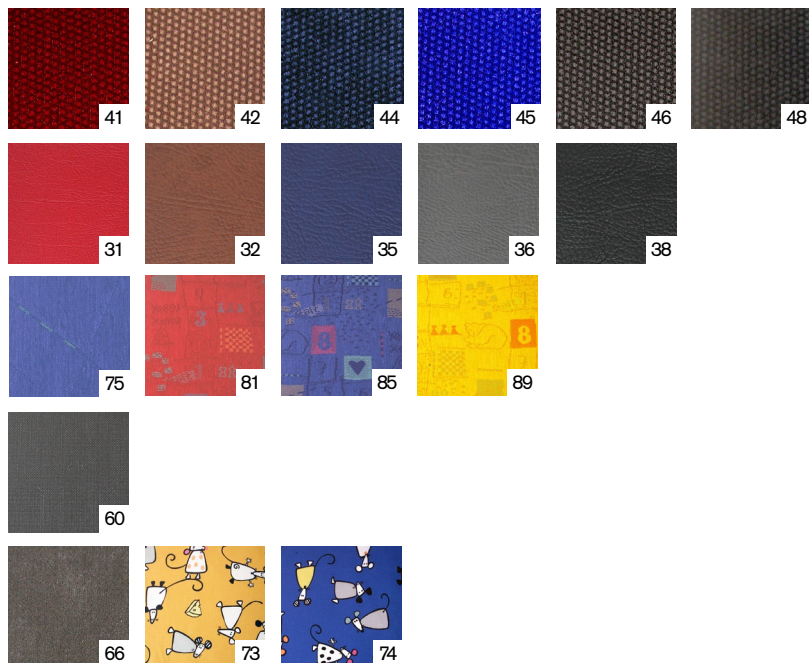

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 & 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 & 8)

Plysch/*Plush*

41 Vinröd/*Bordeaux* 42 Brun/*Brown* 44 Marin/*Navy Blue*
45 Realblå/*Royal blue* 46 Grå/*Grey* 48 Svart/*Black*

Konstläder/*Skai*

31 Röd/*Red* 32 Brun/*Brown* 35 Blå/*Blue*
36 Grå/*Grey* 38 Svart/*Black*

Väv mönstrad Vuxen/*Patterned fabric, Adult*

75 Blå
75 *Blue*

Väv mönstrad Barn/*Patterned fabric, Child*

81 Röd/*Red* 85 Blå/*Blue* 89 Gul/*Yellow*

Alternativ klädsel/*Alternative covering*

60 Hygienväv/*Hygiene fabric*
95 Utan klädsel/*Without clothing*

Överdragsklädsel/*Covering*

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/
Incontinence cover, grey plastic-coated terry
73 Barn, Gul bomull/*Child, Yellow cotton*
74 Barn, Blå bomull/*Child, Blue cotton*

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Digit 5-6 = Size

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Digit 7 = Material (plush, skai etc.)

Siffror 8 = Färg

Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<i>AD</i> apter	Adapter	LD	<i>Leg</i> Divider	Grenkil
AR	<i>Arm</i> Rest	Armstöd	LDC	<i>Leg</i> Divider Cover	Grenkil överdrag
ARM	<i>Arm</i> Rest Mechanism	Armstödsmekanism	LS	<i>Leg</i> Support	Benstöd
AS	<i>Am</i> putation Support	Amputationsstöd	NS	<i>Neck</i> Support	Nackstöd
ASC	<i>Am</i> putation Support Cover	Amputationsstöds överdrag	NSC	<i>Neck</i> Support Cover	Nackstöd överdrag
BD	<i>Br</i> ake Device	Handbroms	PB	<i>Push</i> Bar	Körbygel
BE	<i>Bas</i> E	Stativ	RC	<i>Reu</i> matic Cross	Reumatikerkryss
BEA	<i>Br</i> Eak Accessory	Bromstillbehör	SA	<i>Seat</i> Angle Mechanism	Sitstilt
BEX	<i>Base</i> EXtender	Stativförlängare	SAR	<i>Seat</i> Angle Regulation	Sitstilsreglage
BR	<i>Back</i> Rest	Rygg	SAP	<i>Seat</i> Angle Placement	Sitstilsplacering
BRC	<i>Back</i> Rest Cover	Rygg överdrag	SH	<i>Seat</i> Height	Sitthöjd
BRM	<i>Back</i> Rest Mechanism	Ryggmekanism	SS	<i>Side</i> Support	Sidostöd
CS	<i>Calf</i> Support	Vadstöd	SSC	<i>Side</i> Support Cover	Sidostöds överdrag
CSC	<i>Calf</i> Support Cover	Vadstöds överdrag	ST	<i>Sea</i> T	Sits
FR	<i>Foot</i> Ring	Fotring	STC	<i>Sea</i> T Cover	Sits överdrag
HB	<i>Hip</i> Belt	Höftbälte	TA	<i>Table</i>	Bord
KS	<i>Knee</i> Support	Knästopp	TS	<i>Trunk</i> Support	Bålstöd
KSC	<i>Knee</i> Support Cover	Knästopps överdrag	TSC	<i>Trunk</i> Support Cover	Bålstöd överdrag
LB	<i>Large</i> Ball	Stor kula	WE	<i>Wh</i> Eel	Hjul

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

A01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

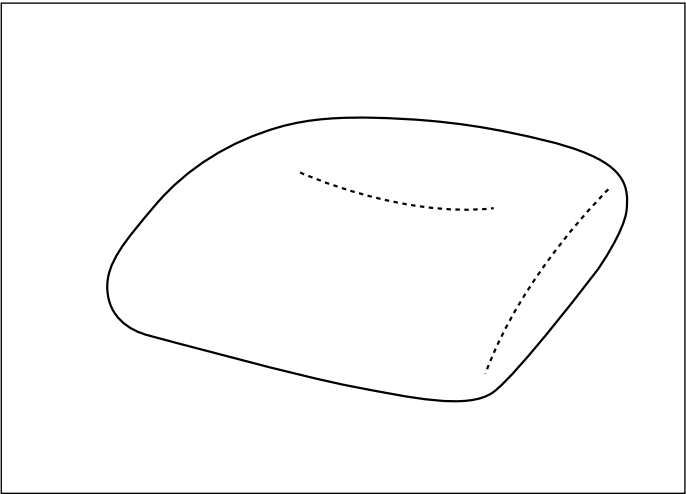


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST104046 150467	Sits ErgoMedic 36x43 Plysch Grå Seat ErgoMedic 36x43 Plush Grey
2	ST104546 150465	Sits ErgoMedic 36x39 Plysch Grå Seat ErgoMedic 36x39 Plush Grey
3	ST105046 150466	Sits ErgoMedic 33x35 Plysch Grå Seat ErgoMedic 33x35 Plush Grey
4	ST105546 150468	Sits ErgoMedic 29x32 Plysch Grå Seat ErgoMedic 29x32 Plush Grey

B01 Sits ErgoMedic Slim
 Seat ErgoMedic Slim

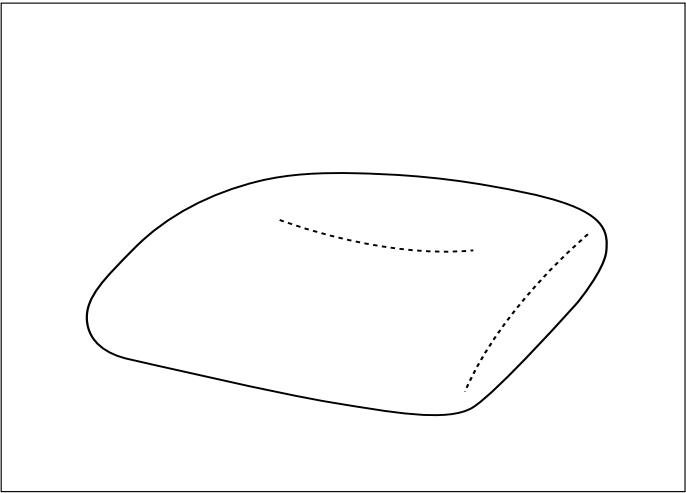

B01 1	ST124075	Sits ErgoMedic Slim 36x43 Mönstrad Väv Vux Blå Seat ErgoMedic Slim 36x43 Pattern. fabric Adult Blue
2	ST124575	Sits ErgoMedic Slim 36x39 Mönstrad Väv Vux Blå Seat ErgoMedic Slim 36x39 Pattern. fabric Adult Blue
3	ST125075	Sits ErgoMedic Slim 33x35 Mönstrad Väv Vux Blå Seat ErgoMedic Slim 33x35 Pattern. fabric Adult Blue
4	ST125575	Sits ErgoMedic Slim 29x32 Mönstrad Väv Vux Blå Seat ErgoMedic Slim 29x32 Pattern. fabric Adult Blue

C01

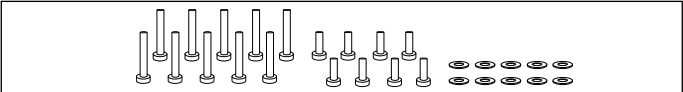


C01	803269	Skruvsats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	--

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

D01 Sits ErgoMedic PLUS
 Seat ErgoMedic PLUS

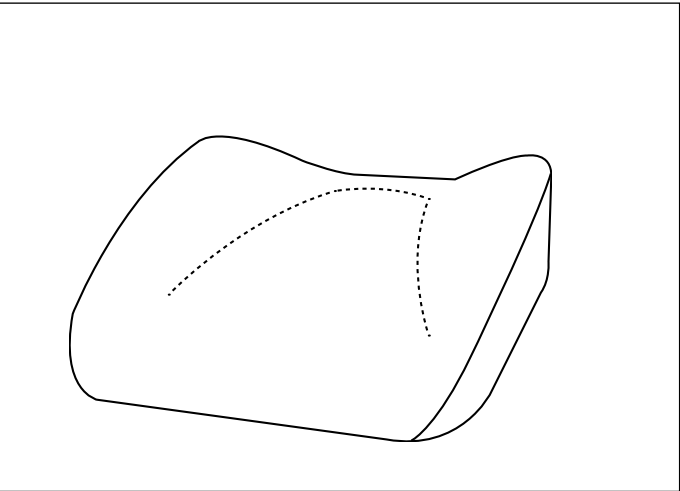


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01 1	ST204046 151467	Sits ErgoMedic PLUS 36x43 Plysch Grå <i>Seat ErgoMedic PLUS 36x43 Plush Grey</i>
2	ST204546 151465	Sits ErgoMedic PLUS 36x39 Plysch Grå <i>Seat ErgoMedic PLUS 36x39 Plush Grey</i>
3	ST205046 151466	Sits ErgoMedic PLUS 33x35 Plysch Grå <i>Seat ErgoMedic PLUS 33x35 Plush Grey</i>
4	ST205546 151468	Sits ErgoMedic PLUS 29x32 Plysch Grå <i>Seat ErgoMedic PLUS 29x32 Plush Grey</i>

E01 Sits ErgoMedic PLUS Slow Recovery
 Seat ErgoMedic Slow Recovery

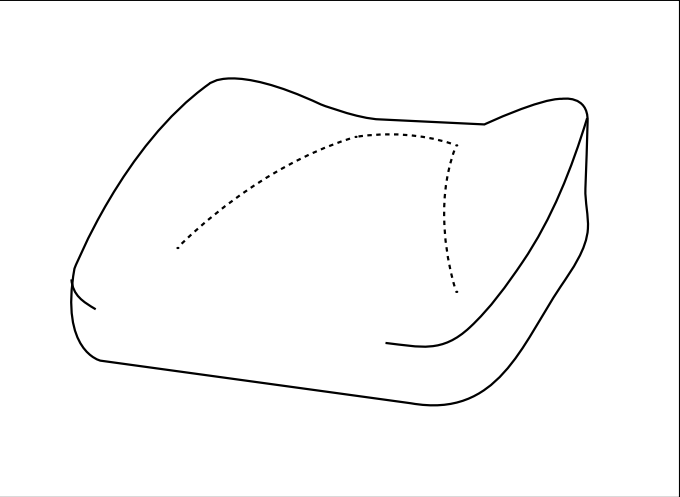

E01 1	ST214046 156467	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plysch Grå <i>Seat EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plush Grey</i>
2	ST214546 156465	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plysch Grå <i>Seat EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plush Grey</i>
3	ST215046 156466	Sits EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plysch Grå <i>Seat EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plush Grey</i>

F01

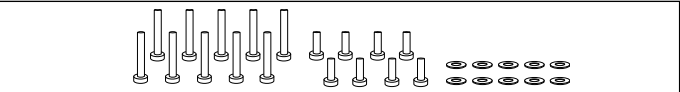


F01	803269	Skruvsats f montering av sittplatta <i>Screw kit for seat assembly</i>
-----	------------------------	---


Stycklista - Sittkryss

Part list - Seatframe


A01 Sittkryss vinkelfast
Seatframe without angle adjustment

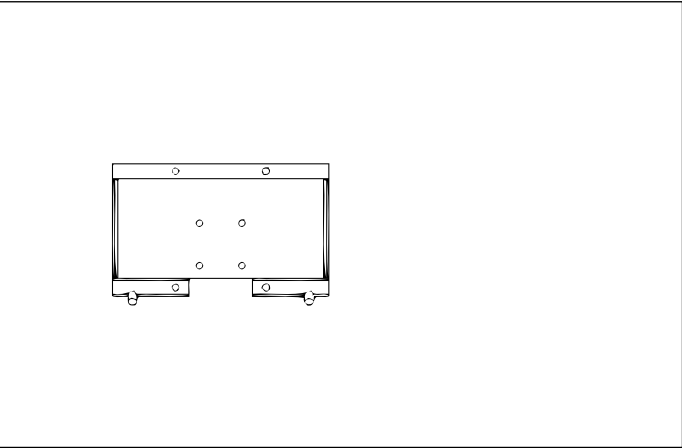


B01 Sittkryss tiltbart
Angle adjustable seatframe

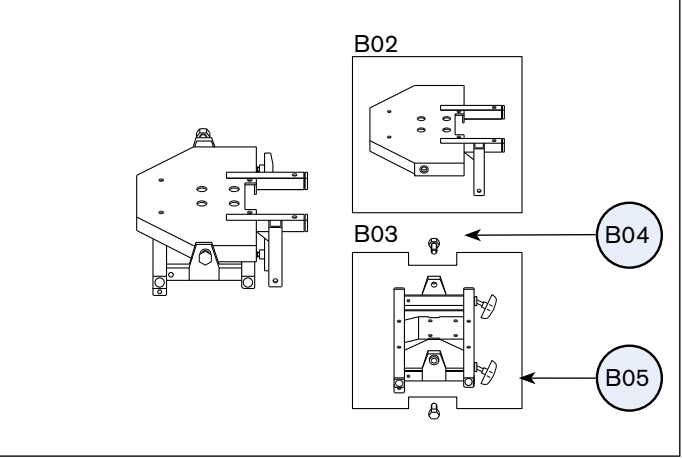

C01 Sittkryss allvinkel
Allangle seatframe

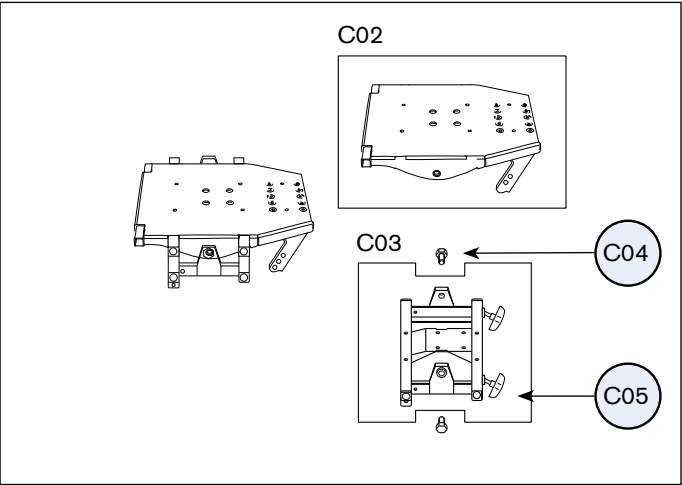

D01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

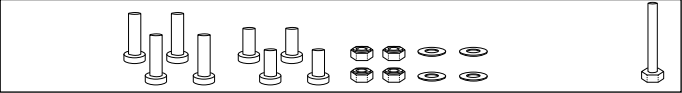

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803297	Sittkryss 9000 Mini Vf Br25-32 (Barn) Seatframe 90000 without angle adjustm. 25-32 cm (Child)

B01	801824	Sittkryssmekanism 9100 Vs Br33-39 cm Seatframe 9100 angle adjustment width 33-39 cm
B02	800857	Sittkryss Vs Övre 9000/9100 Br33-54 cm Seatframe 9000/9100 angle adj. upper sect. width 33-54 cm
B03	800856	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 cm (Barn) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower sect. width 33-39 cm
B04	801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
B05	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40


C01	803071	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br33-39 Barn Seatframe 9000 adj. angle 15-23° upper/lower width 33-39
C02	802828	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel Br33-39 Barn Seatframe 9000 adj. angle 15/-23° upperpart width 33-39
C03	800856	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 (Barn) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 33-39
C04	801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
C05	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

D01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Sittkryss


Part list - Seatframe

E01 Sittkryss tiltbart
Angle adjustable seatframe

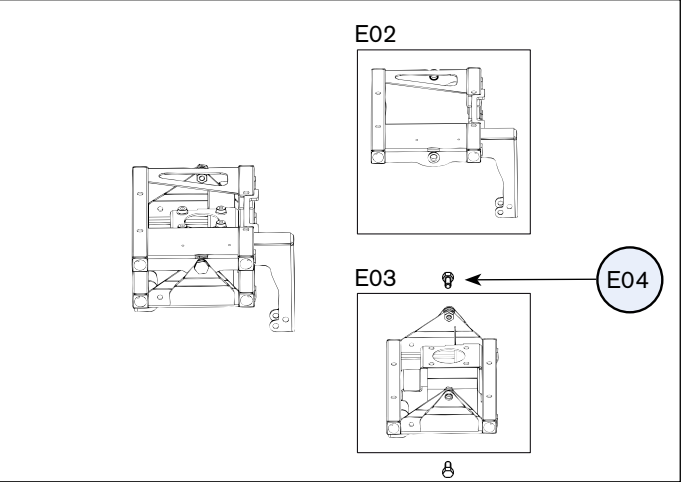


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	803527	Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15 Br29-39 Max brukarvikt 75kg Seatframe 9000/EL angle adj. -15/+15 width 29-39 cm max user weight 75 kg
E02	803577	Sittkryssunderdel 9000 B29-39 Vs -15/+15 9000 Max 75kg Seatframe 9000/EL angle adj. -15/+15 lower section width 29-39 cm max user weight 75 kg
E03	803576	Sittkryssöverdel 9000 B29-39 Vs -15/+15 9000 Max 75kg Seatframe 9000/EL angle adj. -15/+15 upper section width 29-39 cm max user weight 75 kg
E04	803578	Lagerskruv f tiltbara sittkryss M8 gänga Screw for angle adjustable seat frames M8

F01 Sittkryss tiltbart Mini
Angle adjustable seatframe Mini

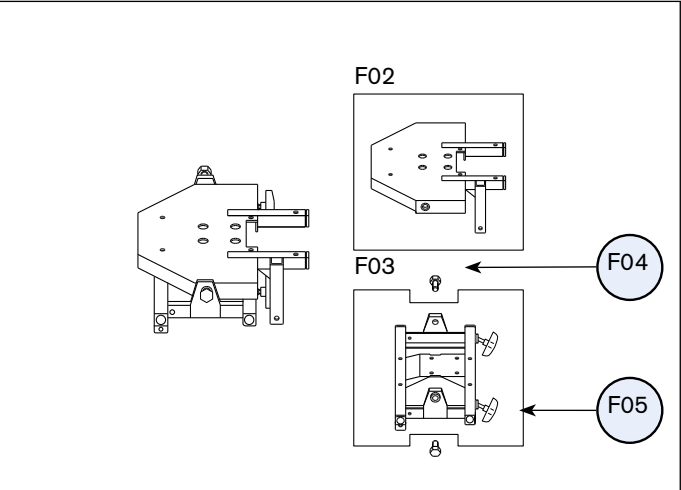

F01	1	802770	Sittkryss PLUS Mini kpl Seatframe PLUS Mini
F02		803164	Sittkryss Överdel PLUS Mini kpl Seatframe upper part PLUS Mini
F03	1	803163	Sittkryss Underdel Mini kpl Seatframe lower part PLUS Mini
F04		801224	Lagerskruv tiltbar Screw angle adjustable
F05		803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

G01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

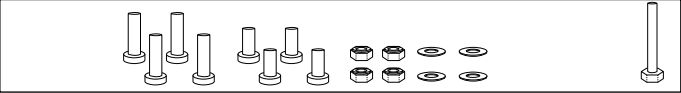


G01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Reglage för sitstilt

Part list - Controls for seat angle adjustment

A

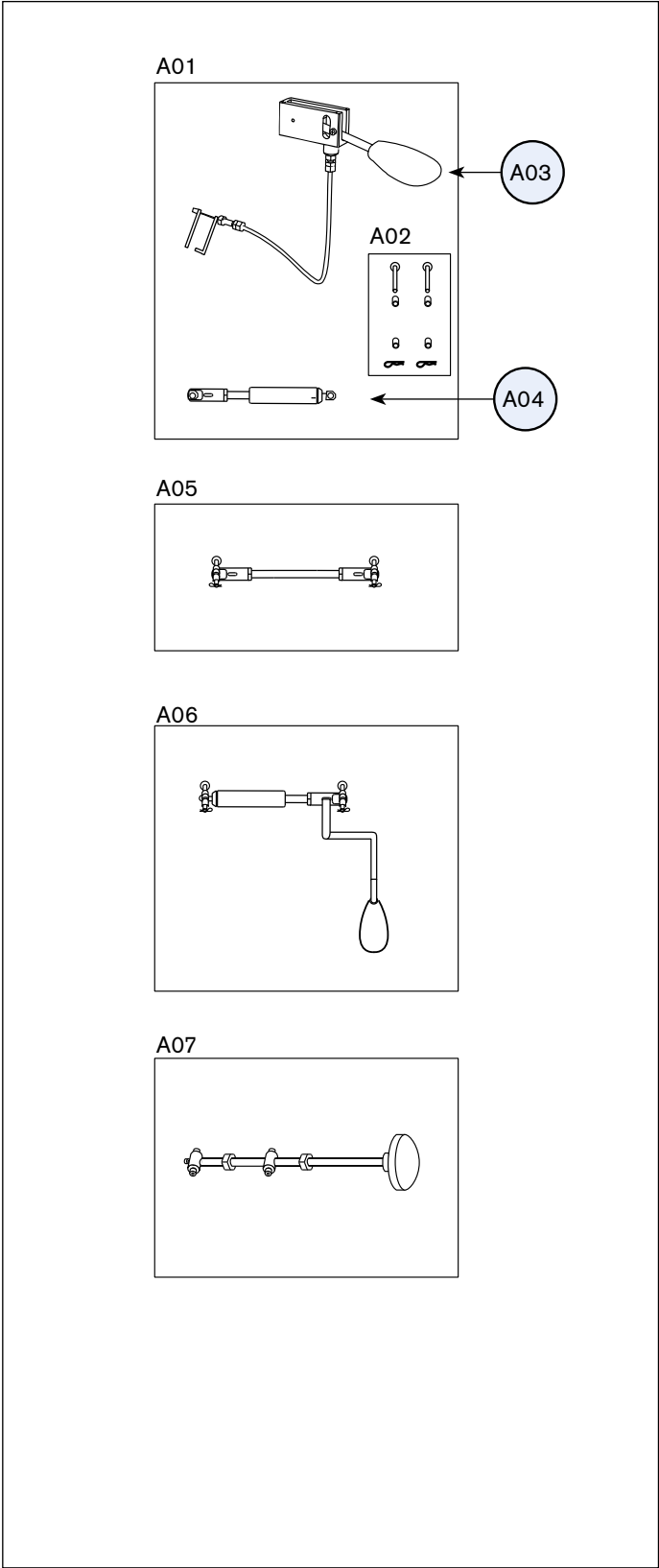


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	SAR31	Sitstilsreglage PLUS u armstöd inkl gasfjäder Seat tilt control PLUS under armrest including gasspring
A02	803508	Cylindriskbult Låsnål Distans för sitstiltskolv Cylindrical bolt, locking pin spacer for seat angle piston
A03	803265	Sitstilsreglage PLUS u armstöd exklusive gasfjäder Seat tilt control excluding gas spring
A04	801145	Gasfjäder 250 N/ 46 mm t Vinkelsits Gasspring 250 N/ 46 mm for seat angle
A05	SAR10	Sitstiltskit Vf f vinkelkryss ersätter vev/gas/elvinkel Seat tilt kit for seatframe with fixed angle, replaces crank/gasspring/electric angling
A06	SAR30	Sitstilsreglage PLUS u sits inkl gasfjäder Seat tilt control PLUS under seat including gasspring
A07	SAR20	Vevreglage sitstilt 9000 Komplettsats Handlecontrol seat tilt 9000 complete kit

Reglage för elrelgerad sitstilt, se sid 23
Control for electric adjusted seat tilt, see page 23

Stycklista - Reglage för sitthöjd

Part list - Controls for seat height


B

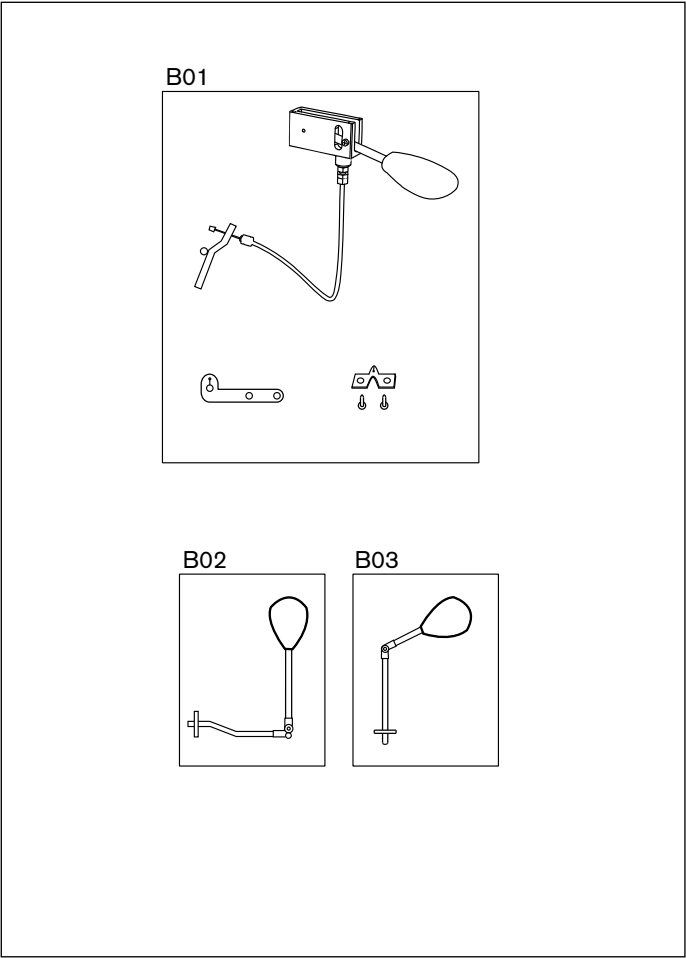


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
B01 1	803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for fixed seat angle</i>
2	803117	Sitthöjdsreglage under armstöd f vs i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for seat angle adjustment</i>
3	803506	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf/vs i PLUS-utförande <i>Seat height control under armrest for both fixed seat angle and seat angle adjustment</i>
B02 1	803016	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Barn PLUS Hö/Vä <i>Seat height control under seat for seat angle adjustment, Child</i>
2	803017	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Mini PLUS Hö/Vä <i>Seat height control under seat for seat angle adjustment, Mini</i>
B03	803033	Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Barn PLUS Hö/Vä <i>Seat height control under seat for fixed seat angle, Child</i>

Stycklista - Lyftomater Part list - Liftomats


A01 Fixlyftomat
Fixliftomat

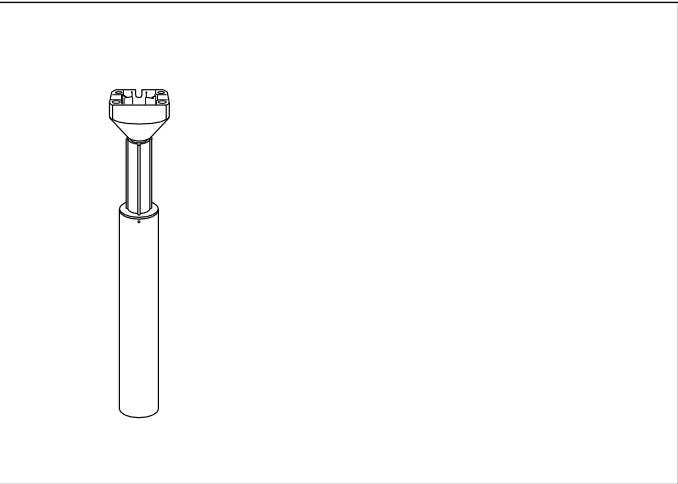


B01 Fixlyftomat fast
Fixliftomat fixed

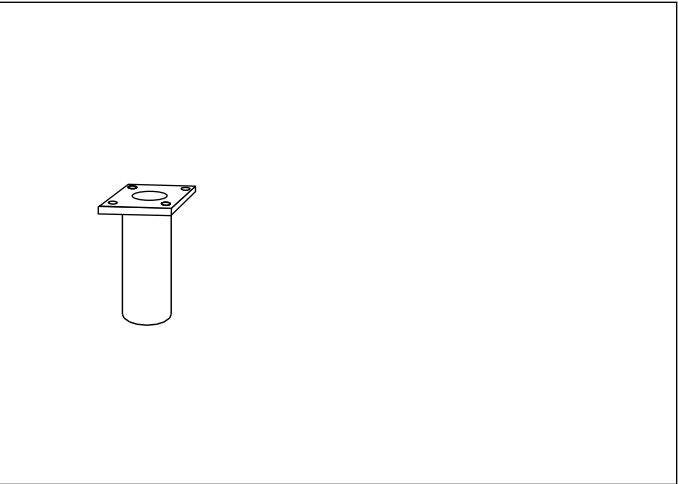

C El-lyftomat
Electric liftomat

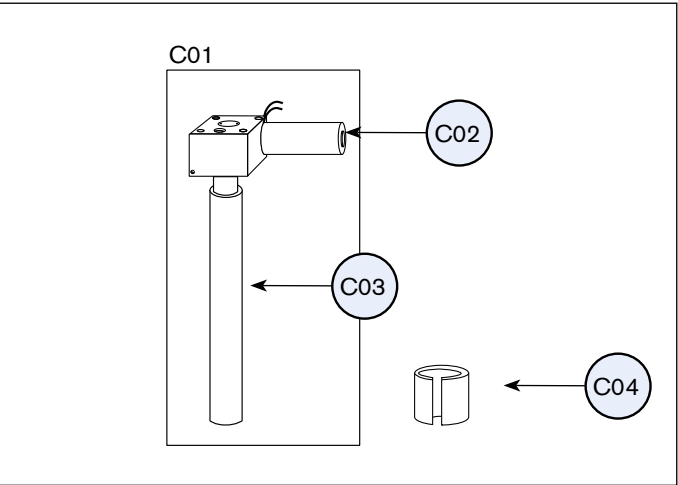

D01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

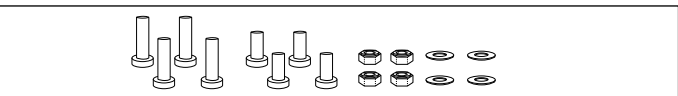

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	803987	Fixlyftomat 200mm 55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm 55-90 kg with aluminium grip</i>
2	803985	Fixlyftomat 200mm <55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm <55-90 kg with aluminium grip</i>
3	803989	Fixlyftomat 200mm 90-130 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm 90-130 kg with aluminium grip</i>
4	803981	Fixlyftomat 140mm 55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm 55-90 kg with aluminium grip</i>
5	803979	Fixlyftomat 140mm <55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm <55-90 kg with aluminium grip</i>
6	803983	Fixlyftomat 140mm 90-130 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm 90-130 kg with aluminium grip</i>

B01 1	803298	Fixlyftomat fast för sitthöjd 17-22cm Spider (14cm) <i>Fixliftomat fixed for seat height 17-22cm Spider (14cm)</i>
2	803846	Fixlyftomat fast för sitthöjd 22-27cm Spider (19cm) <i>Fixliftomat fixed for seat height 22-27cm Spider (19cm)</i>
3	803847	Fixlyftomat fast för sitthöjd 27-32cm Spider (24cm) <i>Fixliftomat fixed for seat height 27-32cm Spider (24cm)</i>
4	803848	Fixlyftomat fast för sitthöjd 32-37cm Spider (29cm) <i>Fixliftomat fixed for seat height 32-37cm Spider (29cm)</i>


C01	801106	Ellyftomat 20 cm <i>Electric height adjustment 20 cm</i>
C02	800271	Motor M48x50/I 12Vdc 6400rpm <i>Motor 6400 rpm</i>
C03	802525	Ytterrör+Spårrör+Kil linjärstyrning 200 <i>Outer tube+track tube 200</i>
C04	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats <i>Plastic inset for Electric liftomat clamps lining</i>

D01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat <i>Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat</i>
-----	--------	---


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

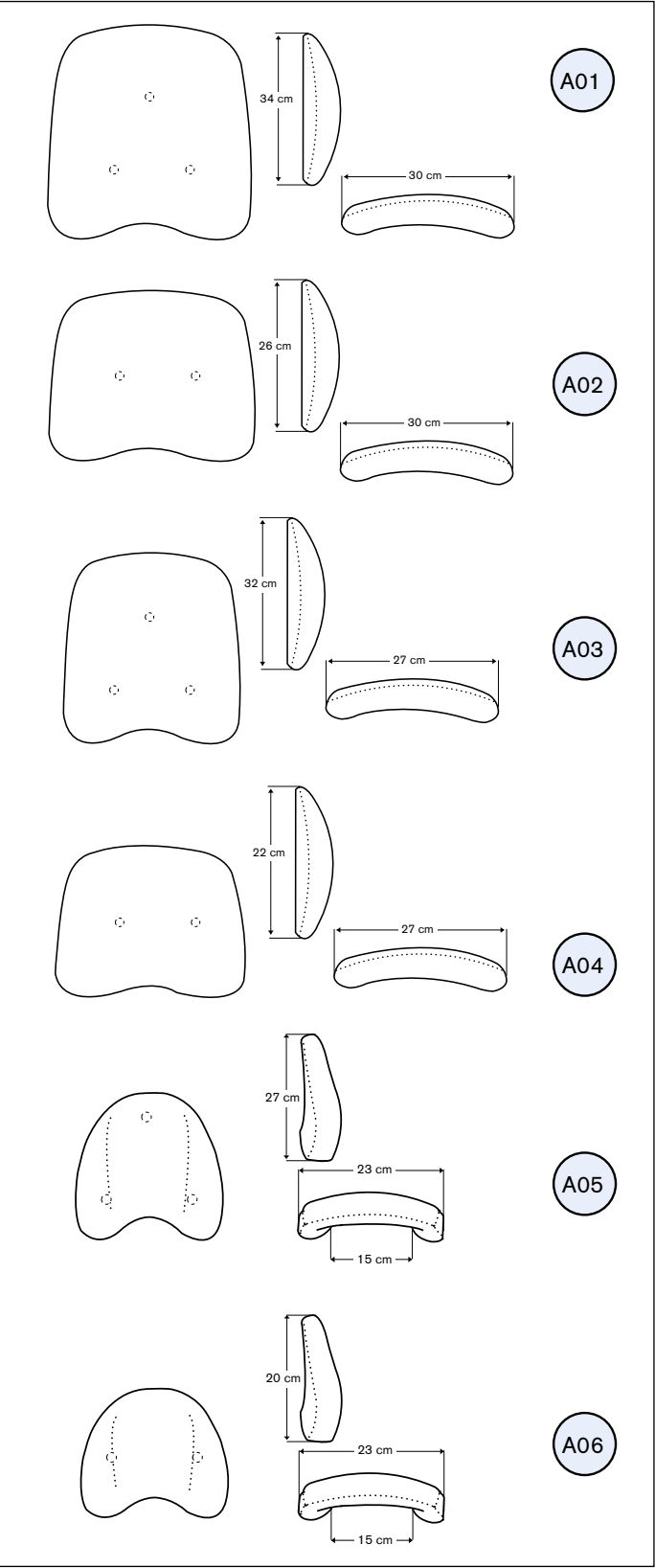

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

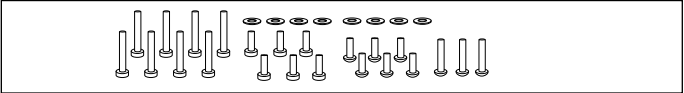


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 BR103546	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå 210465 Backrest ErgoMedic 30x34 Plush Grey
	2 BR123575	Rygg ErgoMedic Slim 30x34 Väv mönstrad Vux Blå Back ErgoMedic Slim 30x34 Pattern. fabric Adult Blue
A02	1 BR106546	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå 210464 Backrest ErgoMedic 30x26 Plush Grey
	2 BR126575	Rygg ErgoMedic Slim 30x26 Väv mönstrad Vux Blå Back ErgoMedic Slim 30x26 Pattern. fabric Adult Blue
A03	1 BR104546	Rygg ErgoMedic 27x32 Plysch Grå 210467 Backrest ErgoMedic 27x32 Plush Grey
	2 BR124575	Rygg ErgoMedic Slim 27x32 Väv mönstrad Vux Blå Back ErgoMedic Slim 27x32 Pattern. fabric Adult Blue
A04	1 BR107046	Rygg ErgoMedic 27x22 Plysch Grå 210466 Backrest ErgoMedic 27x22 Plush Grey
	2 BR127075	Rygg ErgoMedic Slim 27x22 Väv mönstrad Vux Blå Back ErgoMedic Slim 27x22 Pattern. fabric Adult Blue
A05	1 BR105046	Rygg ErgoMedic 23x27 Plysch Grå 253461 Backrest ErgoMedic 23x27 Plush Grey
	2 BR125075	Rygg ErgoMedic Slim 23x27 Väv mönstrad Vux Blå Backrest ErgoM Slim 23x27 Pattern. fabric Adult Blue
A06	1 BR108546	Rygg ErgoMedic 23x20 Plysch Grå 253460 Backrest ErgoMedic 23x20 Plush Grey
	2 BR128575	Rygg ErgoMedic Slim 23x20 Väv mönstrad Vux Blå Backrest ErgoM Slim 23x20 Pattern. fabric Adult Blue

B01 [803270](#) Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggplatta


Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

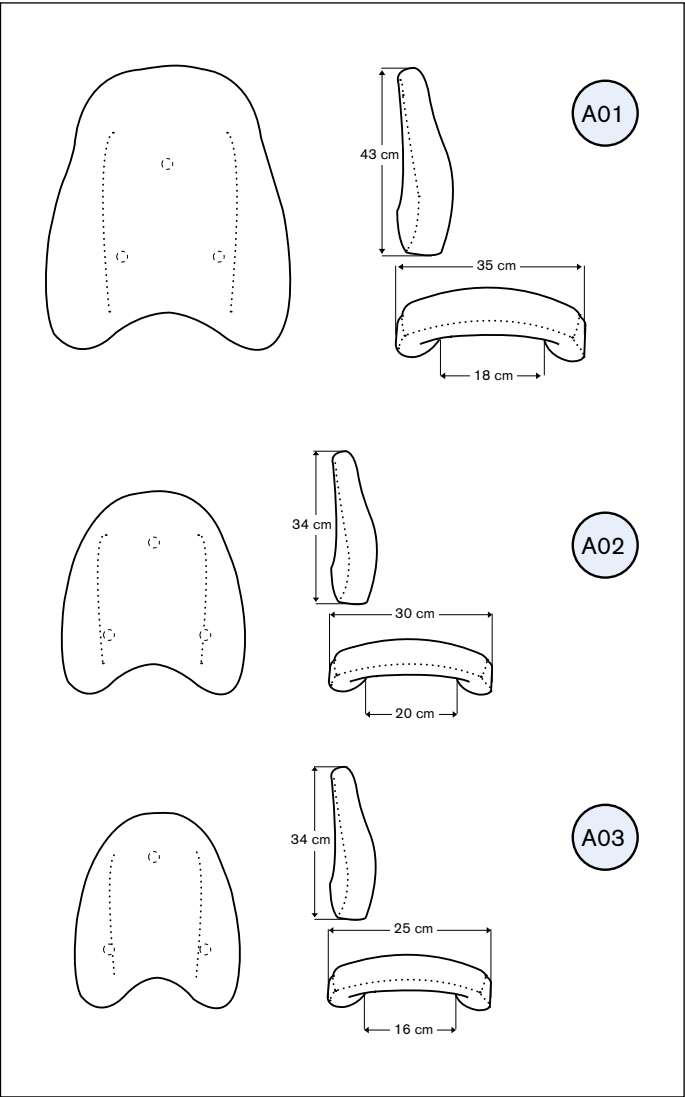

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BR202046 251463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Plush Grey
A02	BR203546 251465	Rygg ErgoMedic PLUS 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 30x34 Plush Grey
A03	BR204046 251464	Rygg ErgoMedic PLUS 25x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 25x34 Plush Grey

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

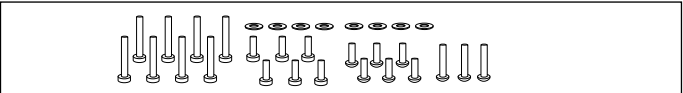


B01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


A Ryggar ErgoMedic PLUS med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS with wedge

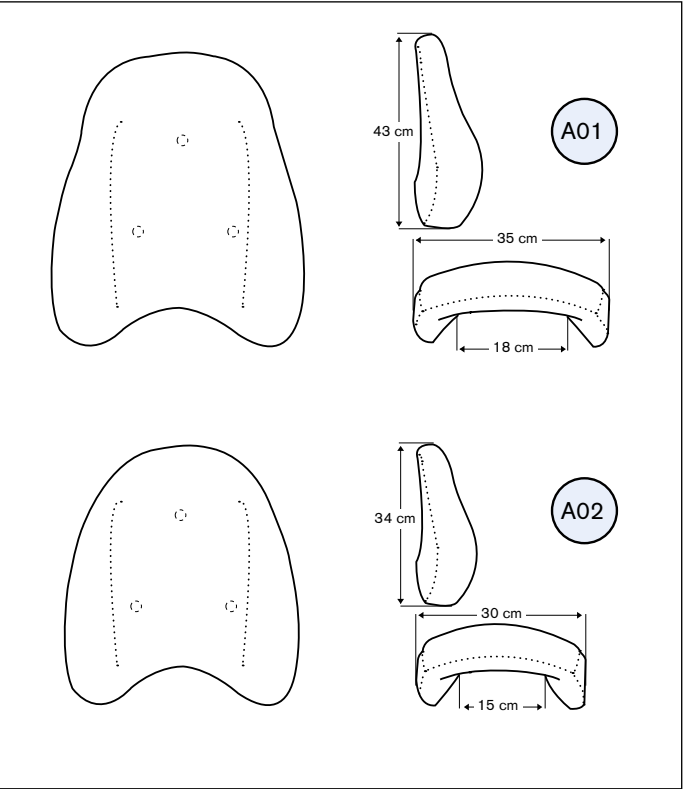

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BR252046 252463	Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Plysch Grå Backrest EM PLUS w sidewedge 35x43 Plush Grey

A02	BR253546 252465	Rygg EM PLUS m Sidokil 30x34 Plysch Grå Backrest EM PLUS w sidewedge 30x34 Plush Grey
-----	--------------------	--

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

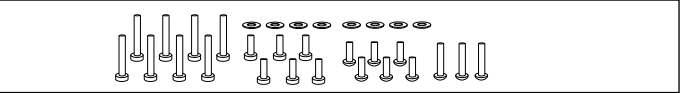


B01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	--


Stycklista - Ryggmekanism Standard, EL & Comfort

Part list - Backrest mechanism

A01 Standard ErgoMedic
Standard ErgoMedic

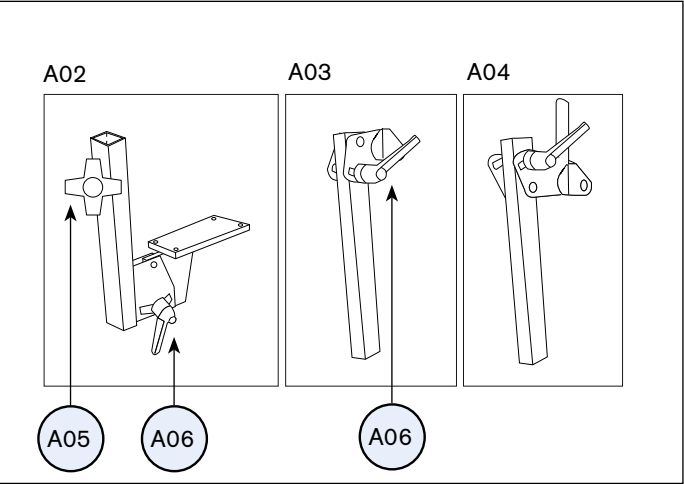

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

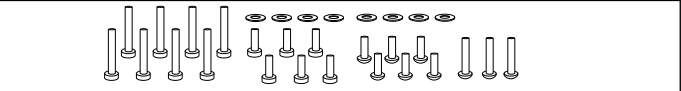


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BRM1000	Ryggmekanism Standard ErgoMedic Låg rygg Backrest adjustment Standard ErgoMedic Low back
2	BRM4000	Ryggmekanism Standard ErgoMedic Hög rygg Backrest adjustment Standard ErgoMedic High back
A02	800842	Ryggfällning Std. Cla/ErgoM Backrest mecanism Std.Cla/ErgoM
A03	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back
A04	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg Back pole Standard ErgoMedic High back
A05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummmed knob M8x20 PLUS
A06	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Gummmed handle M8 PLUS

B01 803270 Skruvsats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 112 Rygg

Part list - Backrest mechanism


A01 200 x 112 mm (hxd)

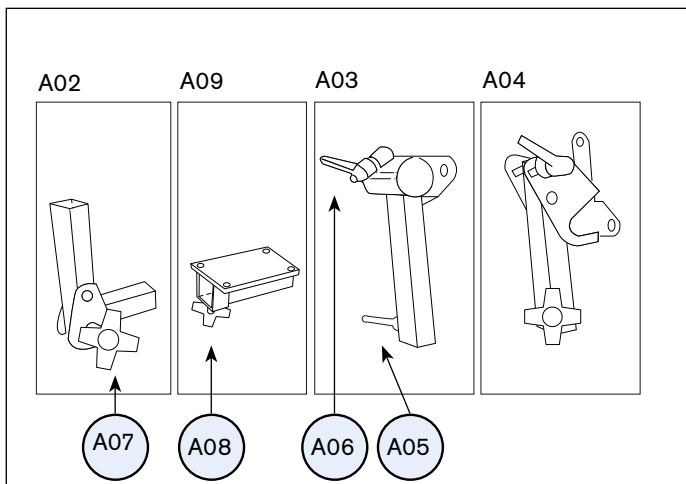


B01 240 x 112 mm (hxd)

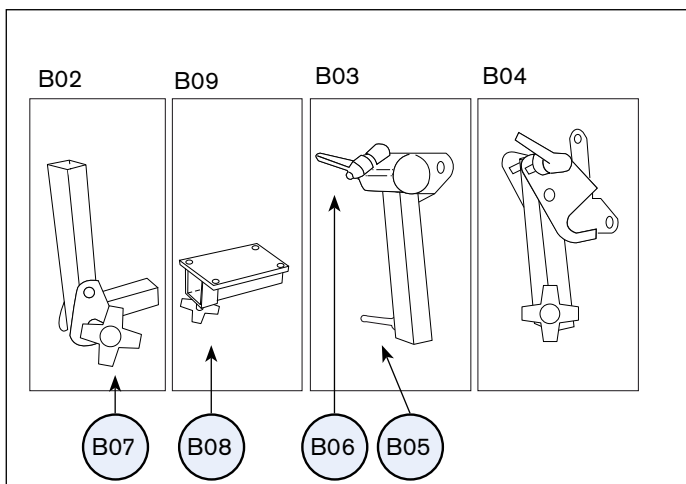

C01 340 x 112 mm (hxd)

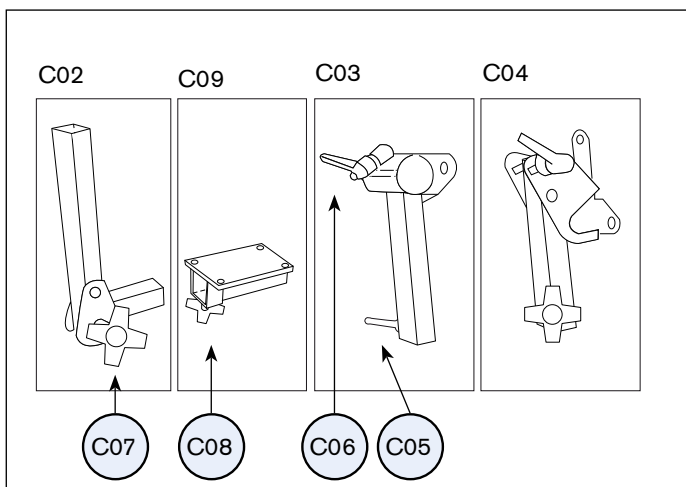

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

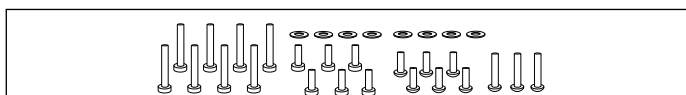


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BRM1800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic S Low back 112 mm
	2	BRM4800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic S High back 112 mm
A02	801923	Ryggfällning Medic 112mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 112 mm S Cla/ErgoM 200 mm
A03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
A05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
A06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
A07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
A08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
B01	1	BRM1900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 112 mm
	2	BRM4900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 112 mm
B02	801083	Ryggfällning Medic 112mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 112 mm L Cla/ErgoM 340 mm
B03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
B04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
B05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
B06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
B07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
B08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
C01	1	BRM2000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL Low back 112 mm
	2	BRM5000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL High back 112 mm
C02	801085	Ryggfällning Medic 112mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 112 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
C03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
C04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
C05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
C06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
C07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
C08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
C09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 155 Rygg

Part list - Backrest mechanism


E01 200 x 155 mm (hxd)

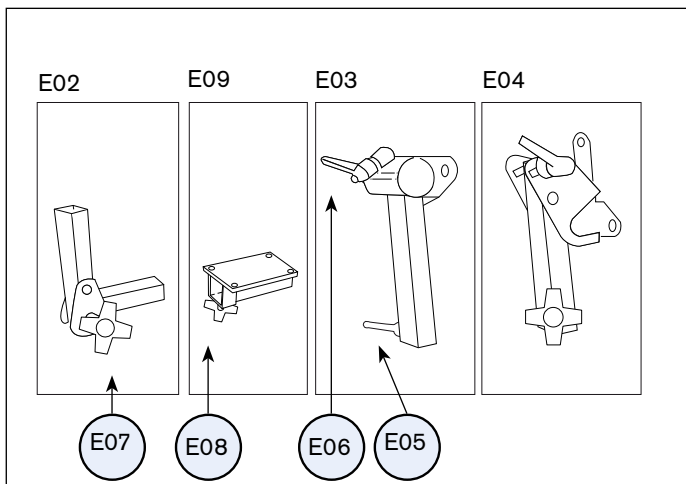


F01 240 x 155 mm (hxd)

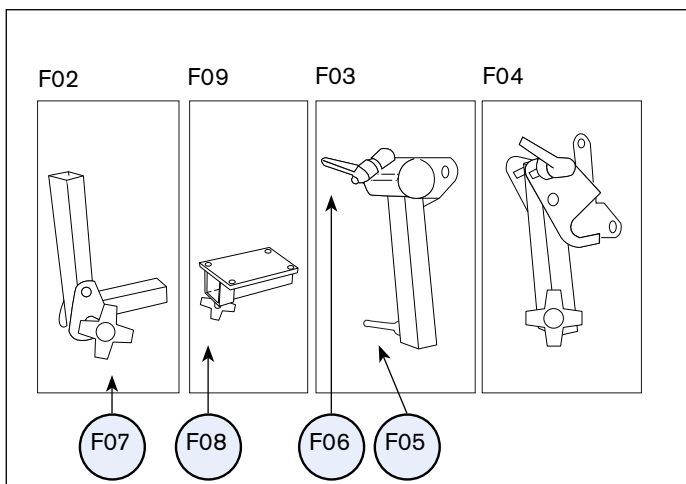

G01 340 x 155 mm (hxd)

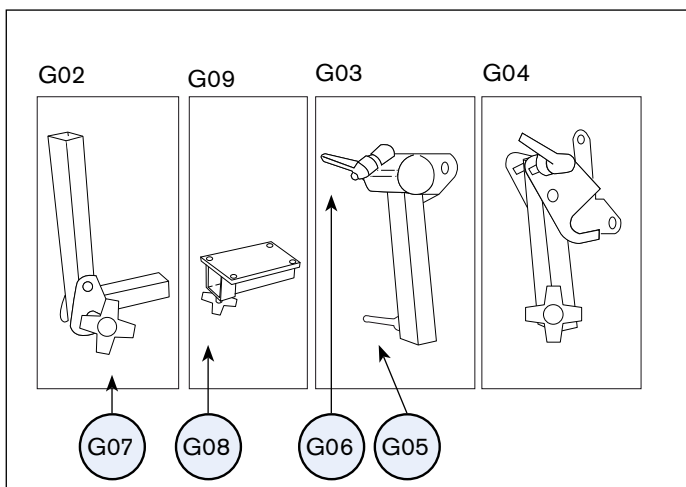

H01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

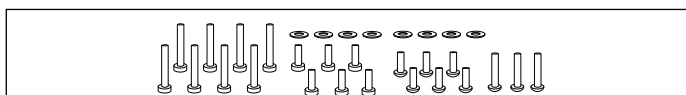


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	1	BRM1500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoM S Low back 155 mm
	2	BRM4500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoM S High back 155 mm
E02	801922	Ryggfällning Medic 155mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 155 mm S Cla/ErgoM 200 mm
E03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
E03	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
E05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
E08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
E09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmechanism Medic hold
F01	1	BRM1600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 155 mm
	2	BRM4600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 155 mm
F02	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 155 mm L Cla/ErgoM 240 mm
F03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic L Low back
F04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
F05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
F06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
F07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
F08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
F09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmechanism Medic hold
G01	1	BRM1700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Låg rygg Backrest adjustment Medic ErgoM XL Low back 155 mm
	2	BRM4700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Hög rygg Backrest adjustment Medic ErgoM XL High back 155 mm
G02	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 155 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
G03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoML Low back
G04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
G05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
G06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
G07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
G08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
G09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmechanism Medic hold
H01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Armstödsplatta

Part list - Armrest

A01 ErgoMedic för armstödsmekanism PLUS
ErgoMedic for armrest mechanism PLUS

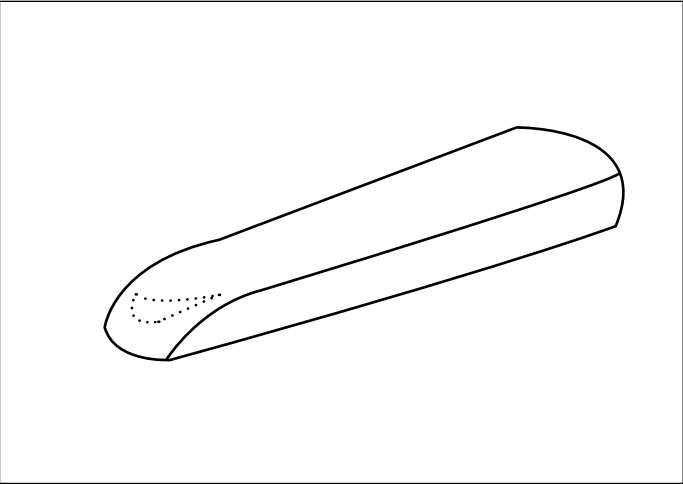

B01 Skruv sats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly




Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 AR102038 240381	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart Armrest Classic 30 cm Skai Black
	2 AR101038 240382	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart Armrest Classic 25 cm Skai Black
	3 AR112038 242381	Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart Armrest Mini 30 cm Skai Black
	4 AR111038 242382	Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart Armrest Mini 25 cm Skai Black

B01 [803271](#) Skruvsats f montering armstöd
Screw kit for armrest assembly

Stycklista - Armstödsmekanismer

Part list - Armrest mechanisms

A Armstödsmekanism PLUS
 Armrest mechanism PLUS

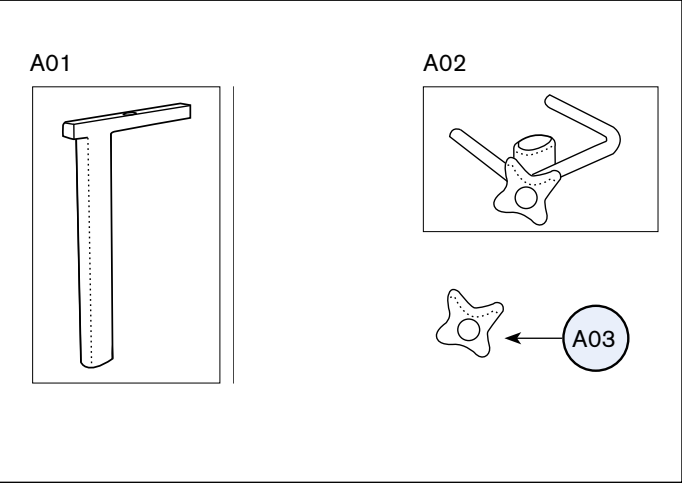


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	802700 Armstöd PLUS Höger Höjd 32 Armrest PLUS right, Height 32
	2	802702 Armstöd PLUS Vänster Höjd 32 Armrest PLUS left, Height 32
	3	802773 Armstöd Plus Mini Höger Armrest PLUS Mini right
	4	802774 Armstöd Plus Mini Vänster Armrest PLUS Mini left
A02	1	802698 Armstöd Breddbåge PLUS Höger 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Right
	2	802699 Armstöd Breddbåge PLUS Vänster 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Left
	3	802771 Armstöd Breddbåge Plus Mini Höger U-bar for width adjustment PLUS Mini Right
	4	802772 Armstöd Breddbåge Plus Mini Vänster U-bar for width adjustment PLUS Mini Left
A03		803004 Stjärnratt Plus M8x20 (Braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS

Stycklista - Stativ Spider

Part list - Base Spider

A01

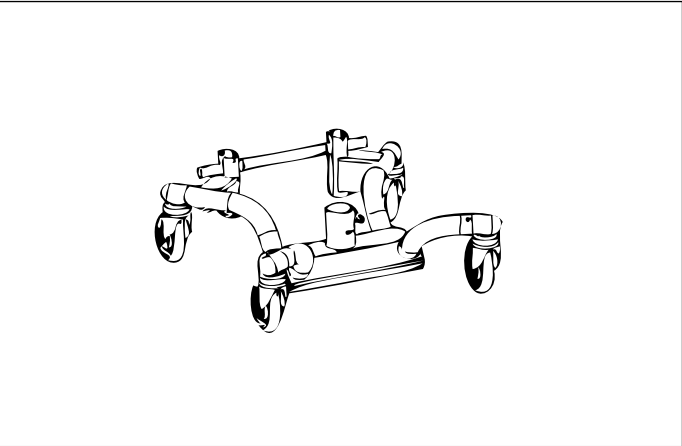


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	803296	Stativ Mini Spider 100 XL 45x50 cm Base Spider Mini 100 XL 45x50 cm
2	803850	Stativ Mini Spider 100 SL 45x50 cm Base Spider Mini 100 SL 45x50 cm
3	803851	Stativ Mini Spider 100 BXL 45x50 cm Base Spider Mini 100 BXL 45x50 cm
A02 1	803555	Stativ Mini Spider 100 XL 45x42 cm Base Spider Mini 100 XL 45x42 cm
2	803852	Stativ Mini Spider 100 SL 45x42 cm Base Spider Mini 100 SL 45x42 cm
3	803853	Stativ Mini Spider 100 BXL 45x42 cm Base Spider Mini 100 BXL 45x42 cm


Stycklista - Stativ och bromsar

Part list - Base and brakes

A Bromsar och stativförlängare
Brakes and base extenders

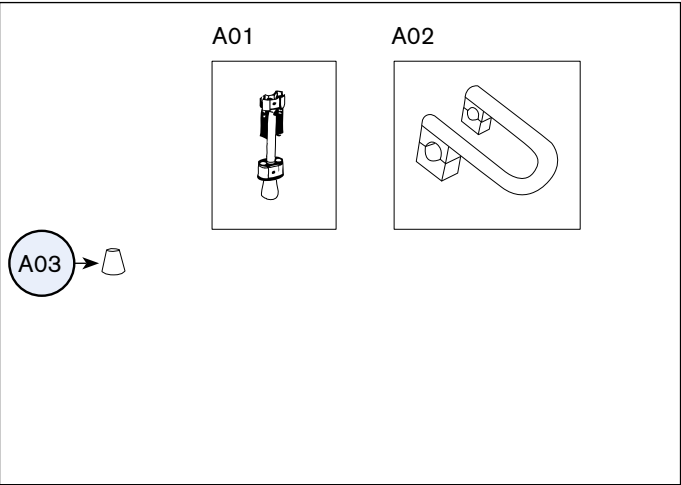

B Broms
Brake

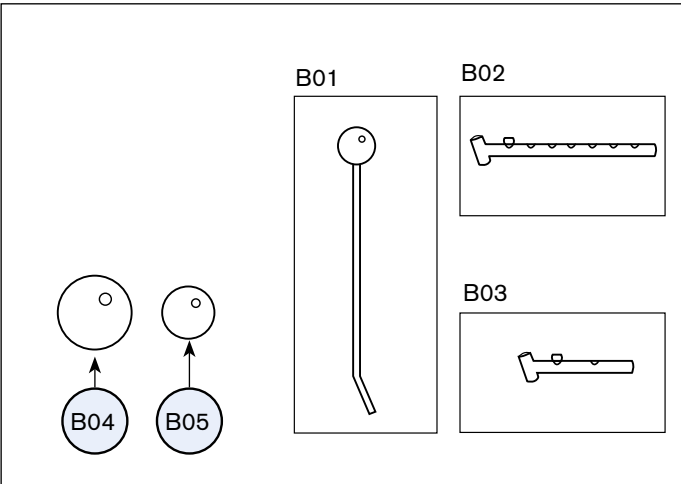


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803854	Bromsben för Spider/stativ f 100mm hjul Brake leg for Spider base for castors 100 mm
A02	802865	Bromspedal för PLUS-stativ 20mm bromsaxeldiameter Brake pedal for PLUS base
A05	801264	Bromsfot Diam 32 mm Brake rubber 32 mm
B01	1 BD1020	Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ Brake lever 25 cm for PLUS-base
	2 BD1010	Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base
	3 BD1010	Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base
	4 BD1040	Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-stativ Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base
B02	802800	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (7 lägen) Bracket for brake lever, 7 positions
B03	802799	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (2 lägen) Bracket for brake lever, 2 positions
B04	801625	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
B05	801014	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
 XL castor -Allround

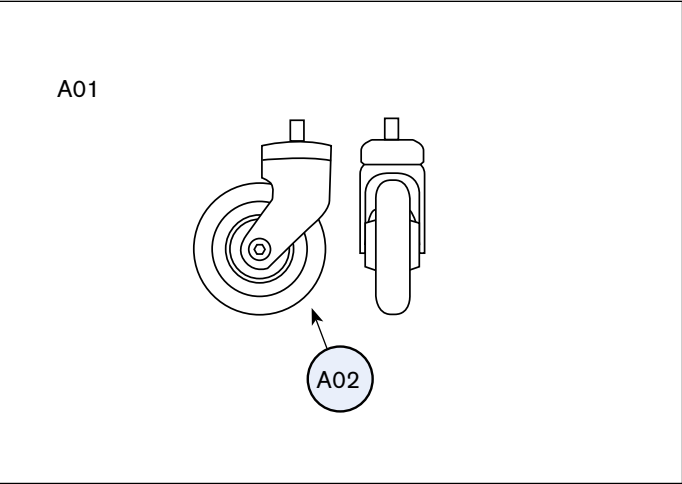

B SL Hjul - För hårda golv
 SL castor -Hard surfaces

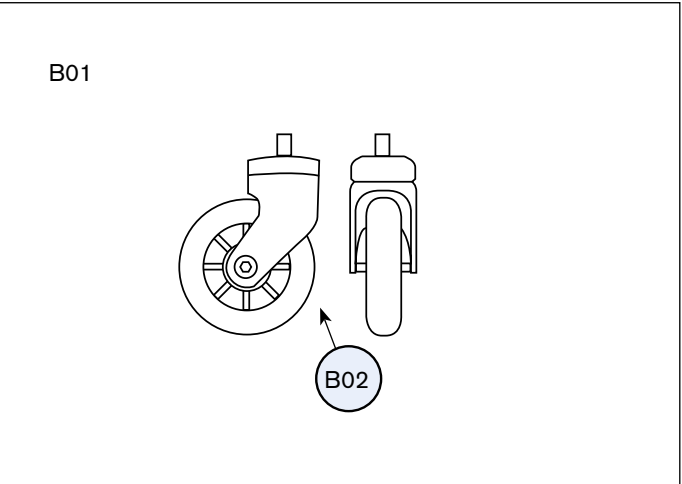

C BXL Hjul - För mjuka golv
 BXL castor -Soft surfaces

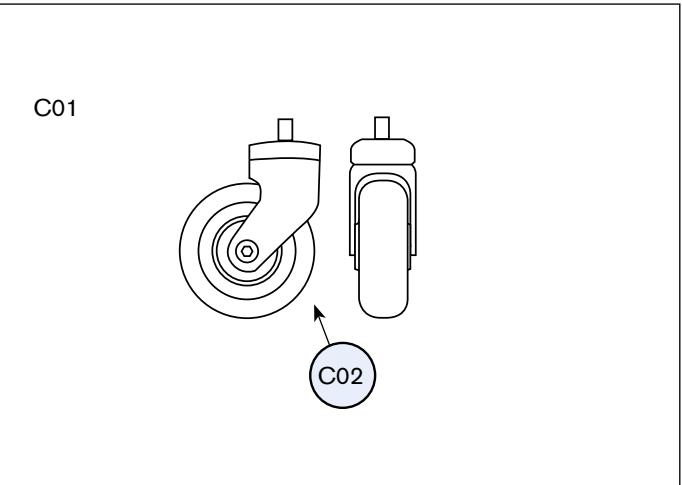


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 801213	Länkhjul 100 XL M12 Castor 100mm XL M12
	2 800903	Länkhjul 100 XL tröga M12 Castors 100mm XL stagnant M12
A02	801360	Hjul 100 XL m kullager utan bygel Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing
B01	801144	Länkhjul 100 SL M12 Castor 100mm SL M12
B03	801638	Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing
C01	803162	Extra brett lätttrullat länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled castor
C02	803161	Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel Castors without fork 100 BXL polyutrthane black


Stycklista - EL manöverbox

Part list - Electric remote


A01 Elektronik för upp & ner
Electronics for up & down

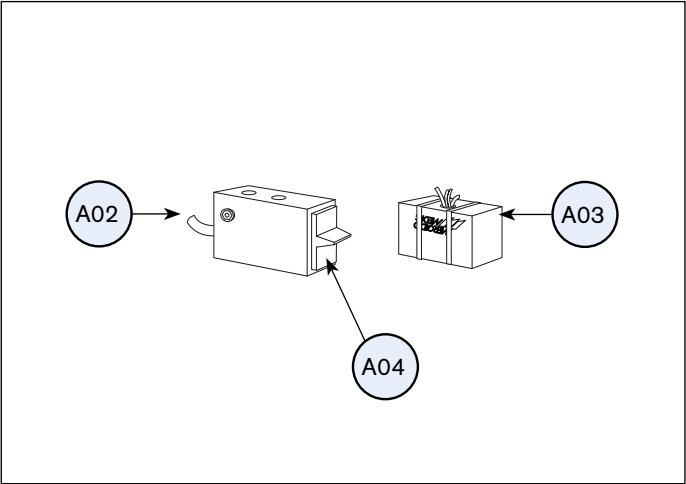

B01 Elektronik för sitsvinkling
Electronics for seat angle adjustment

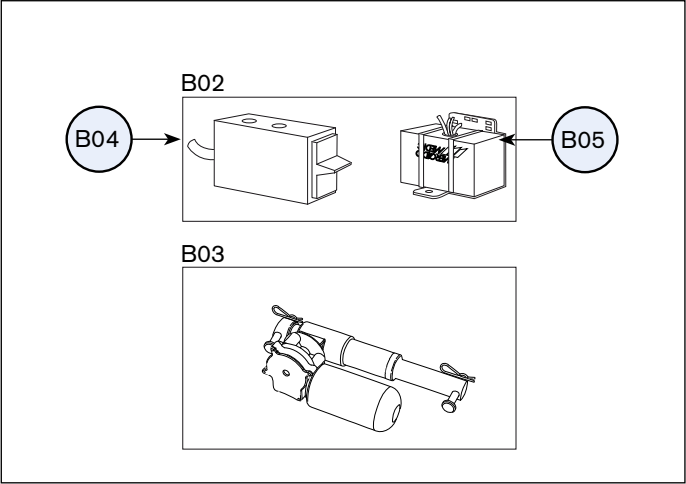

C01 Elektronik för broms
Electronics for brake

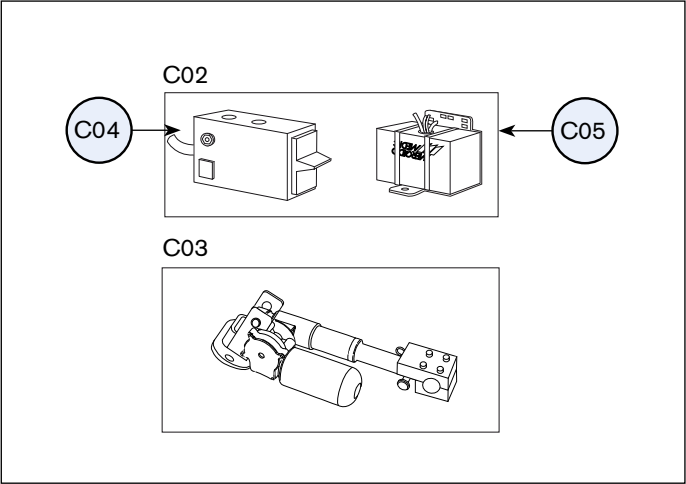


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	802998	Reläkortssats upp/ner+ladd kpl inkl manöverbox 9000 PLUS <i>Relaycardkit up/down,charg.cpl.incl.operatorbox 9000 PLUS</i>
A02	803034	Manöverbox PLUS f upp/ner +ladd kpl m kablage f reläkort <i>Maneuverbox PLUS for up/down +charger with cabling f realycard</i>
A03	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000 <i>Relaycard current limiting up/down REAL 9000</i>
A04	802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp) <i>Red Button</i>
B01	1 SAR40	Eldon+Reläsats f sitsvinkel inkl manöverbox <i>Electric kit + relaycard f seat angle including maneuverbox</i>
	2 803291	Eldonssats f elvinkel f manuell stol 9000 PLUS <i>Electric kit + relaycard f electric angling for manual chair</i>
	3 803667	Eldon+Relä f sitsvink -15/+15 f reläkort Real 9000 PLUS <i>Electric kit + relaycard f seat -15/+15 f relaycard 9000 PLUS</i>
B02	803000	Reläkortssats sitsvinkel kpl inkl manöverbox 9000 PLUS <i>Relaycardkit seat angle compl. incl. maneuverbox 9000 PLUS</i>
B03	1 802730	Eldonssats f sitsvinkel <i>Electric kit for seat angle</i>
	2 803666	Eldonssats f sitsvink -15/+15 f reläkort Real 9000 PLUS <i>Electric kit f seat -15/+15 f relaycard 9000 PLUS</i>
B04	803035	Manöverbox PLUS f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort <i>Maneuverbox PLUS f back/seat angle cpl. with cabling f relaycard</i>
B05	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp <i>Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps</i>
C01	1 803856	Eldon+Reläsats f Spider f broms inkl manöverbox Plus <i>Electric kit + relaycard f Spider f brake incl. maneuverbox</i>
	2 803857	Eldonskit f elbroms f manuell Spiderstol PLUS inkl batteri <i>Electric kit for brake, for Spider chair Plus incl battery</i>
C02	803001	Reläkortssats broms kpl inkl manöverbox 9000 PLUS <i>Relaycardkit brake completeincl.operat.box 9000 PLUS</i>
C03	803855	Eldonssats f elbroms f Spider <i>Electric kit for brake for Spider</i>
C04	803036	Manöverbox PLUS f upp/ner & broms kpl m kablage f reläkort <i>Maneuverbox PLUS for up/downbrake cpl.w. cabl. f relaycard</i>
C05	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp <i>Relaycard current limiting spec.brake 8 amp(dement)</i>


Stycklista - EL manöverbox

Part list - Electric remote


E01 Elektronik för ryggvinkling
Electronics for backrest angle

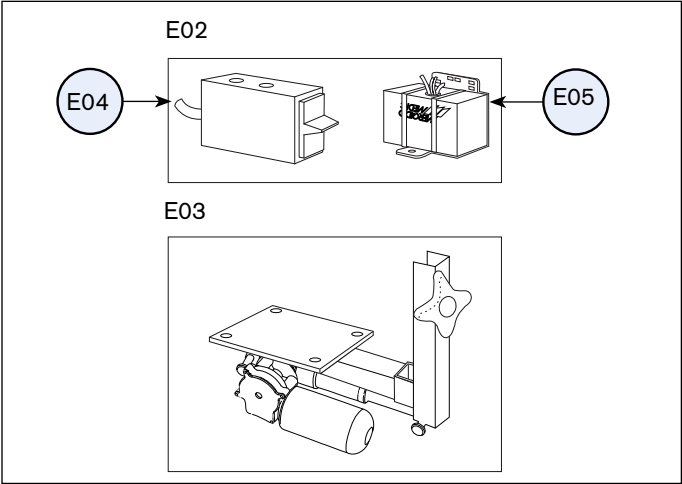

F Ryggstolpe för Elygg
Back pole for electric backrest

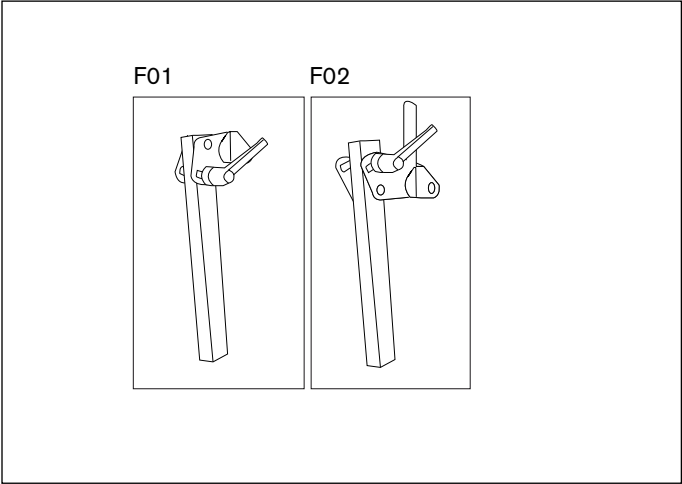

G Batteri och laddare
Battery and charger

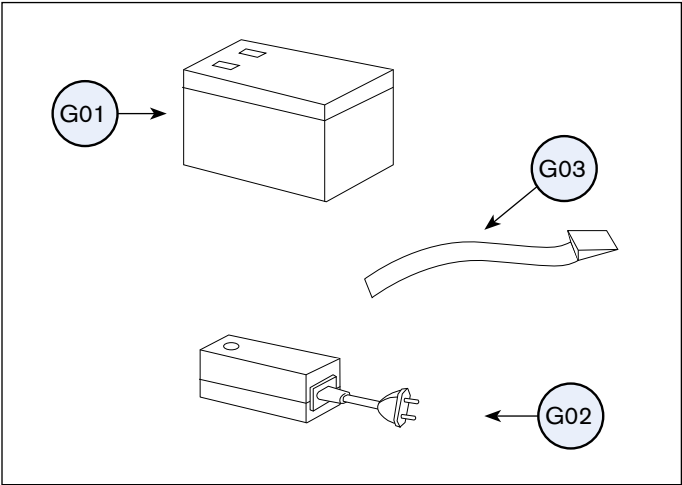

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	803277	Eldon+Reläsats f ryggvinkel inkl manöverbox <i>Electric kit + relaycard for backrest angling incl. maneuverbox</i>
E02	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 PLUS <i>Relaycardkit back angle compl. incl. operatorbox 9000 PLUS</i>
E03	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000 <i>Electric kit for backrest angle for relaycard REAL 900</i>
E04	803035	Manöverbox PLUS f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort <i>Maneuverbox PLUS f back/seat angle cpl.with cabling f relaycard</i>
E05	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp <i>Relaycard current limitingseat/back angle 16 amps</i>


F01	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg <i>Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back</i>
F02	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg <i>Back pole Standard ErgoMedic High back</i>

G01	801135	Batteri REAL Elstol 12 V 3.4 Ah f Br 33-39 <i>Battery 12V 3.4Ah</i>
G02	1 802289	Batteriladdare REAL 9000 12V <i>Battery charger 12V REAL 9000 12V</i>
	2 802935	Batteriladdare REAL 9000 12V för England <i>Battery charger 12V for UK</i>
G03	801258	Fästband Batteri längd 700 mm bredd 18mm för Elstol <i>Cord for battery length 700 mm width 18 mm</i>


Stycklista - EL laddbox

Part list - Chargerbox

A Elektronik för upp & ner för laddbox
Electronics for upp & down with chagerbox

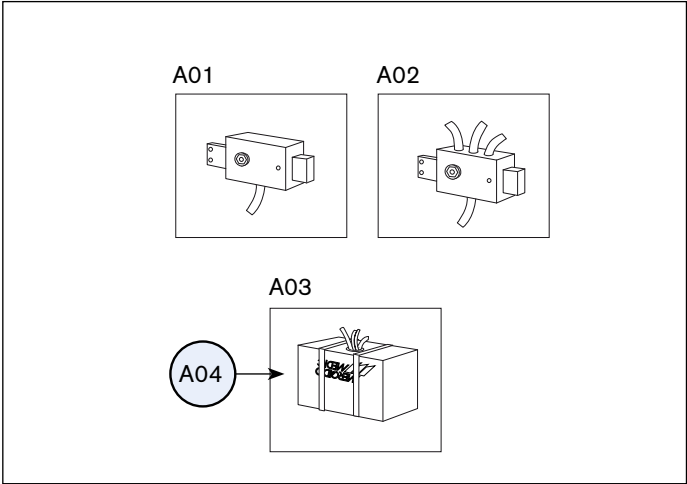

B Manöver alternativ
Maneuver alternative

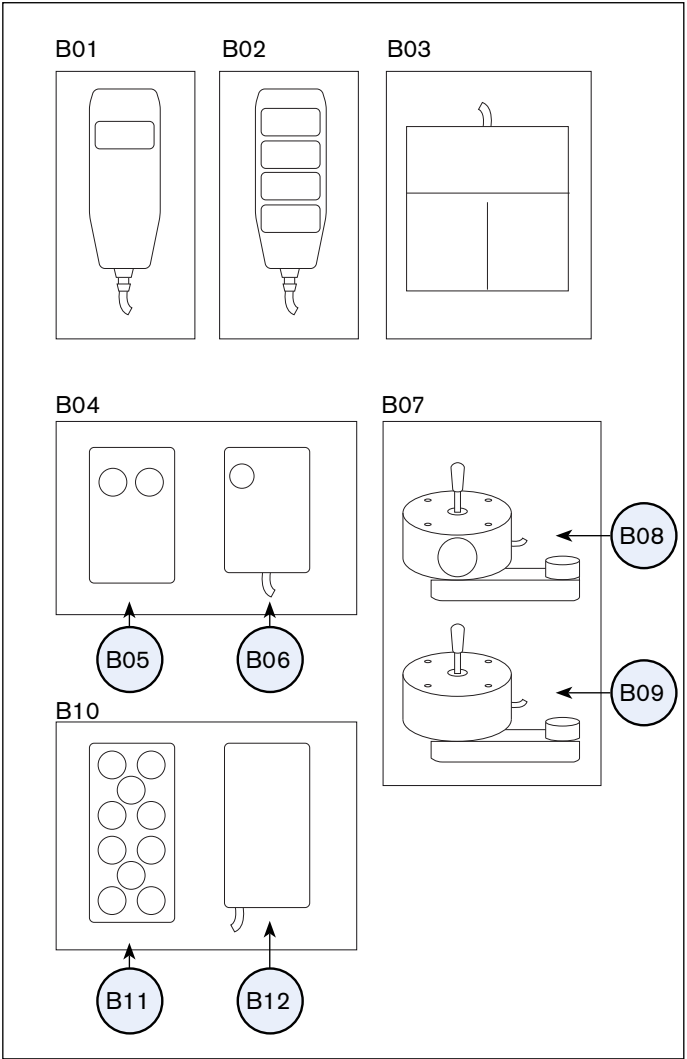


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803029	Laddbox Hand Fjärr Joystick upp/ner <i>Chargerbox handcontrol 1-function up/down</i>
A02	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi <i>Chargerbox handcontrol Multi</i>
A03	802748	Reläkortssats upp/ner+ladd 9000 kpl exkl laddbox <i>Relaycardkit up/down + charger 9000 compl. excl. chargerbox</i>
A04	802546	Reläkort strömbegränsning upp/ner REAL 9000 <i>Relaycard current limiting up/down REAL 9000</i>

B01	802739	Handkontroll 1-funktion u/n m sladd o kontakt för reläkort <i>Handcontrol 1-function up/downcord and contact for relaycard</i>
B02	802740	Handkontroll 4-funktion multi m sladd o kontakt för reläkort <i>Handcontrol 4-function multicord and contact for relaycard</i>
B03	802688	Fotkontakt elreglage h/s 9000 f REAL 9000 EI för reläkort <i>Foot pedal for electric raising/lowering</i>
B04	802686	Sladdlös höjdregering för REAL 9000 EI för reläkort <i>Remote control Kit Up/Down</i>
B05	801806	Fjärrkontroll Manöverdosa f Upp/Ner IR 9000 EI <i>Remote control Up/Down</i>
B06	802737	Fjärrkontroll Mottagare f Upp/Ner IR 9000 EI för reläkort <i>Remote control Receiver Up/Down</i>
B07	802743	Joystick 3-funktioner + broms m kontakt för reläkort <i>Joystick 3 function + brake</i>
B08	802742	Joystick 2-funktioner + broms m kontakt för reläkort <i>Joystick 2 function + brake</i>
B09	802741	Joystick 2-funktioner ej broms m kontakt för reläkort <i>Joystick 2 function no brake</i>
B10	802687	Sladdlös multiregering för REAL 9000 EI för reläkort <i>Remote control Kit Multi</i>
B11	801808	Fjärrkontroll Manöverdosa för Multi IR 9000 EI <i>Remote control Transmitt Multi</i>
B12	802738	Fjärrkontroll Mottagare för Multi IR 9000 EI för reläkort <i>Remote control Receiver Multi</i>


Stycklista - EL laddbox

Part list - Chargerbox


C01 Elektronik för ryggvinkling för laddbox
Electronics for backrest angle with chagerbox

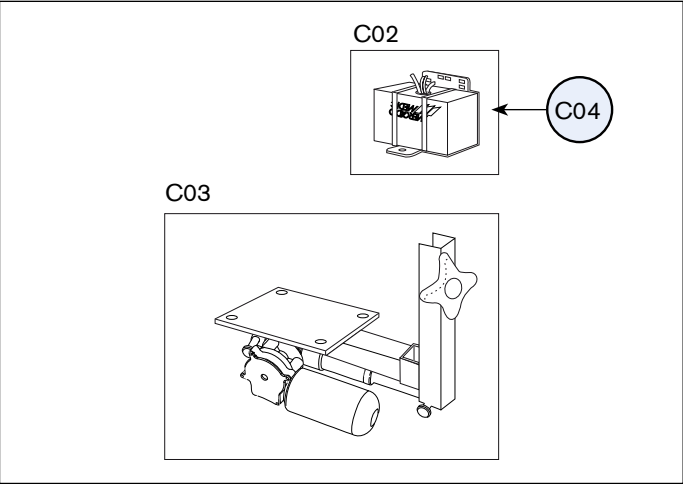

D01 Elektronik för sitsvinkling för laddbox
Electronics for seat angle adjustment with chagerbox

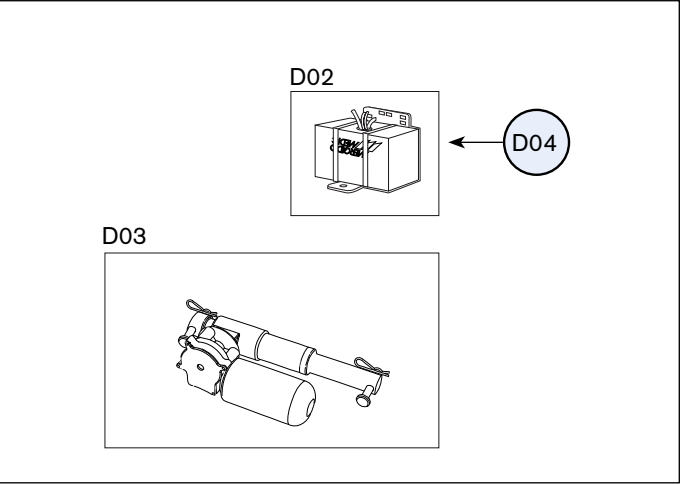

E01 Elektronik för broms för laddbox
Electronics for brake with chagerbox

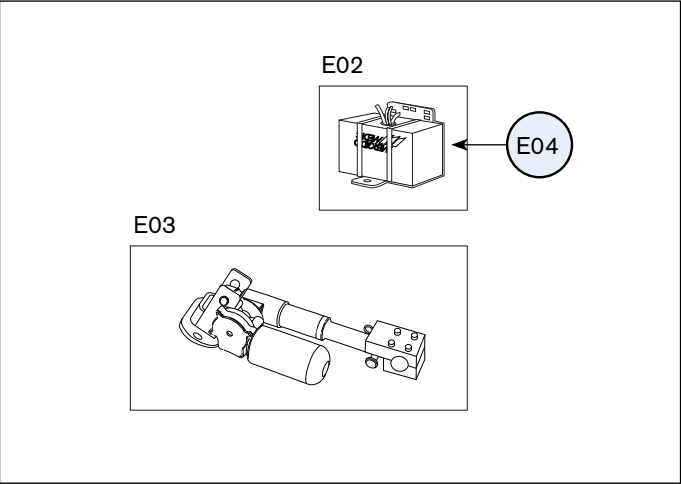

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01	803274	Eldon+Reläsats för ryggvinkel exkl laddbox <i>Electric kit + relaycard for backrest angling excl. chargerbox</i>
C02	802750	Reläkortssats ryggvinkel komplett exkl laddbox <i>Relaycardkit back angle compl. excluding chargerbox</i>
C03	802731	Eldonssats för ryggvinkel för reläkort Real 9000 <i>Electric kit for backrest angle</i>
C04	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp <i>Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps</i>
D01	803272	Eldon+Reläsats f sitsvinkling exkl laddbox <i>Electric kit + relaycard for electric seat angling excl. chargerbox</i>
D02	802749	Reläkortssats sitsvinkel kpl exkl laddbox <i>Relaycardkit seatangle compl. excluding chargerbox</i>
D03	802730	Eldonssats för sitsvinkel <i>Electric kit for seat angle adjustment</i>
D04	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp <i>Relaycard current limitingseat/back angle 16 amps</i>
E01	803858	Eldon+Reläsats f broms f Spider exkl laddbox <i>Electric kit + relaycard for el. brake f Spider excl. chagerbox</i>
E02	802751	Reläkortssats broms kpl exkl laddbox <i>Relaycardkit brake complete excluding chargerbox</i>
E03	803855	Eldonssats f elbroms f Spider <i>Electric kit for brake for Spider</i>
E04	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp <i>Relaycard current limitingbrake 8 ampere</i>



MERCADO SVERIGE

Mercado Medic AB

Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax

Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet

Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se



MERCADO NETHERLANDS

Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde

Phone & Fax

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet

Email info@mercado-medic.nl
Internet www.mercado-medic.nl



MERCADO UK

Mercado Medic UK Ltd

PO Box 4818
Warwick, CV34 9GB

Phone & Fax

Ph +44-(0)844 561 6874
Fax +44-(0)844 561 6875

Email & Internet

Email info@mercado-medic.co.uk
Internet www.mercado-medic.co.uk



MERCADO NORGE

Handicare

Postboks 5043
1503 Moss

Telefon & Telefaks

Telefon: 69 24 44 00
Telefaks: 69 24 45 00

Epost & internett

Epost: post@handicare.no
Internett: www.handicare.no