

Syrgashållare 2l

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804686
Ändrad: 200316
Giltig från: 1601

Artikel

Syrgashållare för 2L inkl fäste
Syrgashållare för 2.5L inkl fäste
Syrgashållare för 5L inkl fäste

Art.nr.

804016
804017
804018

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 3 mm
Insexnyckel 4 mm
Torx TX20

Utförande

Skruva fast haken på hållaren enligt bild nedan (A).

Skruva fast fästet enligt bild nedan (B).

Haka fast syrgashållaren i fästet (C) och säkra med skruven på fästets sida (D).

