

# Syrgashållare 2l

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804686  
Ändrad: 1701  
Giltig från: 1601

## Artikel

Syrgashållare för 2L inkl fäste

## Art.nr.

804016

## Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 3 mm  
Insexnyckel 4 mm  
Torx TX20

## Utförande

Skruva fast haken på hållaren enligt bild nedan (A).

Skruva fast fästet enligt bild nedan (B).

Haka fast syrgashållaren i fästet (C) och säkra med skruven på fästets sida (D).

