

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM


i REAL® 9000-serien

Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd. Stolen är avsedd för inomhusbruk och får ej användas utomhus. Stolen skall ej utsättas för stark kyla, hög värme, långvarig solbelysning eller annan strålning. Stolen skall ej heller utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. För bibehållen CE-märkning får inga anpassningar eller förändringar utföras utan Mercado Medic AB's godkännande. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom detta dokument innan åtgärder utförs.

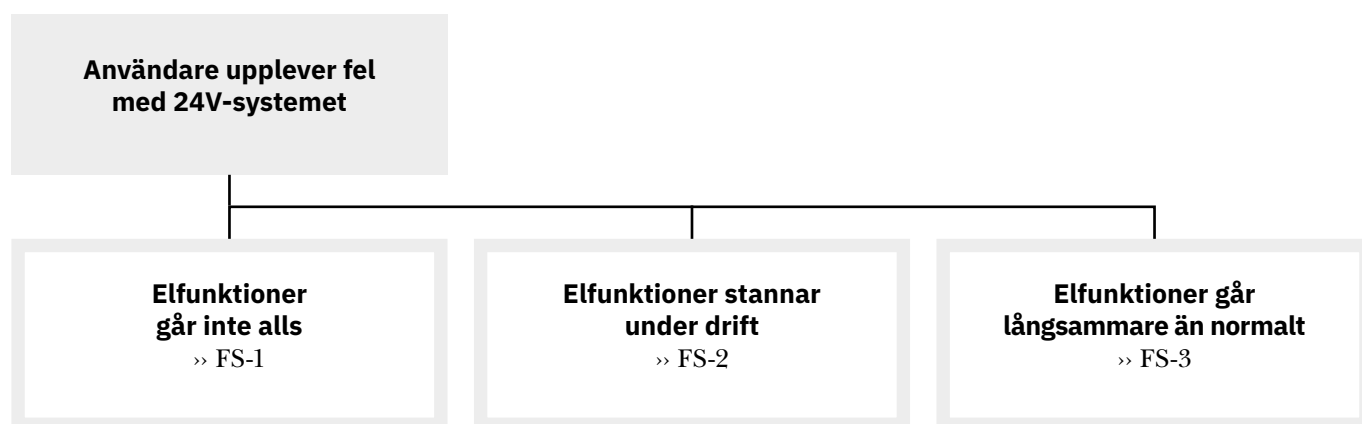

Symbolförklaring

Beskrivning av steg i felsökningsprocessen.

Hänvisning till annat stycke eller bilaga (här hänvisas FS-2).

Lösning på problem/felsökning.

Uppåt

» FS-2

Ja



Mercado Medic AB

Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax

Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Web

Email info@mercado.se
Web www.mercado.se

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM


Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

i REAL® 9000-serien

» FS-1.1

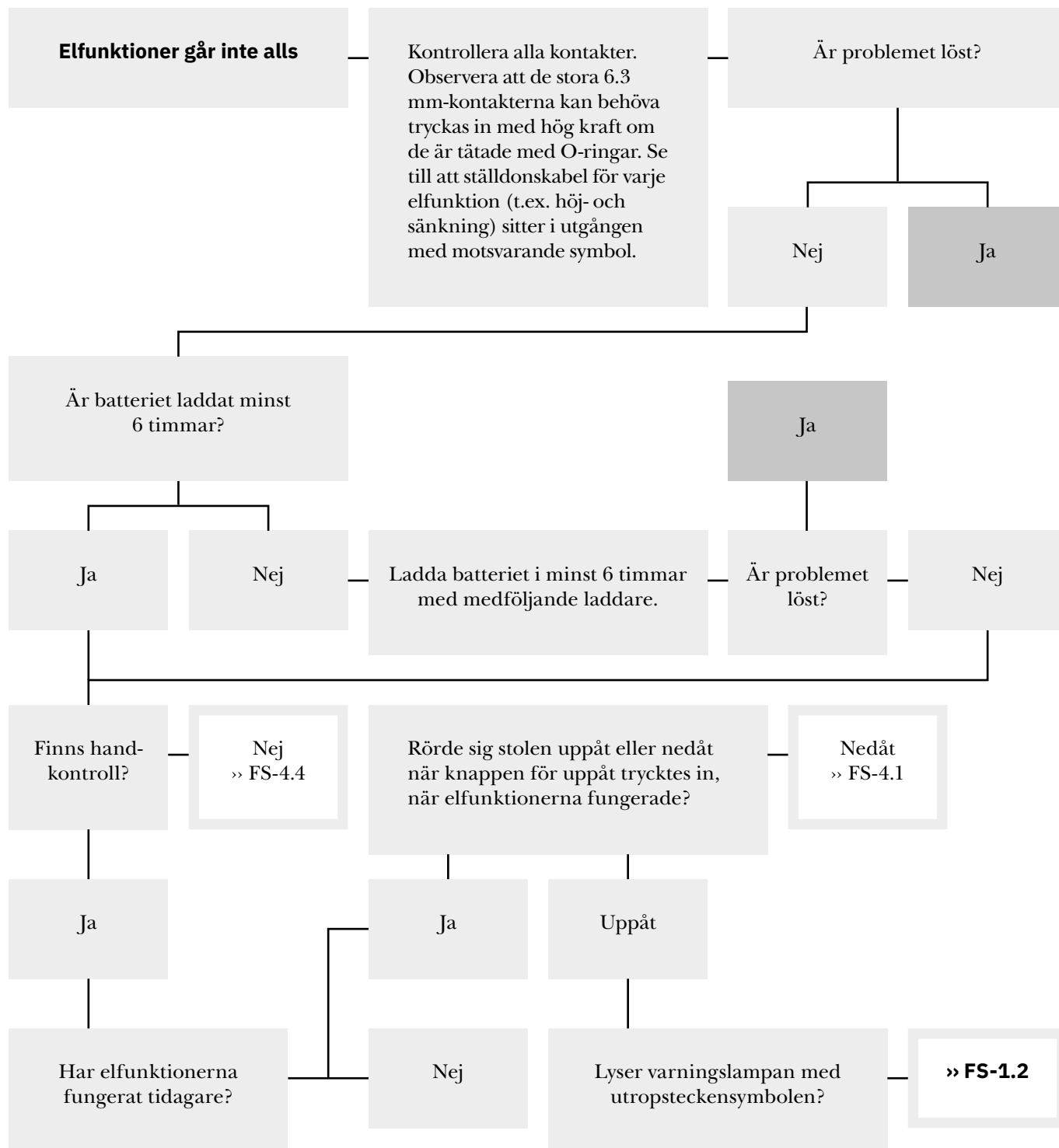

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM


i REAL® 9000-serien

» FS-1.2

Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

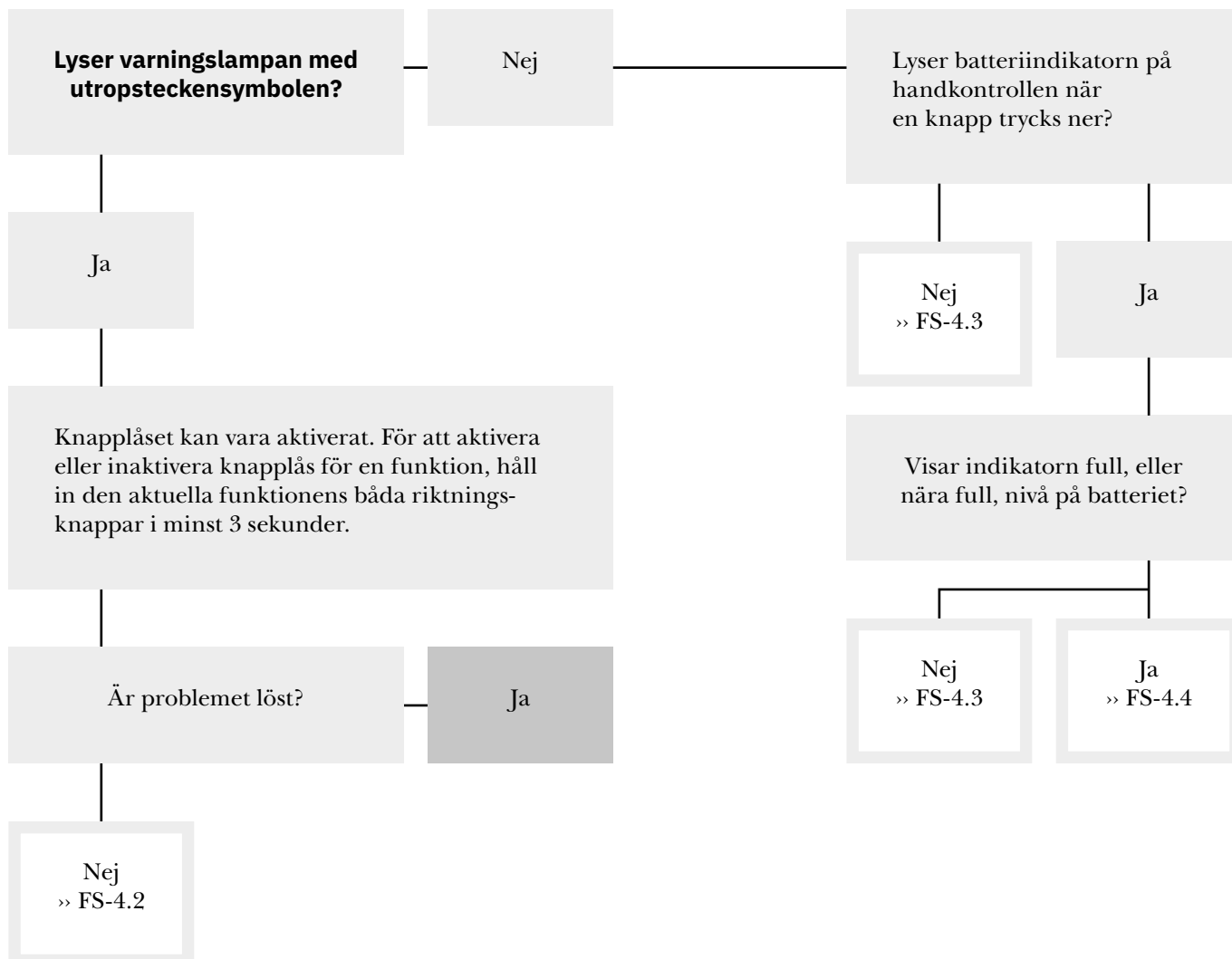

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM


Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

i REAL® 9000-serien

» FS-2

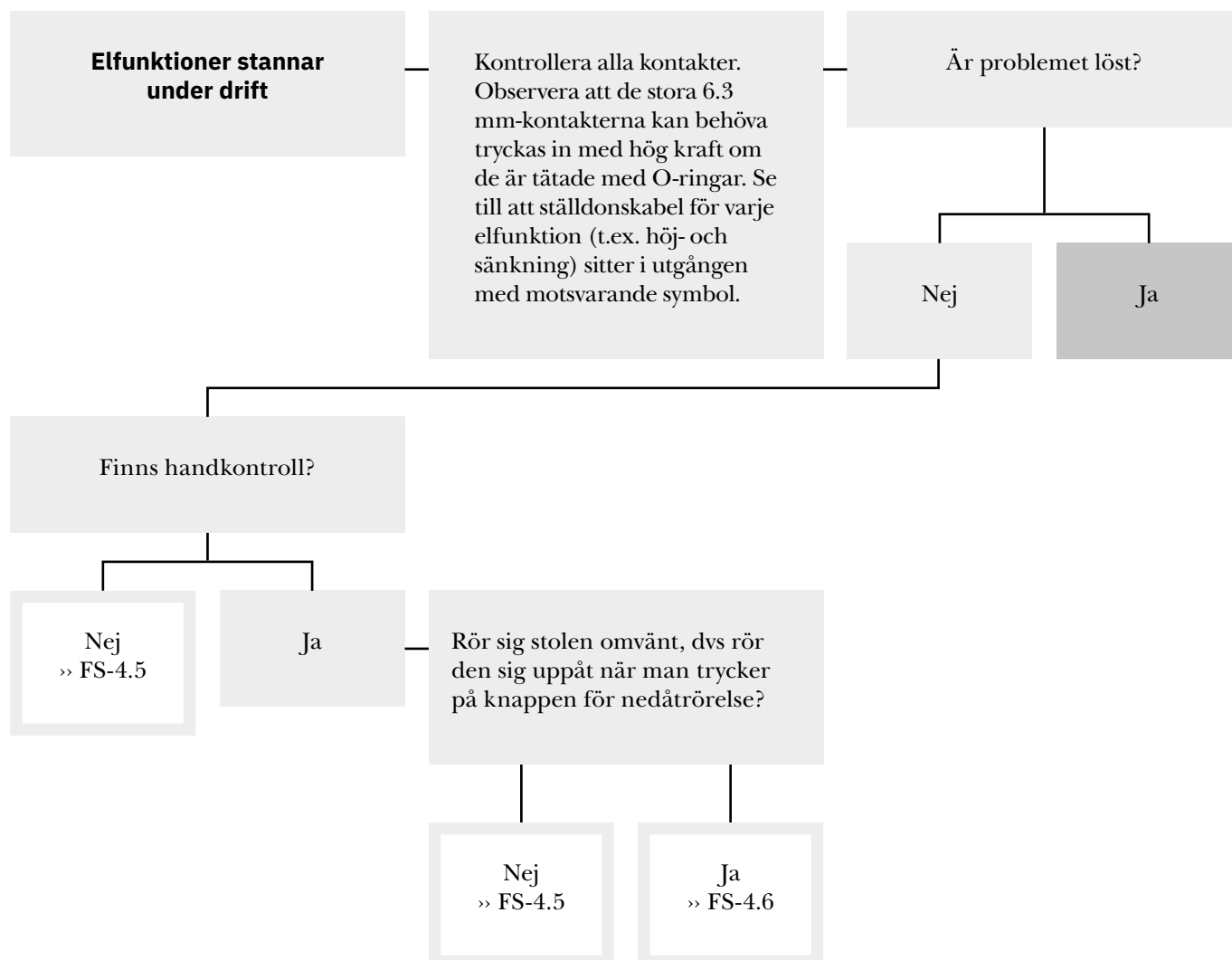

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM


i REAL® 9000-serien

» FS-3

Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

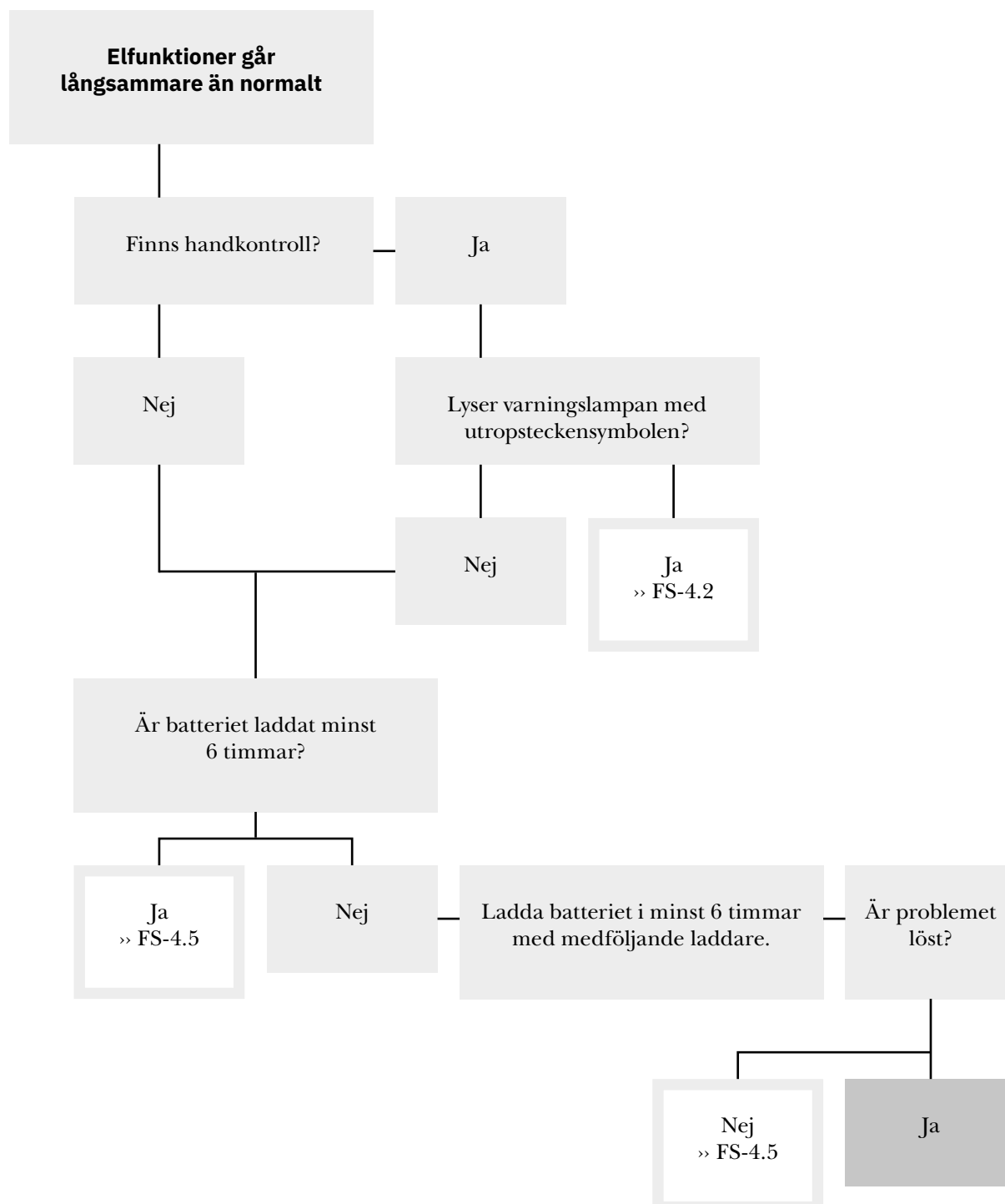

FELSÖKNING

24V ELSYSTEM

i REAL® 9000-serien

» FS-4

Art.nr: 804996

Skapat: 1809

Rev: 1.0

- FS-4.1** | Det finns ett polaritetsfel på ställdonskablagen på stolen. Detta har medfört att strömgränserna är omvända och ställdonet har sannolikt fastnat i ett läge på grund av detta. Kontakta Mercado Medic för ytterligare assistans.
- FS-4.2** | Ett internt fel som måste åtgärdas av tillverkaren har stängt av styrsystemet.
- FS-4.3** | Batteri, styrelektronik och/eller handkontroll är sannolikt skadade.
- FS-4.4** | Ställdon, kablage och styrelektronik måste kontrolleras av tekniker. Omvänd polaritet på kablage till ställdon kan orsaka driftstopp då styrsystemet då ger fel strömgränser för respektive riktning för ställdonet.
- FS-4.5** | Ställdon, kablage och styrelektronik måste kontrolleras av tekniker.
- FS-4.6** | Det finns ett polaritetsfel på ställdonskablagen på stolen. Detta har medfört att strömgränserna är omvända och ställdonet har sannolikt fastnat i ett läge på grund av detta. Kontakta Mercado Medic för ytterligare assistans.