


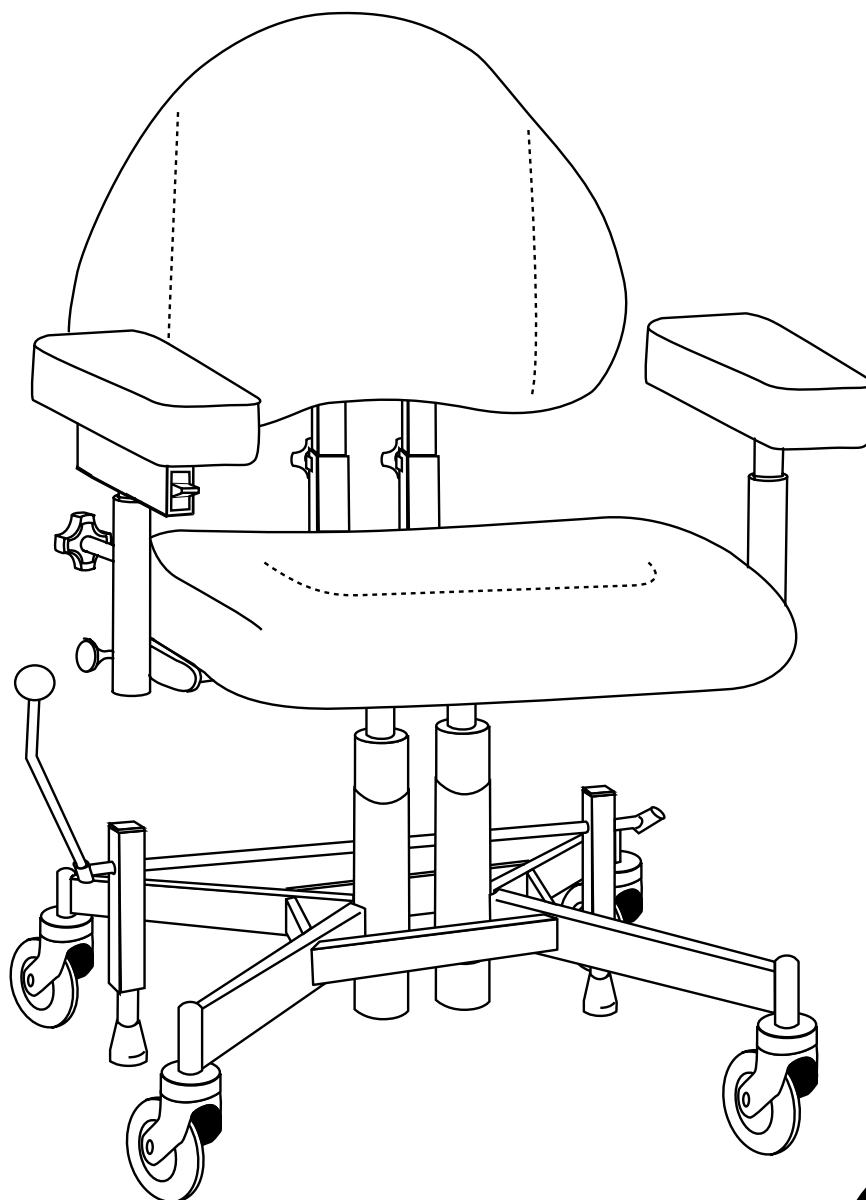

REAL® 9200 24V 1G – SPRÄNGSKISS
REAL® 9200 24V 1G – EXPLODED DIAGRAM

Dok.nr/Doc.no 19-05767
Revision/Revision 05
Ändrad/Changed 2025-06-24
Giltig från/Valid from 2016-11-01

P VERSION 005



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email service@mercado.se
Internet www.mercado.se


Innehållsförteckning

Table of content

Detalj	Sida
<i>Detail</i>	<i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER/UPHOLSTERY AND COLOUR CODES	5
SITTPLATTA/SEAT	6
SITTKRYSS/SEAT FRAME	8
LYFTOMATER/HEIGHT ADJUSTMENT	9
REGLAGE/CONTROLS	10
RYGGPLATTA/BACKREST	11
RYGGMEKANISM/BACKREST MECHANISM	12
ARMSTÖD/ARMRESTS	13
ARMSTÖDSMEKANISMER/ARMREST MECHANISMS	14
STATIV/BASE	15
HJUL/CASTORS	16
BROMSAR/BRAKES	18
ELEKTRONIK/ELECTRONICS	19

Klädselar och färgkoder

Upholstery and colour codes

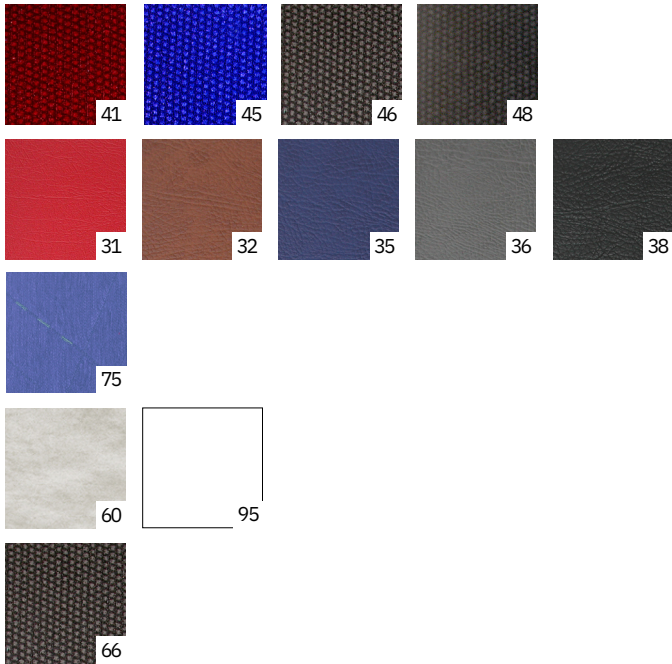

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/Plush

41 Vinröd/Bordeaux 45 Realblå/Royal blue
46 Grå/Grey 48 Svart/Black

Konstläder/Skai

31 Röd/Red 32 Brun/Brown
35 Blå/Blue 36 Grå/Grey
38 Svart/Black

Väv mönstrad Vuxen/Patterned fabric, Adult

75 Blå/75 Blue

Alternativ klädsel/Alternative covering

60 Hygienväv/Hygiene fabric
95 Utan klädsel/Without clothing

Överdragsklädsel/Covering

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/
Incontinence cover, grey plastic-coated terry

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"
EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffra 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)

Siffra 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffra 5-6 = Storlek

Digit 5-6 = Size

Siffra 7 = Material (plysch, konstläder etc)

Digit 7 = Material (plush, skai etc.)

Siffra 8 = Färg

Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<u>A</u> adapter	Adapter	LD	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider	Grenkil
AR	<u>A</u> rm <u>r</u> est	Armstöd	LDC	<u>L</u> eg <u>d</u> ivider <u>c</u> over	Grenkil överdrag
ARM	<u>A</u> rm <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Armstödsmekanism	LS	<u>L</u> eg <u>s</u> upport	Benstöd
AS	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport	Amputationsstöd	NS	<u>N</u> eck <u>s</u> upport	Nackstöd
ASC	<u>A</u> mpu <u>t</u> ation <u>s</u> upport <u>c</u> over	Amputationsstöds överdrag	NSC	<u>N</u> eck <u>s</u> upport <u>c</u> over	Nackstöd överdrag
BD	<u>B</u> ra <u>k</u> e <u>d</u> evice	Handbroms	PB	<u>P</u> ush <u>b</u> ar	Körbygel
BE	<u>B</u> ase	Stativ	RC	<u>R</u> eum <u>a</u> tic <u>c</u> ross	Reumatikerkryss
BEA	<u>B</u> reak <u>a</u> ccessory	Bromstillbehör	SA	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>m</u> echanism	Sitsvinkel
BEX	<u>B</u> ase <u>e</u> xtender	Stativförlängare	SAR	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>r</u> egulation	Sitsvinklings reglage
BR	<u>B</u> ack <u>r</u> est	Rygg	SAP	<u>S</u> eat <u>a</u> ngle <u>p</u> lacement	Sitsvinklings placering
BRC	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>c</u> over	Rygg överdrag	SH	<u>S</u> eat <u>h</u> eight	Sitthöjd
BRM	<u>B</u> ack <u>r</u> est <u>m</u> echanism	Ryggmekanism	SS	<u>S</u> ide <u>s</u> upport	Sidostöd
CS	<u>C</u> alf <u>s</u> upport	Vadstöd	SSC	<u>S</u> ide <u>s</u> upport <u>c</u> over	Sidostöds överdrag
CSC	<u>C</u> alf <u>s</u> upport <u>c</u> over	Vadstöds överdrag	ST	<u>S</u> eat	Sits
FR	<u>F</u> oot <u>r</u> ing	Fotring	STC	<u>S</u> eat <u>c</u> over	Sits överdrag
HB	<u>H</u> ip <u>b</u> elt	Höftbälte	TA	<u>T</u> able	Bord
KS	<u>K</u> nee <u>s</u> upport	Knästopp	TS	<u>T</u> runk <u>s</u> upport	Bålstöd
KSC	<u>K</u> nee <u>s</u> upport <u>c</u> over	Knästopps överdrag	TSC	<u>T</u> runk <u>s</u> upport <u>c</u> over	Bålstöd överdrag
LB	<u>L</u> arge <u>b</u> all	Stor kula	WE	<u>W</u> heel	Hjul


Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat

A01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

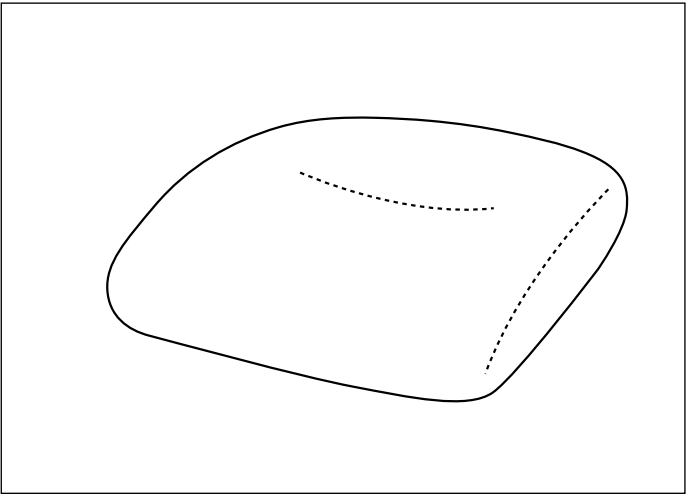

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST406046	Sits Twin 72x50 Plysch Grå Seat Twin 72x50 Plush Grey
2	ST406146	Sits Twin 72x45 Plysch Grå Seat Twin 72x45 Plush Grey
3	ST406246	Sits Twin 72x40 Plysch Grå Seat Twin 72x40 Plush Grey
4	ST406346	Sits Twin 62x50 Plysch Grå Seat Twin 62x50 Plush Grey
5	ST406446	Sits Twin 62x45 Plysch Grå Seat Twin 62x45 Plush Grey
6	ST406546	Sits Twin 62x40 Plysch Grå Seat Twin 62x40 Plush Grey
7	ST406646	Sits Twin 52x50 Plysch Grå Seat Twin 52x50 Plush Grey
8	ST406746	Sits Twin 52x45 Plysch Grå Seat Twin 52x45 Plush Grey
9	ST406846	Sits Twin 52x40 Plysch Grå Seat Twin 52x40 Plush Grey

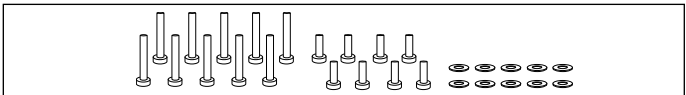


D01	803269	Skrivsats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	--

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

B01 Sittplatta endast träplatta
Seat woodenplate whitout fabric

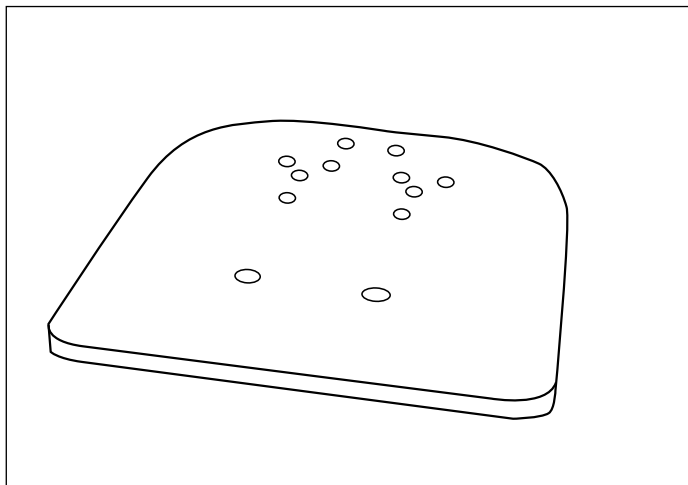


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
B01 1	ST406090	Sits Twin 72x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x50 Woodenplate Without fabric
2	ST406190	Sits Twin 72x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x45 Woodenplate Without fabric
3	ST406290	Sits Twin 72x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x40 Woodenplate Without fabric
4	ST406390	Sits Twin 62x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x50 Woodenplate Without fabric
5	ST406490	Sits Twin 62x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x45 Woodenplate Without fabric
6	ST406590	Sits Twin 62x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x40 Woodenplate Without fabric
7	ST406690	Sits Twin 52x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x50 Woodenplate Without fabric
8	ST406790	Sits Twin 52x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x45 Woodenplate Without fabric
9	ST406890	Sits Twin 52x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x40 Woodenplate Without fabric

C01 Sittplatta Träplatta med antiglid
Seat woodenplate with antiglide

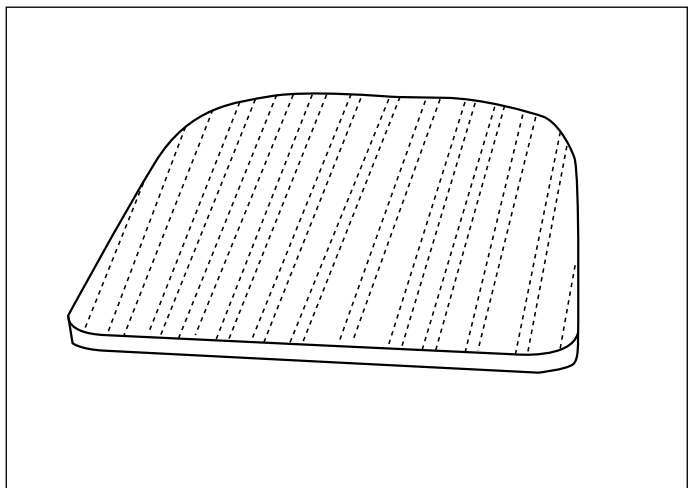

C01 1	ST406061	Sits Träplatta Twin 72x50 Antiglid Seat Twin 72x50 Antiglide
2	ST406161	Sits Träplatta Twin 72x45 Antiglid Seat Twin 72x45 Antiglide
3	ST406261	Sits Träplatta Twin 72x40 Antiglid Seat Twin 72x40 Antiglide
4	ST406361	Sits Träplatta Twin 62x50 Antiglid Seat Twin 62x50 Antiglide
5	ST406461	Sits Träplatta Twin 62x45 Antiglid Seat Twin 62x45 Antiglide
6	ST406561	Sits Träplatta Twin 62x40 Antiglid Seat Twin 62x40 Antiglide
7	ST406661	Sits Träplatta Twin 52x50 Antiglid Seat Twin 52x50 Antiglide
8	ST406761	Sits Träplatta Twin 52x45 Antiglid Seat Twin 52x45 Antiglide
9	ST406861	Sits Träplatta Twin 52x40 Antiglid Seat Twin 52x40 Antiglide

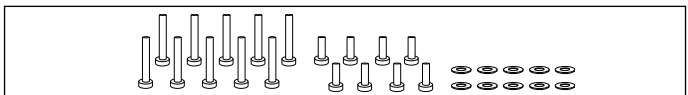


D01	803269	Skrusats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Sittkryss


Part list - Seatframe

A01 Sittkryss Twin
 Seatframe Twin

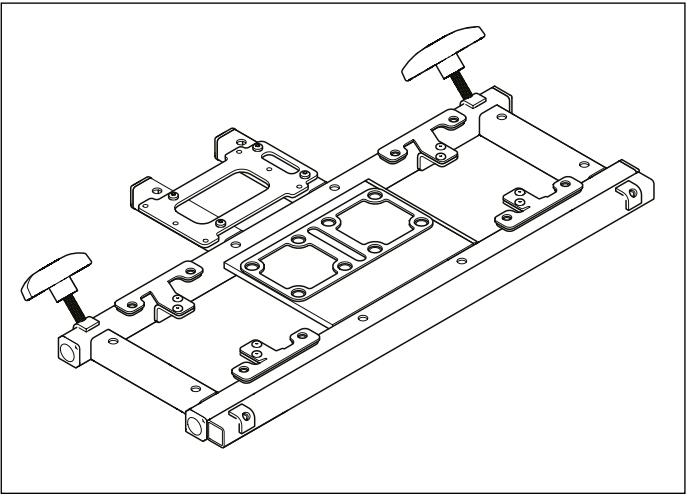

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	804830	Sittkryss 9200 Twin Br52-61 24V Seatframe 9200 Twin 52-61cm 24V
2	804831	Sittkryss 9200 Twin Br62-71 24V Seatframe 9200 Twin 62-71cm 24V
3	804832	Sittkryss 9200 Twin Br72-81 24V Seatframe 9200 Twin 72-81cm 24V

B Infästningar för sittkryss Twin
 Attachment brackets for Seatframe Twin

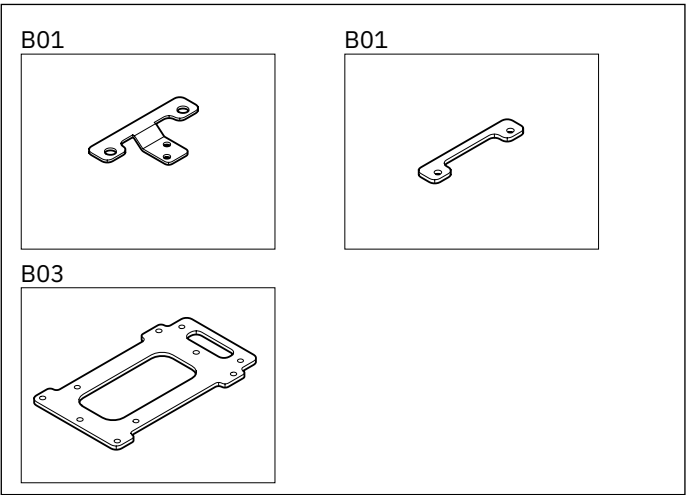


B01	805166	Fästplatta batteri (TWIN 24V) Mounting plate battery (TWIN 24V)
B02	805167	Gängplatta batteri (TWIN 24V) Threaded plate battery (TWIN 24V)
B03	805168	Fästplatta Kontrollbox (TWIN 24V) Mounting plate control box (TWIN 24V)

Stycklista - Lyftomater


Part list - Electric & Gas lift height adjustment

A01 Ellyftomat
Electric height adjustment

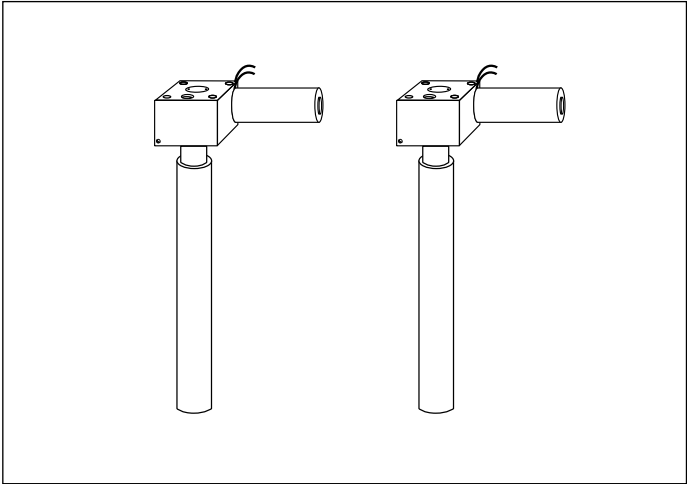


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	804655	Ellyftomater 20cm Twin 24V (Par) Electric height adjustment 20 cm 24V 1G (Pair)
2	804654	Ellyftomater 28cm Twin 24V (Par) Electric height adjustment 28 cm 24V 1G (Pair)

B01 Fixlyftomat
Gas lift

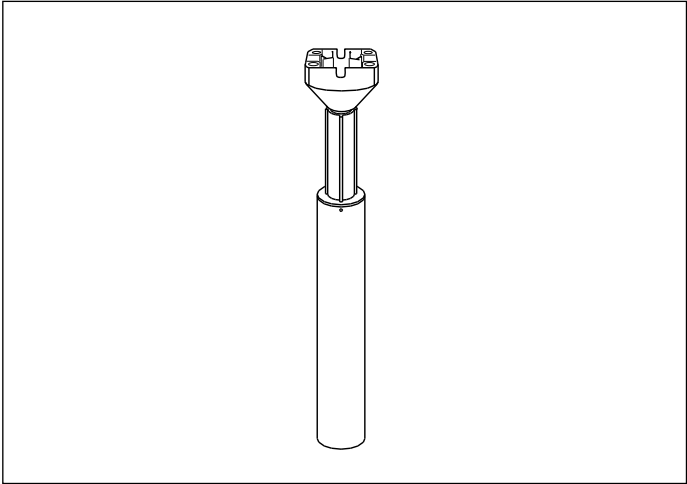

B01 1	805620	Fixlyftomat 140 mm 55-90kg Med alufäste TWIN Fixed gas lift 140mm 55-90kg aluminium bracket TWIN
2	805621	Fixlyftomat 140 mm 90-140kg Med alufäste TWIN Fixed gas lift 140mm 90-140kg aluminium bracket TWIN
3	805622	Fixlyftomat 200 mm 55-90kg Med alufäste TWIN Fixed gas lift 200mm 55-90kg aluminium bracket TWIN
4	805623	Fixlyftomat 200 mm 90-140kg Med alufäste TWIN Fixed gas lift 200mm 90-140kg aluminium bracket TWIN

C01 Skruv sats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

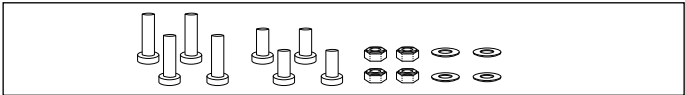


C01	803268	Skrusats f montering av manuell eller elektrisk lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Reglage för sitthöjd

Part list - Controls for seat height


A01	Reglage för sitthöjd f manuell Twin Controls for seat height for manual Twin	Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
A01			803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande Seat height control under armr for fixed seat angle,Plus

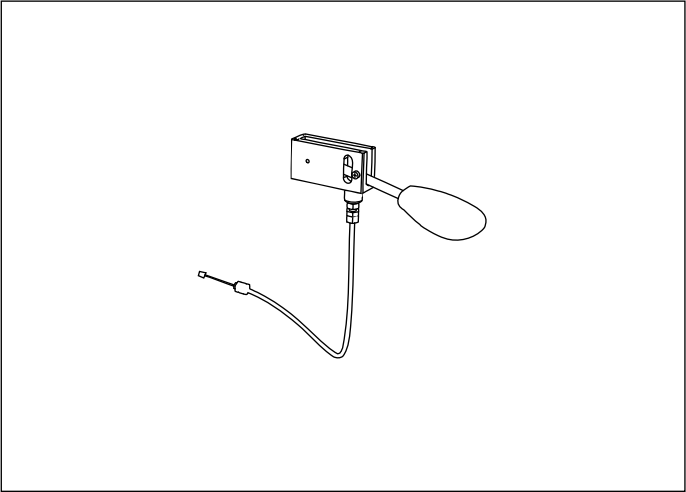


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


A01 Ryggar Twin
Backrest Twin

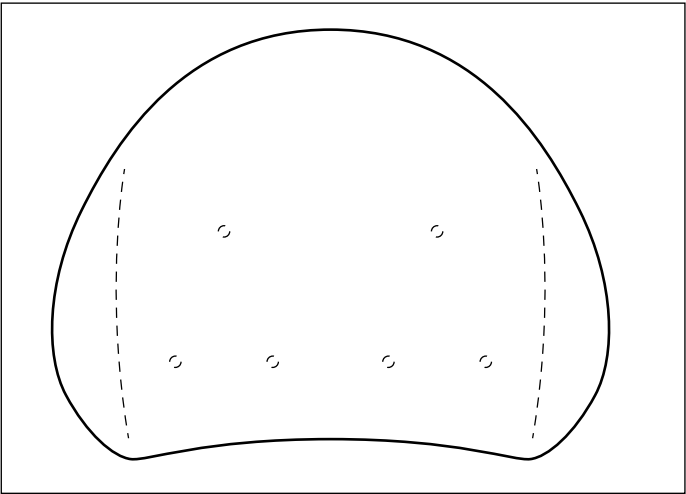

B01 Ryggar Twin utan stoppning
Backrest Twin Wooden plate without fabric

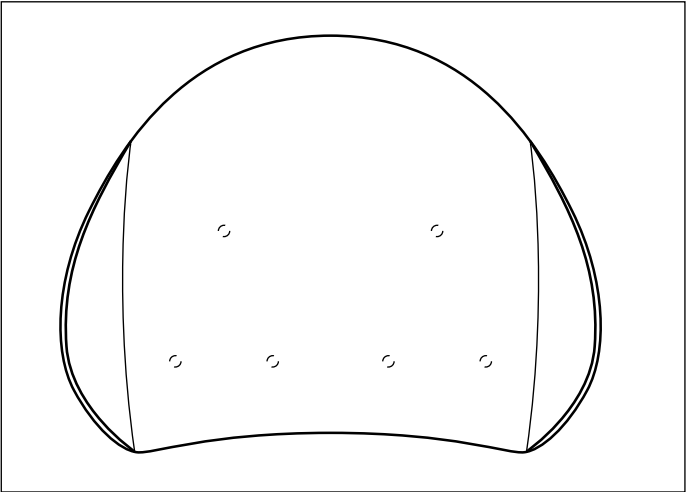

C01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

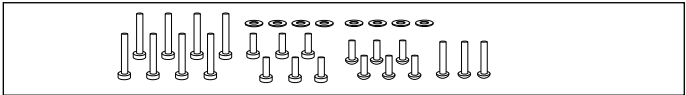


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BR500646 Rygg Twin 66x43 Plysch Grå Backrest Twin 66x43 Plush Grey
	2	BR500846 Rygg Twin 56x43 Plysch Grå Backrest Twin 56x43 Plush Grey
	3	BR501046 Rygg Twin 46x43 Plysch Grå Backrest Twin 46x43 Plush Grey
B01	1	BR500690 Rygg Twin 66x43 Träplatta utan stoppning Backrest Twin 66x43 Wooden plate Without fabric
	2	BR500890 Rygg Twin 56x43 Träplatta utan stoppning Backrest Twin 56x43 Wooden plate Without fabric
	3	BR501090 Rygg Twin 46x43 Träplatta utan stoppning Backrest Twin 46x43 Wooden plate Without fabric
C01	803270	Skrivsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism


Part list - Backrest mechanism

A01 Ryggmekanism Medic
Backrest mechanism Medic

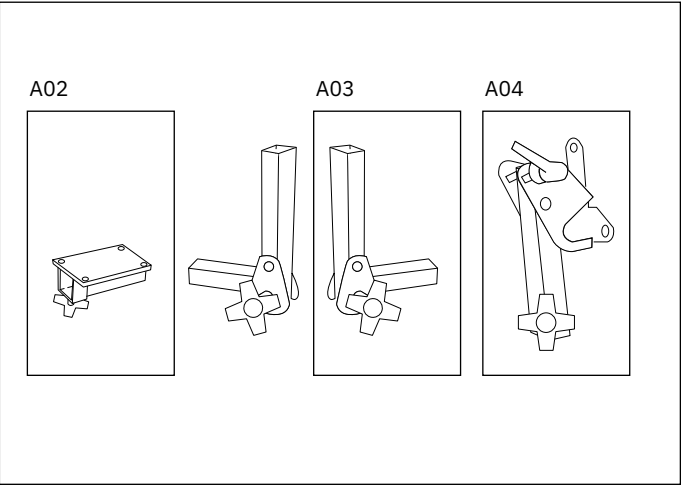

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BRM5800	Medic ryggmek TWIN Dj155/H240mm Regl H+V bak, Par Medic backrestmech Twin De155/R240 mm Regl R+L back
2	BRM5900	Medic ryggmek TWIN Dj155/H340mm Regl H+V bak, Par Medic backrestmech Twin De155/R340 mm Regl R+L back
A02	800837	Ryggfällning fäste Medic Backrestmechanism Medic hold Classic/ErgoM
A03 1	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Backrestmech. Medic 155 mm L 240 mm
2	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Backrestmech. Medic 155 mm XL 340 mm
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Back pole Medic/Comfort Ergo M High back

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

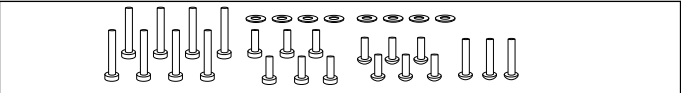


B01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista – Armstöd

Part list – Armrests


A01 ErgoMedic för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic for all armrest mechanisms

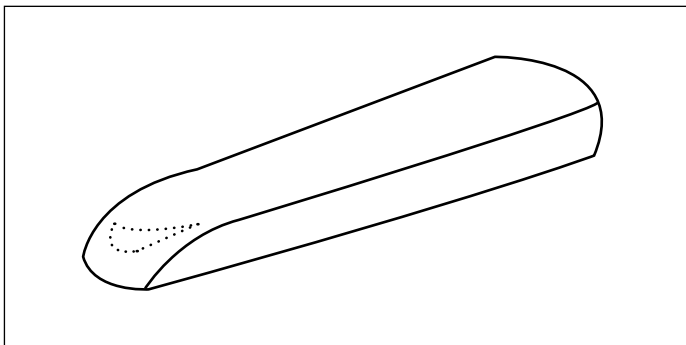


B01 Extra Soft för samtliga armstödsmekanismer
Extra Soft for all armrest mechanisms

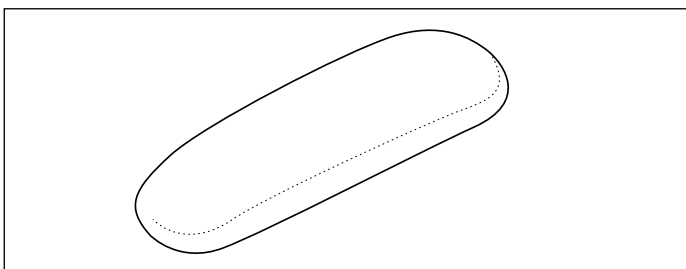


C Mobil för samtliga armstödsmekanismer
Mobil for all armrest mechanisms

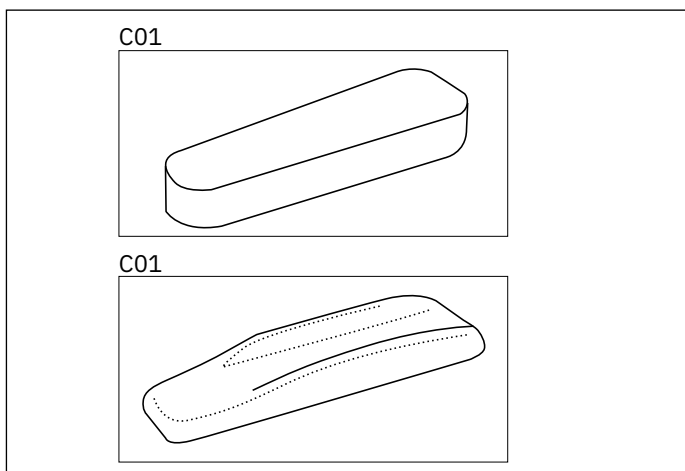

D ErgoMedic PLUS för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic PLUS for all armrest mechanisms

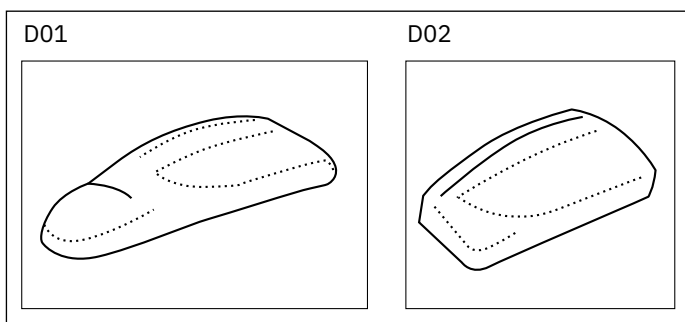

E01 Skruvsats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly

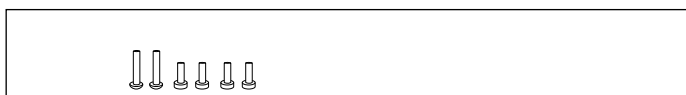


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

A01	1	AR103038	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart
		240380	<i>Armrest Classic 35 cm Skai Black</i>
	2	AR102038	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart
		240381	<i>Armrest Classic 30 cm Skai</i>
Black	3	AR101038	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart
		240382	<i>Armrest Classic 25 cm Skai</i>
Black	4	AR104038	Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart
		240383	<i>Armrest Classic 40 cm Skai</i>
Black	5	AR112038	Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart
		242381	<i>Armrest Mini 30 cm Skai Black</i>
	6	AR111038	Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart
		242382	<i>Armrest Mini 25 cm Skai Black</i>
B01	1	AR513038	Armstöd platta extra soft 35 cm Konstläder Svart
			<i>Armrest Extra soft 35 cm Skai Black</i>
	2	AR512038	Armstöd platta extra soft 30 cm Konstläder Svart
			<i>Armrest Extra soft 30 cm Skai</i>
Black	3	AR511038	Armstöd platta extra soft 25 cm Konstläder Svart
			<i>Armrest Extra soft 25 cm Skai Black</i>
C01	1	AR303038	Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart
		245380	<i>Armrest Mobile 35 cm Skai Black</i>
	2	AR302038	Armstöd platta Mobil 30 cm Konstläder Svart
		245381	<i>Armrest Mobile 30 cm Skai Black</i>
	3	AR301038	Armstöd platta Mobil 25 cm Konstläder Svart
		245382	<i>Armrest Mobile 25 cm Skai Black</i>
	4	AR304038	Armstöd platta Mobil 40 cm Konstläder Svart
		245383	<i>Armrest Mobile 40 cm Skai Black</i>
C02		AR406038	Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm Konstläder Svart
		244382	<i>Armrest Hemiplegi 45x12 cm Skai Black</i>
D01	1	AR205138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 42 cm Konstläder Svart
		243380	<i>Armrest ErgoMedic PLUS Right 42 cm Skai Black</i>
	2	AR205238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 42 cm Konstläder Svart
		243385	<i>Armrest ErgoMedic PLUS Left 42 cm Skai Black</i>
D02	1	AR202138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 30 cm Konstläder Svart
		243381	<i>Armrest ErgoMedic PLUS Right 30 cm Skai Black</i>
	2	AR202238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 30 cm Konstläder Svart
		243386	<i>Armrest ErgoMedic PLUS Left 30 cm Skai Black</i>
D01		803271	Skrivsats f montering armstöd
			<i>Screw kit for armrest assembly</i>

Stycklista – Armstödsmekanismer


Part list – Armrest mechanisms

A Armstödsmekanism PLUS
 Armrest mechanism PLUS

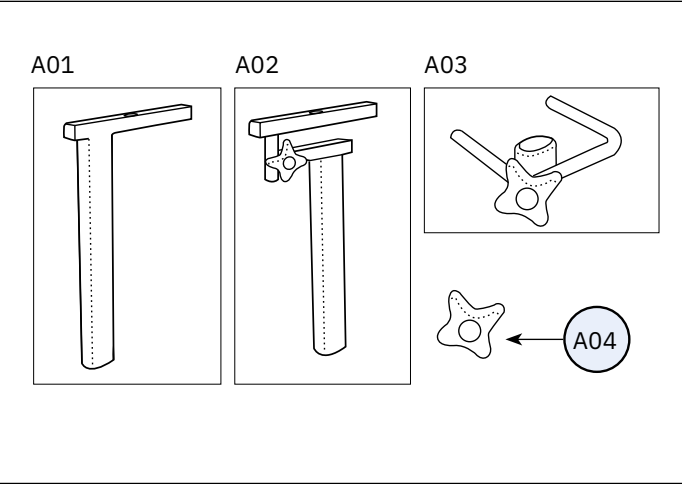

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	600304	Armstöd PLUS Höger Höjd 32 Armrest PLUS right, Height 32
2	600305	Armstöd PLUS Vänster Höjd 32 Armrest PLUS left, Height 32
3	600306	Armstöd PLUS Höger Höjd 38 Armrest PLUS right, Height 38
4	600307	Armstöd PLUS Vänster Höjd 38 Armrest PLUS left, Height 38
A02 1	802992	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Höger Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest right
2	802993	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Vänster Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest left
A03 1	802698	Armstöd Breddbåge PLUS Höger 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Right
2	802699	Armstöd Breddbåge PLUS Vänster 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Left
A04	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (Braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS

B01 Armstödsmekanism fällbar
 Foldable armrest mechainsim

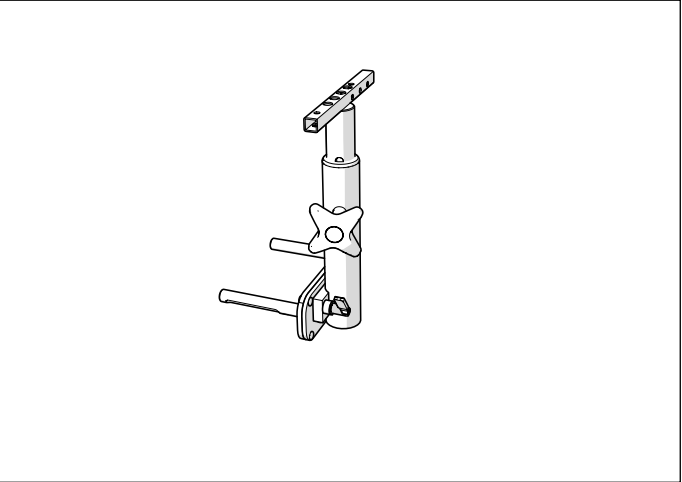


B01 1	ARM3011	Armstöd mekanism 6100 kpl. Höger B >40 (Vuxen) 600126 Armrest mecanism 6100 right Compl. >40
2	ARM3012	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vänster B >40 (Vuxen) 600125 Armrest mecanism 6100 left Compl. >40
3	ARM3111	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Höger Br>40 (Vuxen) 600170 Armrest mecanism 6100 right Compl. angle adjustable >40
4	ARM3112	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Vänster Br>40 (Vuxen) 600169 Armrest mecanism 6100 left Compl. angle adjustable >40

Stycklista - Stativ Twin

Part list - Base Twin

A01 Stativ Twin
Base Twin

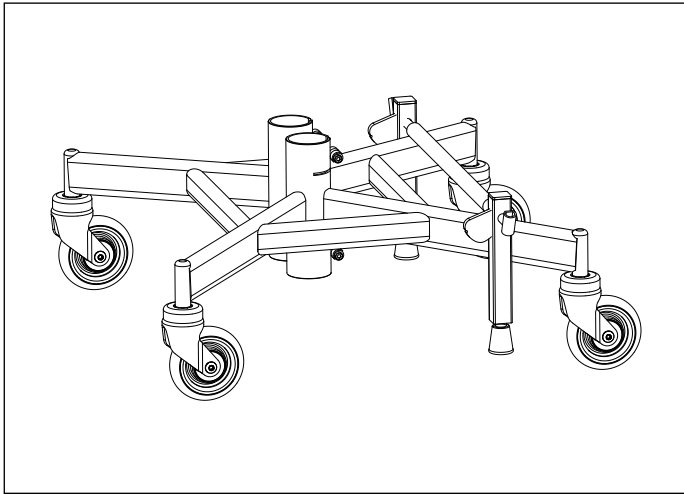


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	801876	Stativ 9200 Twin 100 XL <i>Base 9200 Twin 100 XL</i>
2	801877	Stativ 9200 Twin 100 SL <i>Base 9200 Twin 100 SL</i>
3	802093	Stativ 9200 Twin 100 ESD <i>Base 9200 Twin 100 ESD</i>
4	801956	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension forward</i>
5	801957	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension forward</i>
6	802095	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension forward</i>
7	801954	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension back</i>
8	801955	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension back</i>
9	802094	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension back</i>
10	802082	Stativ 9200 Twin 125 hjul m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 125 XL Base extension back</i>
11	802084	Stativ 9200 Twin 150 hjul m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 150 XL Base extension back</i>
12	801958	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension forward & back</i>
13	801959	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension forward & back</i>
14	802096	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension forward & back</i>
15	802083	Stativ 9200 Twin 125 hjul m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 125 XL Base extension forward & back</i>
16	802085	Stativ 9200 Twin 150 hjul m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 150 XL Base extension forward & back</i>


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
XL castor -Allround

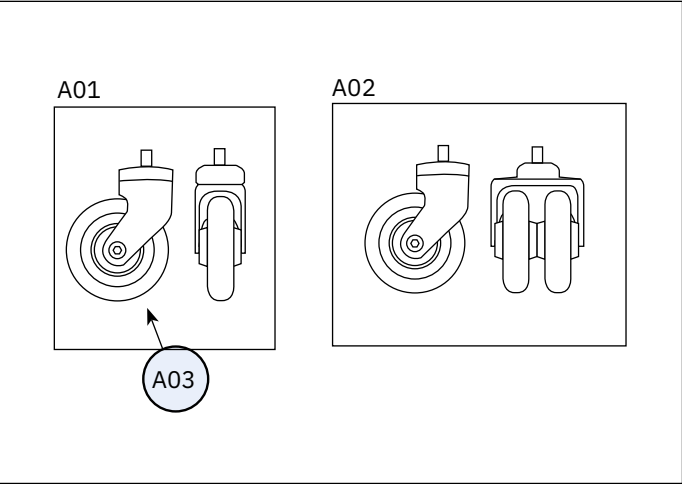

B SL Hjul - För hårda golv
SL castor -Hard surfaces

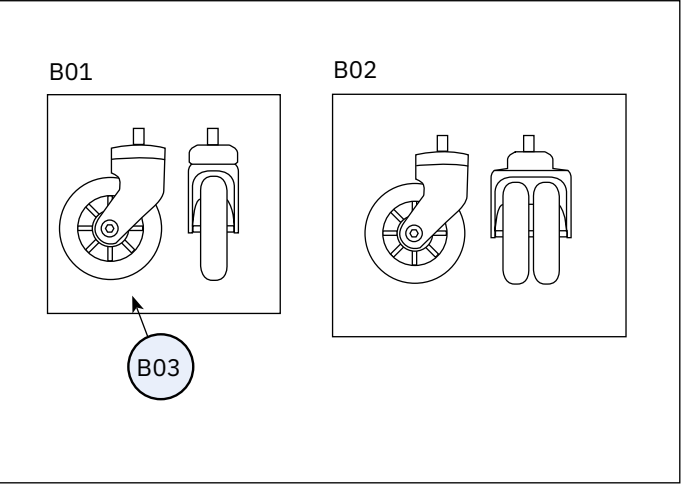

C BXL Hjul - För mjuka golv
BXL castor -Soft surfaces

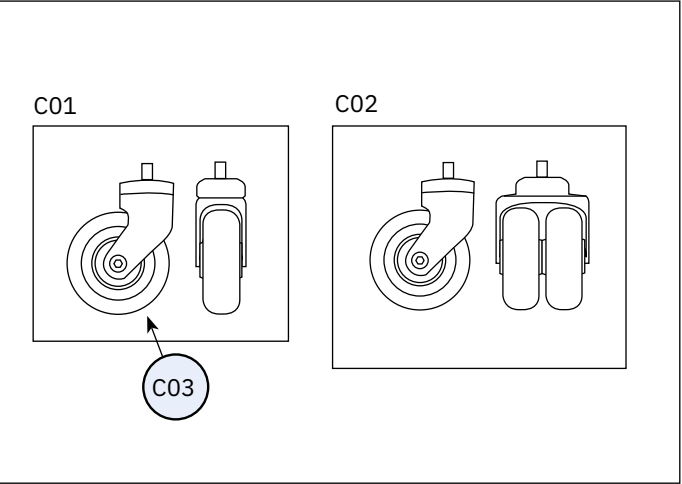

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 801213	Länkhjul 100 XL M12 <i>Castor 100mm XL M12</i>
	2 800903	Länkhjul 100 XL tröga M12 <i>Castors 100mm XL stagnant M12</i>
A02	802942	Länkhjul Dubbelt 100 XL M12 <i>Castor double100mm XL M12</i>
A03	801360	Hjul 100 XL m kullager utan bygel <i>Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing</i>


B01	801144	Länkhjul 100 SL M12 <i>Castor 100mm SL M12</i>
B02	802943	Länkhjul Dubbelt100 SL M12 <i>Castor double 100mm SL M12</i>
B03	801638	Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel <i>Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing</i>

C01	803162	Extra brett lätttrullat länkhjul, BXL 100 mm <i>Extra wide easy-rolled castor</i>
C02	803181	Extra brett lätttrullat dubbelt länkhjul, BXL 100 mm <i>Extra wide easy-rolled double castor</i>
C03	803161	Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel <i>Castors without fork 100 BXL polyutrthane black</i>


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


D01 Länkhjul 125 mm - För trösklar
125 castor - Threshold

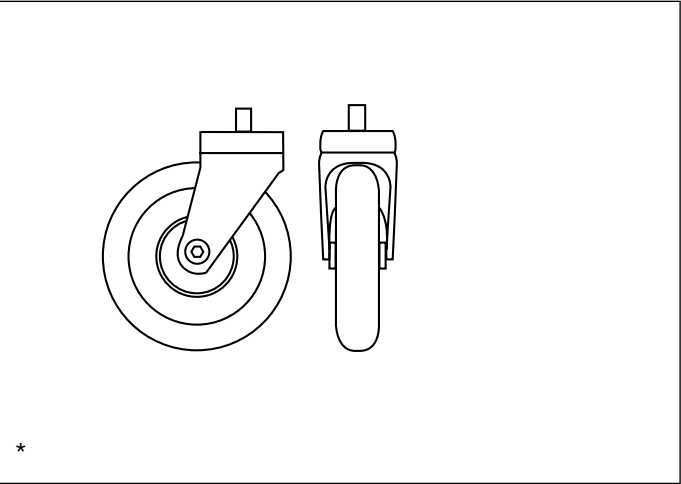

E01 Länkhjul 150 mm - För trösklar
150 castor - Threshold

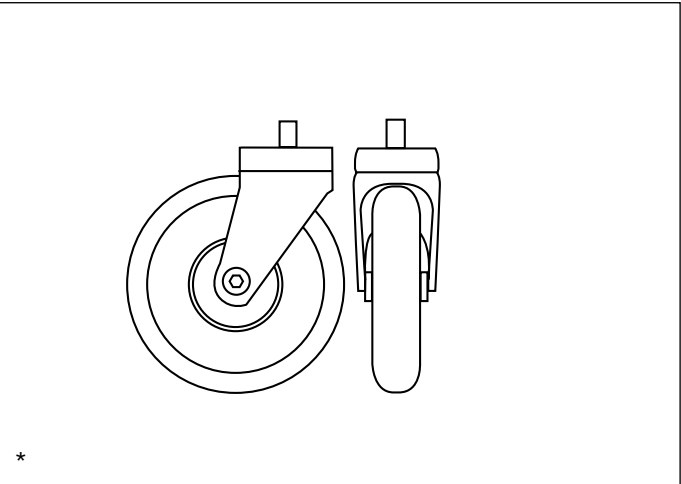

F01 ESD hjul
ESD castor

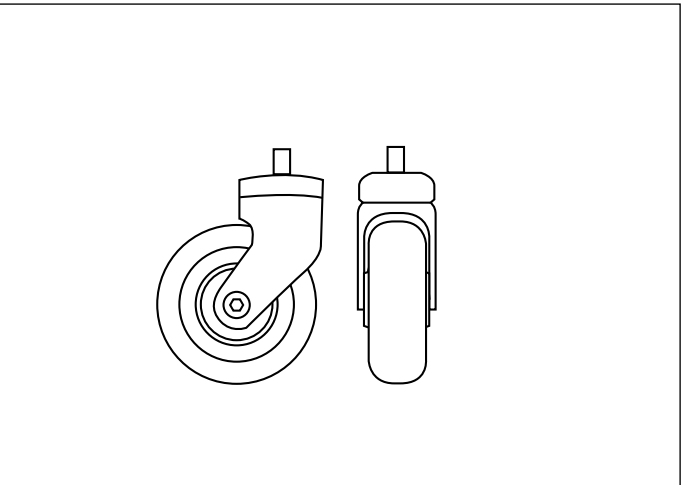

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

D01 800904 Länkhjul 125 mm XL
Castor 125 mm M12

E01 800905 Länkhjul 150 mm XL
Castor 150 mm M12


F01 802066 Länkhjul 100 mm ESD M12 kpl. m bygel. Extra bred
bana
Castor 100 mm ESD M12, extra wide wheel path

*Stativförlängare måste användas !
*Base extenders must be used !

Stycklista - Bromsar


Part list - Brakes

A Bromsspak
Brake lever

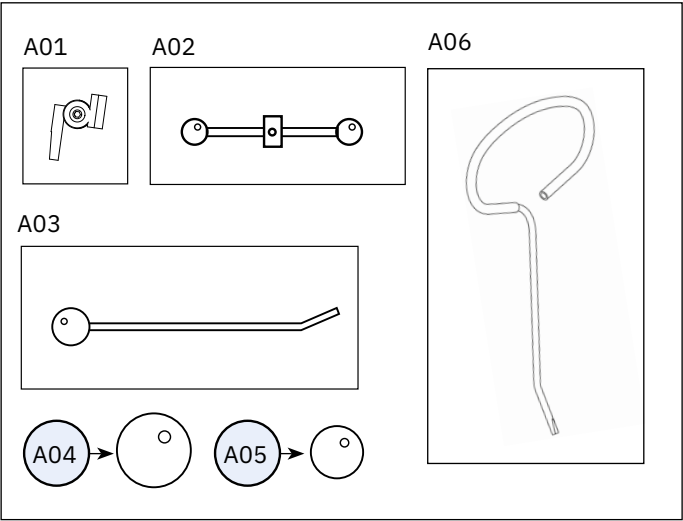

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	801832	Handbromsspaksadapter 9000 justerbar Brakelever adapter 9000 adjustable
A02	RC1010	Reumatikerkryss till Handbromsspak Rheumatic cross for hand brake lever
A03	1 BD1020	Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ Brake lever 25 cm for PLUS-base
	2 BD1010	Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base
	3 BD1030	Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base
	4 BD1040	Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-stativ Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base
A04	LB1010	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
A05	801014	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever
A06	BD1110	Handbromsspak 35 cm m ögla f Plus-stativ Brake lever 35 cm with loop f Plus-base
B01	801017	Bromsben 9000 f 100mm Hjul kpl m alla fästdet. Brakeleg 9000 f 100mm wheel cpl,with all attachmentdetails
B02	801264	Bromsfot Diam 32mm Brake rubber 32 mm
B03	805713	Bromsben REAL9200 komplett för 100 mm hjul m bromsfot 40x20mm. Brake leg REAL 9200 CPL For 100 mm wheels w. rubber foot 40x20m
B03	805714	Bromsben REAL9200 komplett för 125 mm hjul m bromsfot 40x20mm. Brake leg REAL 9200 CPL For 125 mm wheels w. rubber foot 40x20m
B03	805715	Bromsben REAL9200 komplett för 150 mm hjul m bromsfot 40x20mm. Brake leg REAL 9200 CPL For 150 mm wheels w. rubber foot 40x20m
B04	805719	Bromsfot Diam 40x20mm Brake rubber 40x20mm


B01 Bromsben
Brake leg

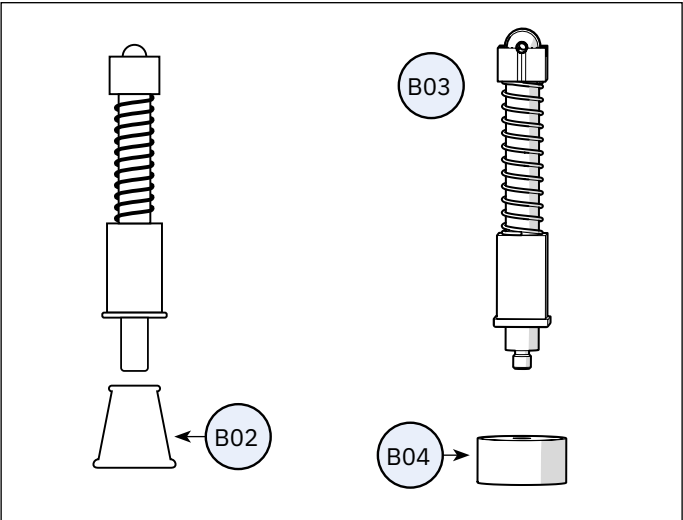


Stycklista - Elektronik

Part list - Electronics


A Elektronik för upp & ner
Electronics for up & down

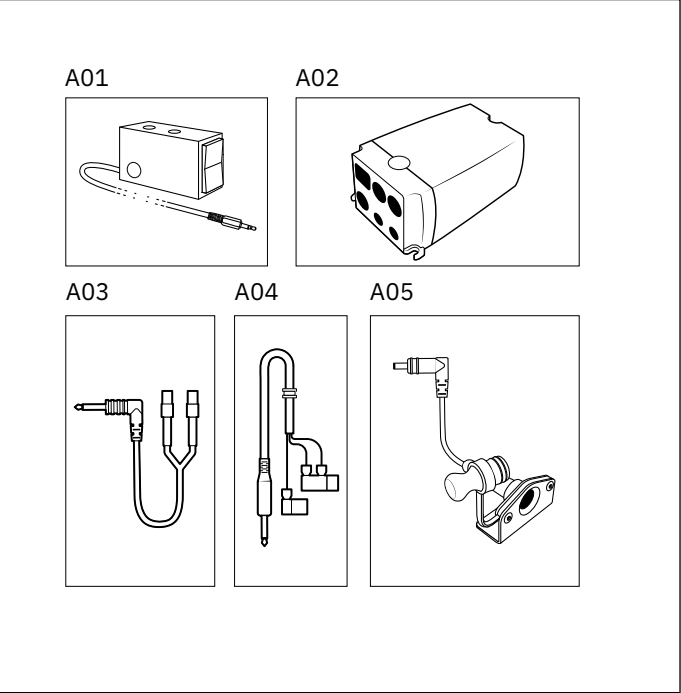

B01 Elektronik för broms
Electronics for brake

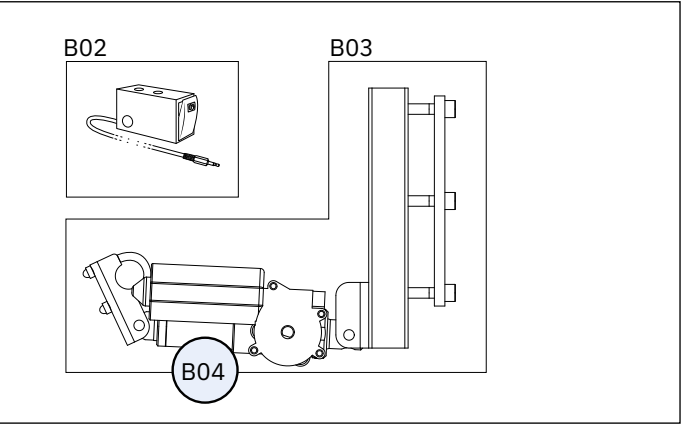

C Batteri och laddare
Battery and charger

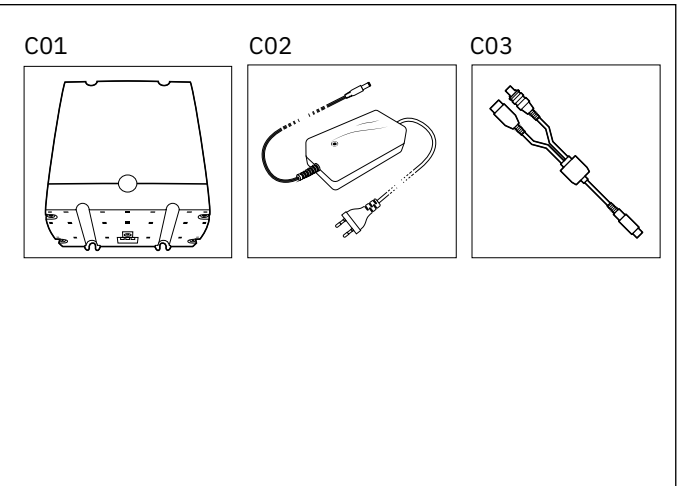

Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
A01	805285	Manbox Twin f upp/ner utan tunga kpl med kablage 24V 1G Device box Twin Up/down flat cpl w cables 24V 1G
A02	805160	Kontrollbox dual channel 16A output x 5A output (TWIN 24V) Controll box dual channel channel 16A output x 5A (TWIN 24V)
A03	805164	Förgreningskabel Kontrollbox-Ställdon (TWIN 24V) Branch cable control box- Actuator (TWIN 24V)
A04	805165	Kabel för Kontrollbox-Manöverbox (TWIN 24V) Cable for control box-Manouver box (TWIN 24V)
A05	804550	Laddkontakt med kabel och fäste 24V 1G Charging adapter w. cable for mounting under seat 24V 1G
B01	805287	Eldonssats broms f Twin Inkl manbox utan tunga 24V 1.5G Actuator el.brake Twin incl. maneuverbox flat 24V 1.5G
B02	805286	Manbox Twin f elbroms P-knapp kpl med kablage 24V 1G Remote Twin f up/down+brake w/o ext. button cpl.with cabl 24V 1G
B03	804663	Eldonssats Twin broms 24V 1G Electric kit Twin for brake 24V 1G
B04	804502	Eldon broms 24V 1G Actuator for electric brake 24V 1G
C01	805161	Batteribox inkl batterier (TWIN 24V) Battery box incl. battery (TWIN 24V)
	805162	Batteri 12V2,9AH/20HR (TWIN 24V) Battery 12V2,9AH/20HR (TWIN 24V)
C02	805163	Batteriladdare 9200 för TWIN 24V Battery charger 9200 for Twin 24V 1G
	805342	Batteriladdare 9200 för TWIN 24V (UK) Battery charger 9200 for Twin 24V 1G (UK)
	805347	Batteriladdare 9200 för TWIN 24V (USA/Kanada) Battery charger 9200 for Twin 24V 1G (USA/Canada)
C03	805279	Twin Förgreningskabel Kontrollbox-Batteri -



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se