



BYTE AV POWERMODUL

Changing the power module

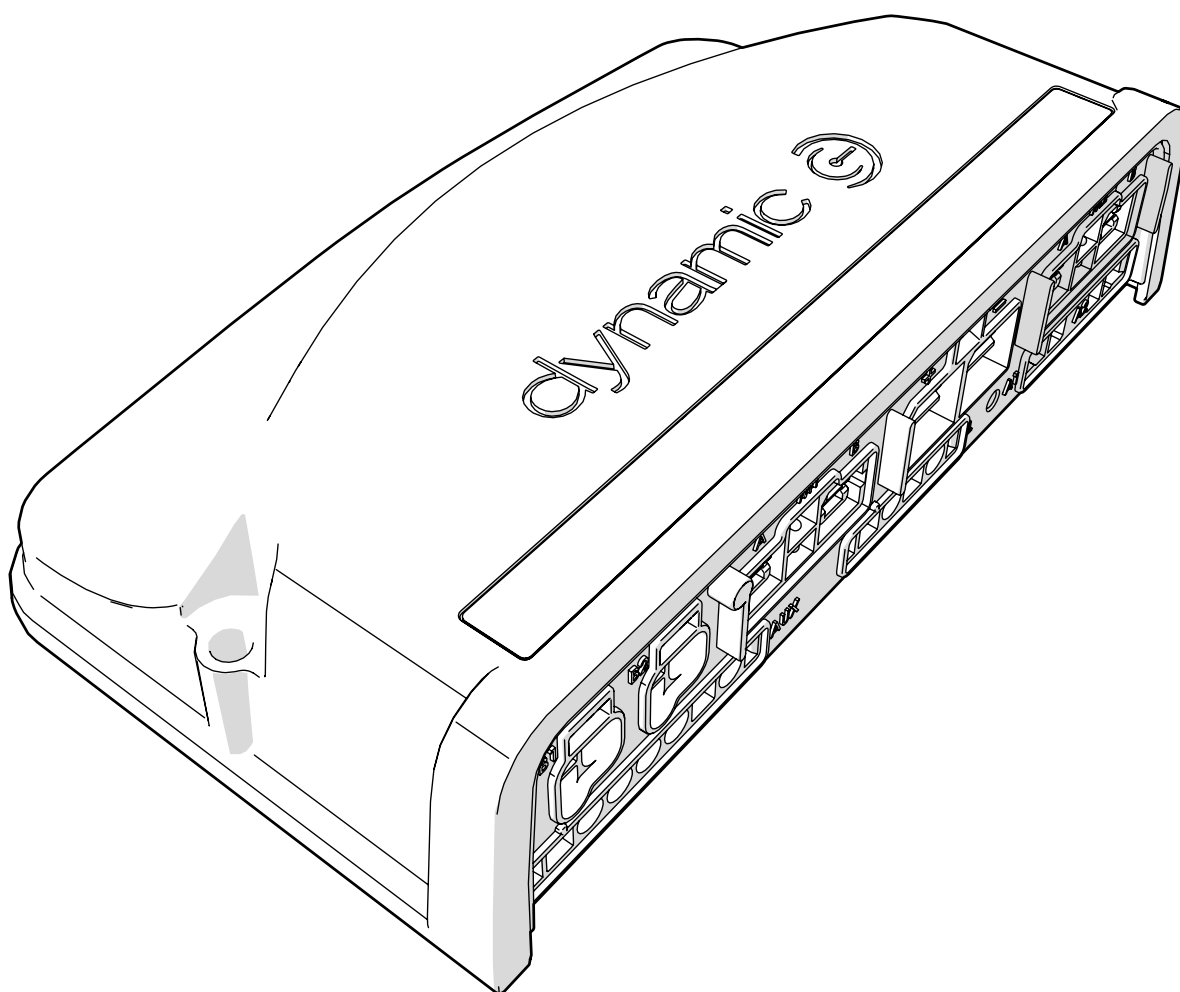

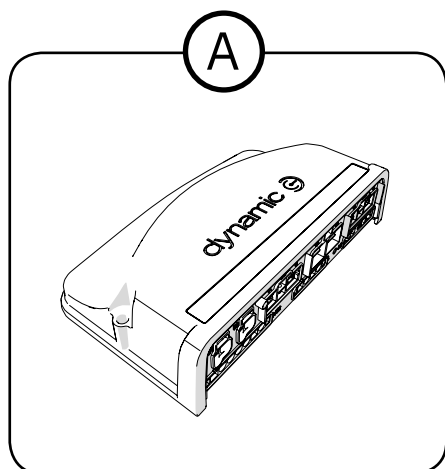

- Ⓐ 804725 Powermodul LiNX f REAL 6100 PLUS
Power module LiNX f 6100 PLUS
- 803136 Powermodul DX/DX2 f REAL 6100 PLUS
Power module 6100 DX2 f 6100 PLUS
- 802880 Powermodul Shark f REAL 6100 PLUS
Power module SHARK f 6100 PLUS




Svenska


1. Innan byte av powermodul påbörjas, försäkra dig om att du har slagit av automatsäkringen.





English


1. Before changing the power module, make sure to switch off the automatic fuse.

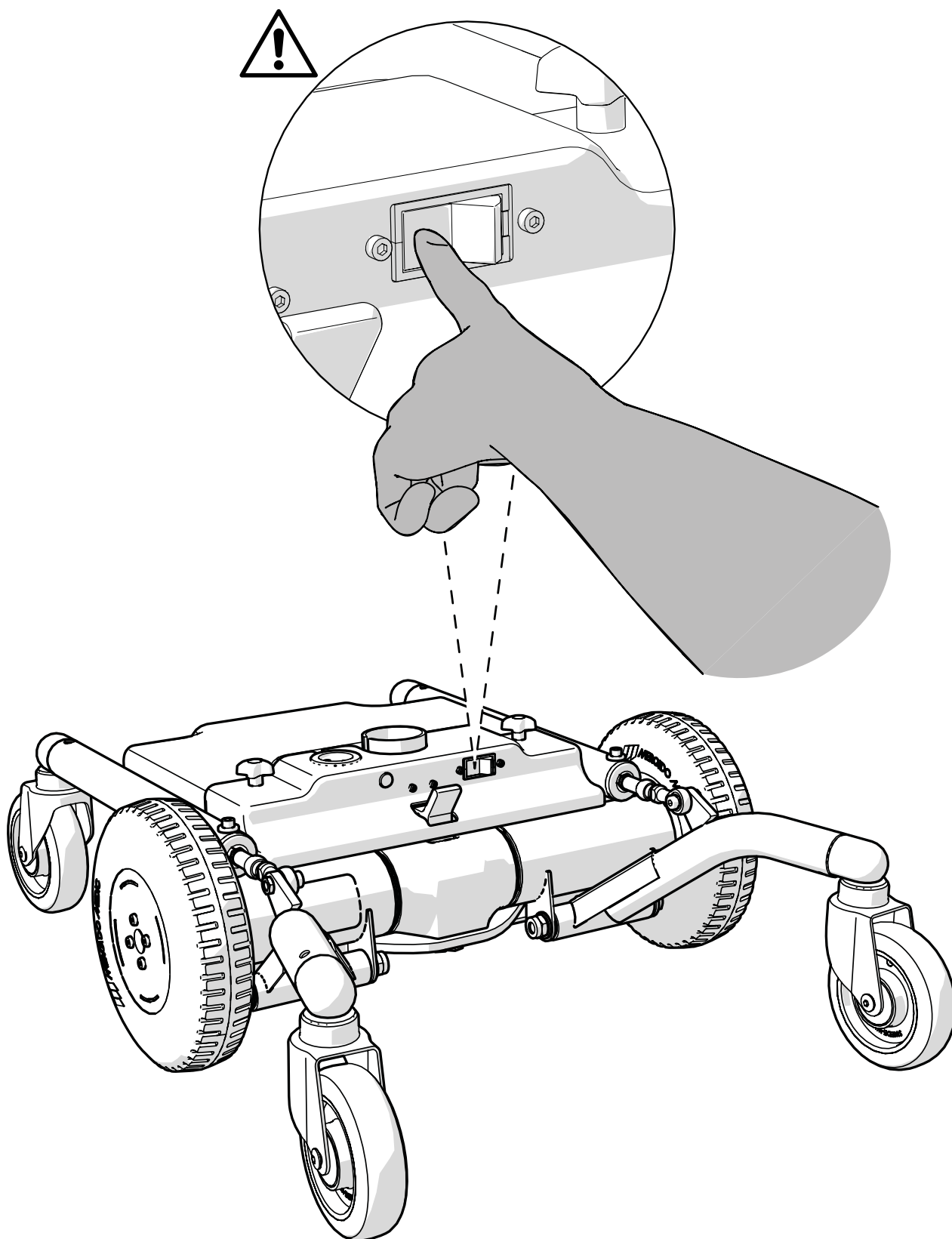

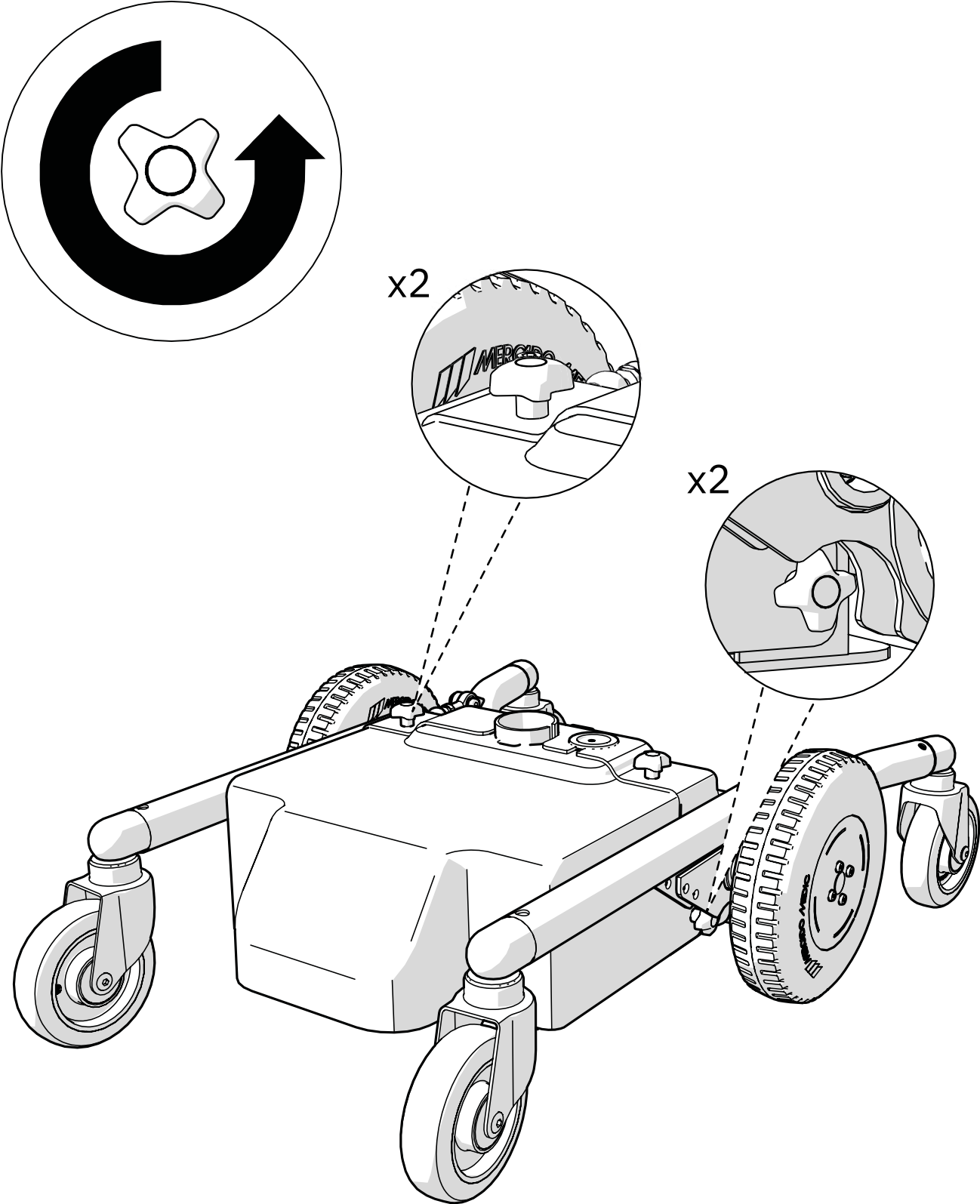

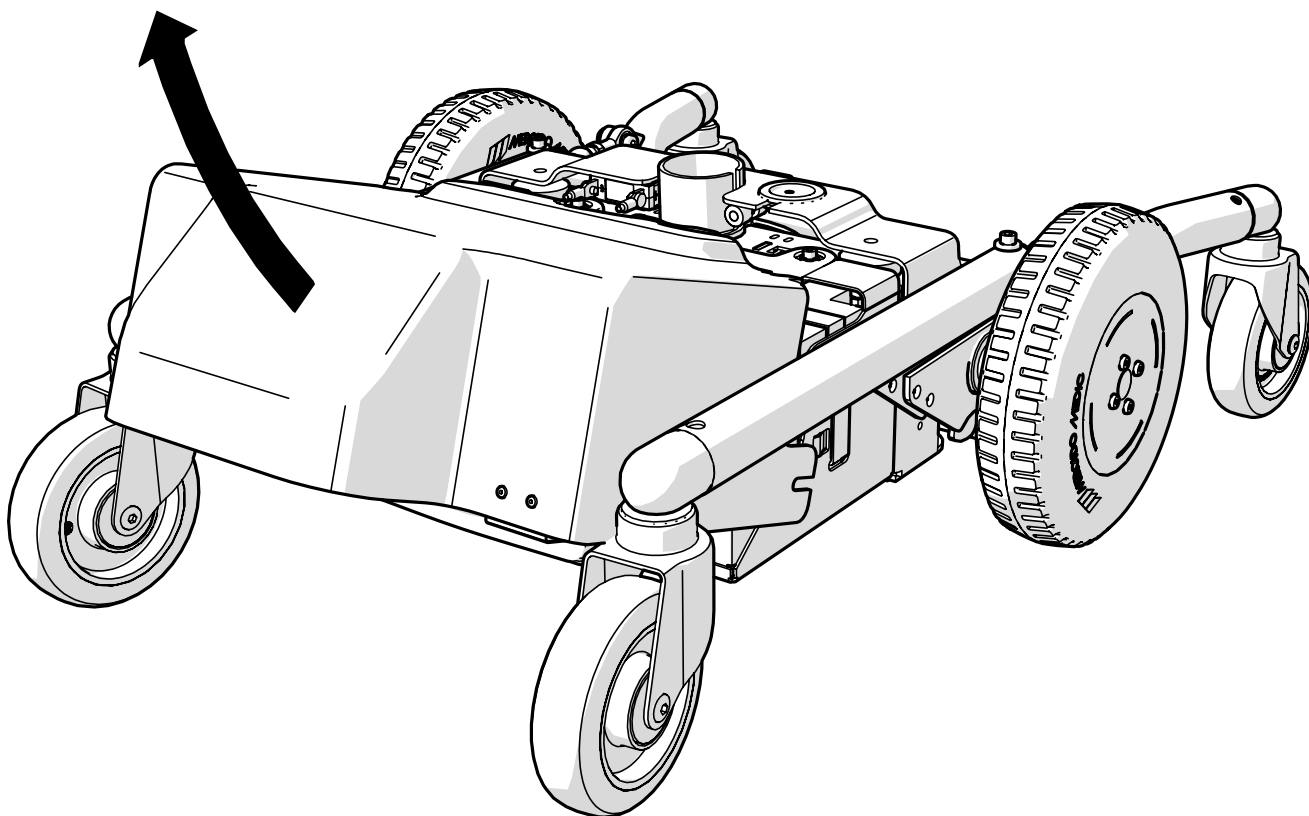

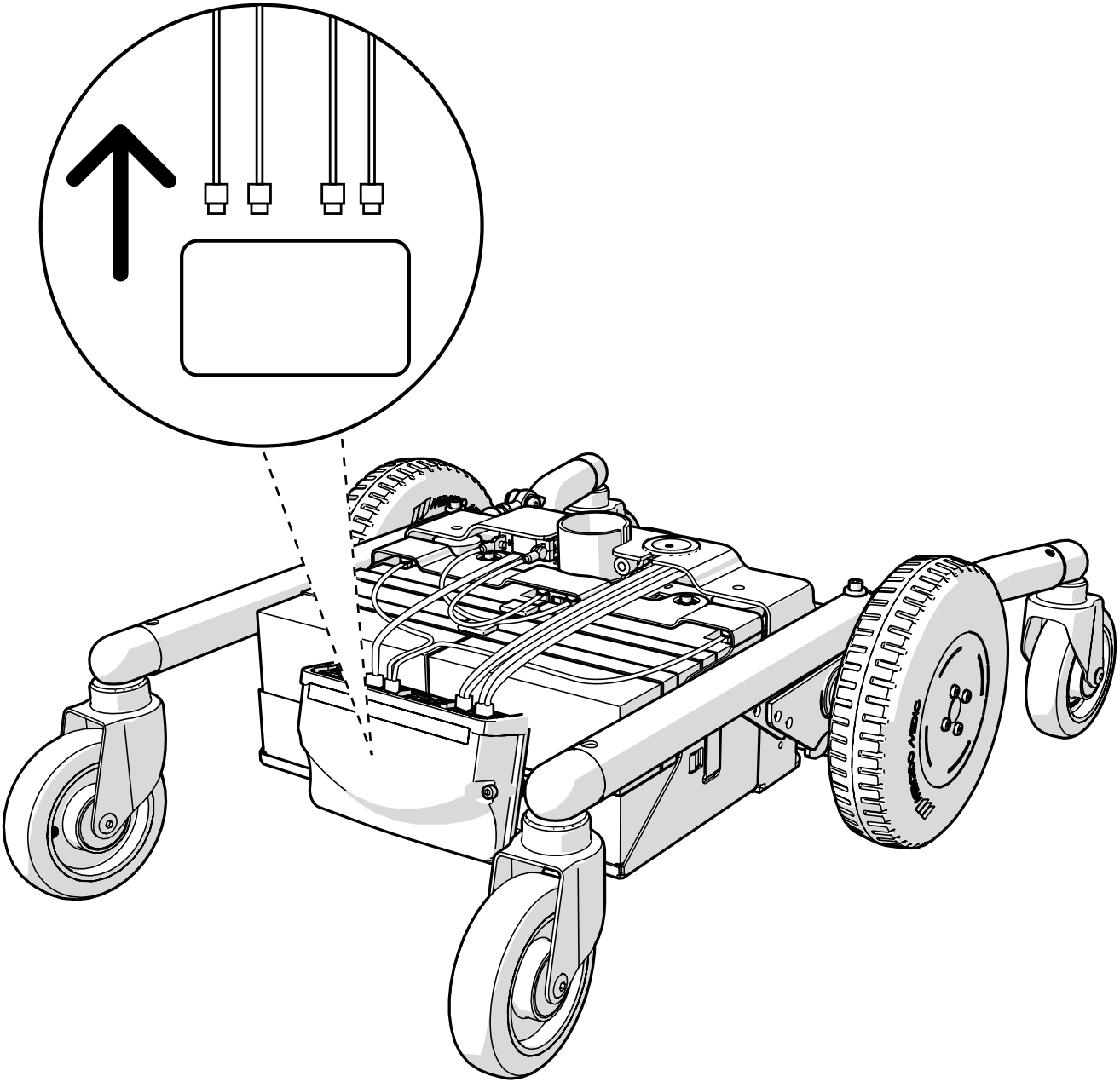

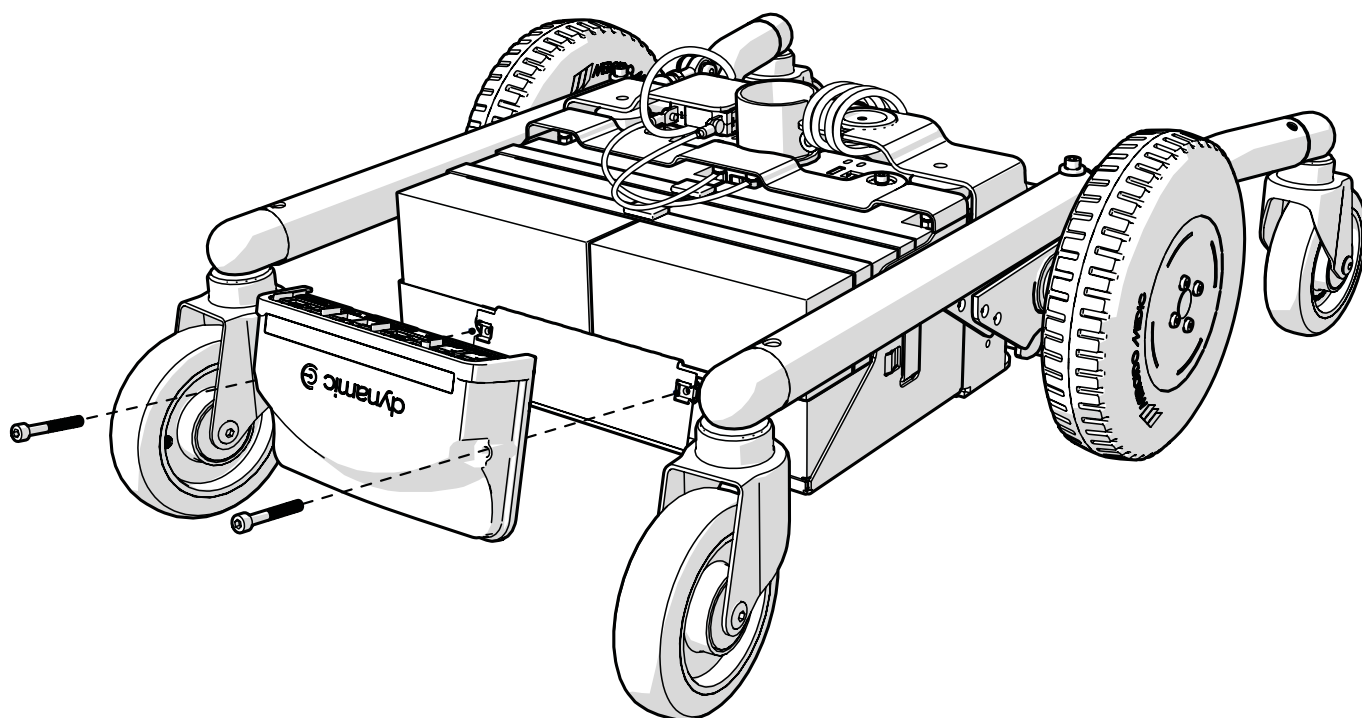
**i**

För att slutföra byte av powermodul, utför föregående steg i omvänd ordning. Var noggrann med att koppla in powermodulen enligt kopplingsschemat som återfinns på insidan av batterikåpan.

Viktigt! Säkerställ att alla elektriska funktioner fungerar innan produkten återtas i bruk.

To complete the change, follow the previous steps in reverse. Make sure to connect the power module according to the diagram found on the inside of the battery cover.

Note! Assure that all electrical functions are working correctly before putting the product back in use.

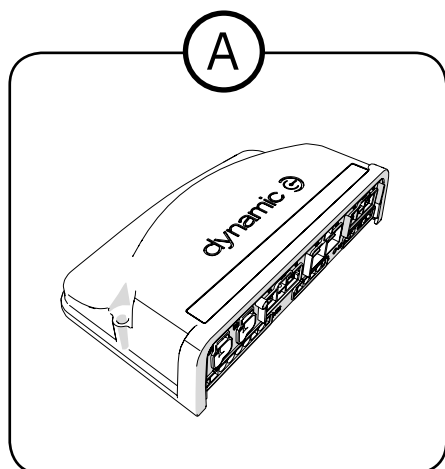**Skötselråd**

Produkten bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Destruction

Ⓐ Sorteras som elektronik

Care instructions

The product should be dried and kept clean from dust and dirt. We accept cleaning agents from 7 up to a maximum of 12 on the pH scale (concentrated).

Destruction

Ⓐ Sorted as electronics