

Artikelnummer

- BEX20 Stativförlängare bak för 43 och 48 PLUS-stativ M12
BEX10 Stativförlängare fram för PLUS-stativ M12

Nödvändiga verktyg

- Insexnyckel 6 mm
Ringnyckel 19 mm

Utförande

1. Demontera länkhjulen (1) från stativet med en för ändamålet modifierad* ringnyckel 19 mm.
2. Trä på stativförlängarna (2) på stativet.
3. Applicera Loc-Tite 243 på M12-skraven (3). Montera skruven och brickan.
Drag åt hårt med ringnyckel 19 mm, detta för att fixera stativförlängaren i sitt rätta läge.
4. Drag åt klämförbandet med skruven (4) hårt med insexnyckel 6 mm.
5. Applicera Loc-Tite 243 på länkhjulens M12-skruv (5).
6. Montera länkhjulen i stativförlängaren. Drag åt hårt med ringnyckel 19 mm.
7. Kontrollera att stolen står stadigt på jämnt underlag innan den tas i bruk.

*Ringnyckeln är nedslipad till en höjd på 7mm.

