

Der REAL-Stuhl hat auswechselbare Komponenten, Zubehörteile und Funktionen mit Einstellungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung. Der Stuhl darf ausschließlich durch befugte Personen und für den vorgesehenen Zweck genutzt werden. Der Stuhl ist nur im Innenbereich zu verwenden. Der Stuhl darf ausschließlich mit Zubehörteilen und Komponenten ausgestattet werden, für die eine Zulassung von Mercado Medic AB vorliegt. Reparaturen und andere technische Maßnahmen dürfen ausschließlich von Mitarbeitern mit Zulassung von Mercado Medic AB durchgeführt werden. Dieses Handbuch ist sorgfältig zu lesen, bevor der Stuhl benutzt wird.


RÜCKENLEHNE

Der Stuhl ist der hohen Lehnverstellung Double Medic ausgestattet. Die Rückenlehne kann in der Tiefe durch Lösen der beiden Schrauben (1) mit einem Inbusschlüssel der Größe 5 mm, etwa dem Mercado-Schlüssel, eingestellt werden. Dann kann der gesamte Mechanismus nach vorn oder hinten geschoben werden. Danach sind die beiden Schrauben wieder anzuziehen. **HINWEIS!** Sicherstellen, dass die Rückenlehnenneigung nicht zu weit nach hinten herausgezogen wird. Die Federsicherungen müssen verhindern können, dass die Lehnenkippfunktion zu weit nach hinten gezogen wird.

Der Winkel der gesamten Rückenneigung ist verstellbar, indem die beiden Stellräder (2) gelöst werden und dann die Rückenneigung angepasst wird, indem man die Lehne in die gewünschte Position kippt und dann die Stellräder (2) wieder anzieht.

Die Rückenplatte kann in der Höhe verstellbar werden, indem die Schrauben (3) mit dem Mercado-Schlüssel gelöst werden. Dann kann die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe eingestellt. Abschließend sind die Schrauben (3) wieder anzuziehen.


Der Winkel der Rückenplatte ist verstellbar, indem die Drehknöpfe (4) gelöst werden und die Rückenlehne in die gewünschte Position gekippt wird. Danach sind die Drehknöpfe (4) wieder anzuziehen.

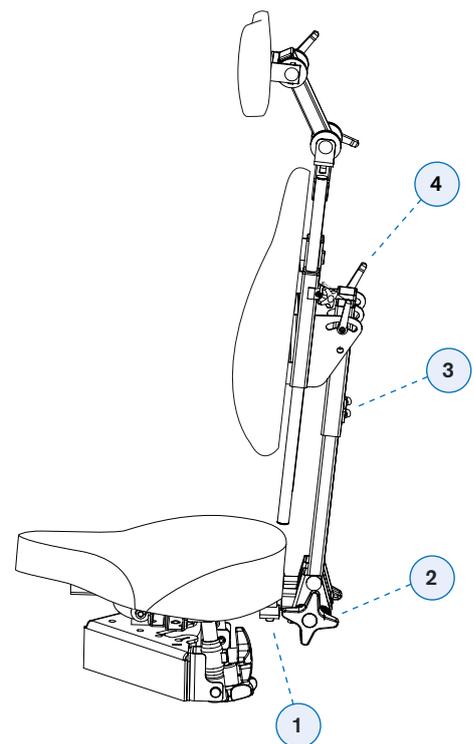

SITZHÖHE


Die Sitzhöhe des Stuhls wird über den Hebel (1) geregelt, der nach oben gezogen wird, so dass der Gasfixlyftomat gelöst wird. Danach kann der Stuhl nach unten verstellt werden, indem er durch Gewicht nach unten oder durch Reduzierung des Gewichts durch Anspannung der Beine nach oben bewegt wird.

Sobald die gewünschte Höhe erreicht ist, kann der Hebel (1) losgelassen werden.

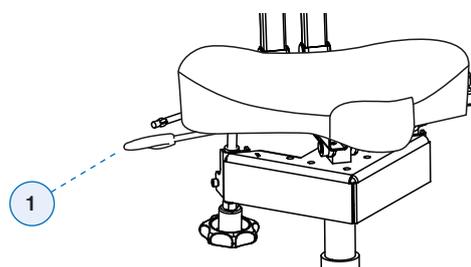

HANDBREMSE


Die Bremse wird über einen Hebel (1) betätigt. Zum Verriegeln den Hebel nach hinten bewegen. Der Bremshebel kann auf jede Seite des Stuhls verlegt werden. Der Stuhl ist mit H-Stativ Maintenance ausgestattet und die Bremse kann auch mit dem Fuß (2) betätigt werden. **HINWEIS!** Die Bremse muss immer angezogen sein, wenn man aufsteht und sich hinsetzt. Die Bremse muss regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß ist der Bremsfuß aus Gummi auszutauschen. Die Bremswirkung kann auf einer unebenen Oberfläche geringer sein.

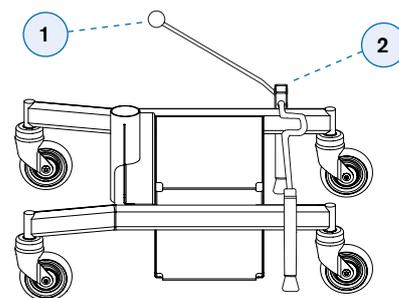

SITZNEIGUNG


Die Sitzneigung des Stuhls ist verstellbar. Dabei wird der Winkel der gesamten Sitzfläche eingestellt.

Zur Einstellung ist der Drehknopf (1) zu lösen und dann das Stellrad (2) im Uhr- oder Gegenuhrzeiger zu drehen, bis der richtige Neigungswinkel des Sitzes eingestellt ist. Danach ist der Drehknopf (1) wieder anzuziehen.

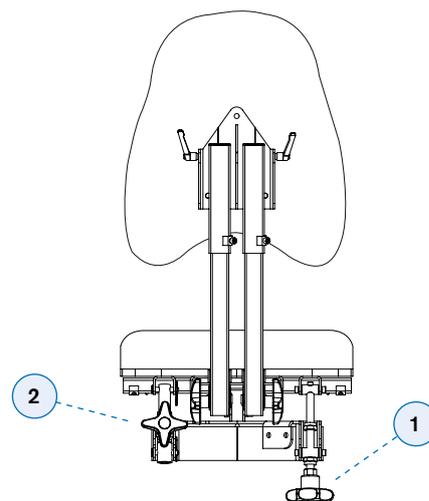

NACKENSTÜTZE

Die Nackenstütze kann in der Höhe verstellt werden, indem die Stellräder (1) gelöst werden und dann die gewünschte Höhe eingestellt wird. Abschließend sind die Stellräder (1) wieder anzuziehen. Die Position des Nackenstützkissens kann in der Tiefe eingestellt werden. Dazu ist der Drehknopf (2) zu lösen. Danach die gewünschte Position einstellen und den Drehknopf (2) wieder anziehen. Der Winkel des Nackenstützkissens kann verstellt werden. Dazu ist der Drehknopf (3) zu lösen und der gewünschte Winkel einzustellen. Abschließend die der Drehknopf (3) wieder anzuziehen.

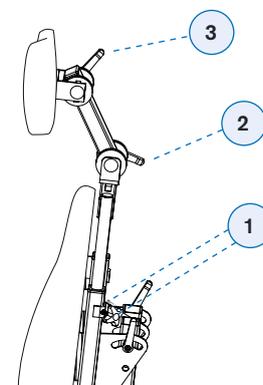

REINIGUNG, WARTUNG UND SCHMIERUNG

Staub und Schmutz sind vom Stuhl zu entfernen.

Verschmutzungen, Krümel und dergleichen beseitigen. Eine dünne Schicht Schaum auftragen und diesen gleichmäßig mit einem feuchten Tuch verteilen. Mit einem sauberen und leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Gründlich staubsaugen, sobald alles trocken ist.

Die Fixlyftomat-Funktion ist regelmäßig auf Staub und Schmutz zu überprüfen:

Die Sitzplatte in die höchste Position bringen. Mit einem Tuch reinigen. Es darf weder Wasser noch ein Lösungsmittel verwendet werden. Dann den Zylinder mit einer dünnen Schicht Schmierfett auf Teflon- oder Silikonbasis einfetten. Diese Schmierstoffe sind nicht so schmierig wie Fette auf Mineralölbasis.