


# ELEKTRISCH WINKELVERSTELLBARE LÄNGEKOMPENSIERENDE ZENTRALE BEINSTÜTZE REAL 6100 PLUS (EL)

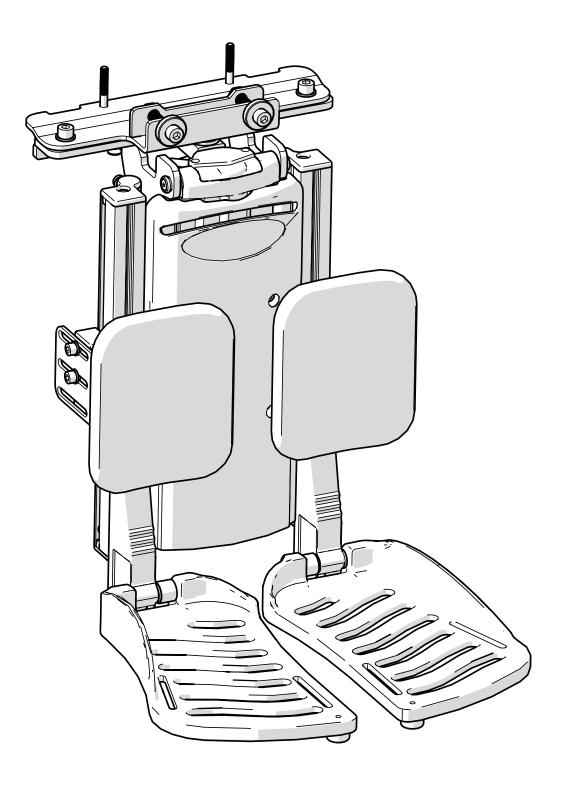




Dok.-Nr.: 20-07359

# **Table of content**

1.	Artikelverzeichnis		
2.	. Gefahrhinweise 4		
3.	Mor	Montageanleitung5	
	3.1.	Anbringung der Fußbretter 5	
	3.2.	Anbringung der Wadenstützen 6	
	3.3.	Anbringung der Adapterplatte 7	
	3.4.	Anbringung der Adapterplatte 8	
	3.5.	Anbringung der Beinstütze 9	
	3.6.	Anbringung der Beinstütze bei Sitztiefe 48 und größer10	
	3.7.	Anschluss der Elektronik11	
4.	Pflegehinweise12		
5.	Entsorgung und Recycling12		

20-07359-02

### 1. Artikelverzeichnis

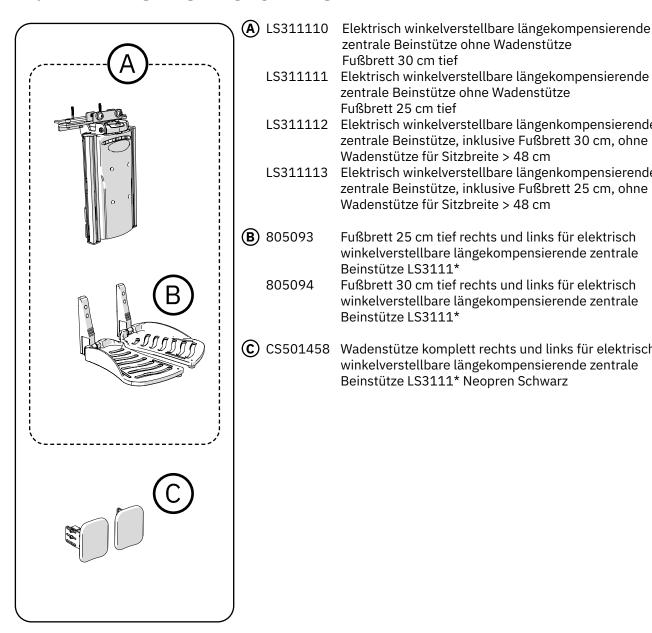

zentrale Beinstütze ohne Wadenstütze Fußbrett 30 cm tief LS311111 Elektrisch winkelverstellbare längekompensierende zentrale Beinstütze ohne Wadenstütze Fußbrett 25 cm tief LS311112 Elektrisch winkelverstellbare längenkompensierende zentrale Beinstütze, inklusive Fußbrett 30 cm, ohne Wadenstütze für Sitzbreite > 48 cm LS311113 Elektrisch winkelverstellbare längenkompensierende zentrale Beinstütze, inklusive Fußbrett 25 cm, ohne Wadenstütze für Sitzbreite > 48 cm **(B)** 805093 Fußbrett 25 cm tief rechts und links für elektrisch winkelverstellbare längekompensierende zentrale Beinstütze LS3111\* 805094 Fußbrett 30 cm tief rechts und links für elektrisch winkelverstellbare längekompensierende zentrale Beinstütze LS3111\* C CS501458 Wadenstütze komplett rechts und links für elektrisch winkelverstellbare längekompensierende zentrale

Beinstütze LS3111\* Neopren Schwarz

20-07359-02


## 2. Gefahrhinweise



#### Warnung!


Bei der Bedienung der Stuhlfunktionen besteht Quetschgefahr. Folgende Gefahrenbereiche sind zu beachten:

- 1. Quetschgefahr zwischen Beinstütze und Sitzrahmen
- 2. Quetschgefahr zwischen Beinstütze und Untergestell
- 3. Quetschgefahr zwischen Beinstütze und Fußboden

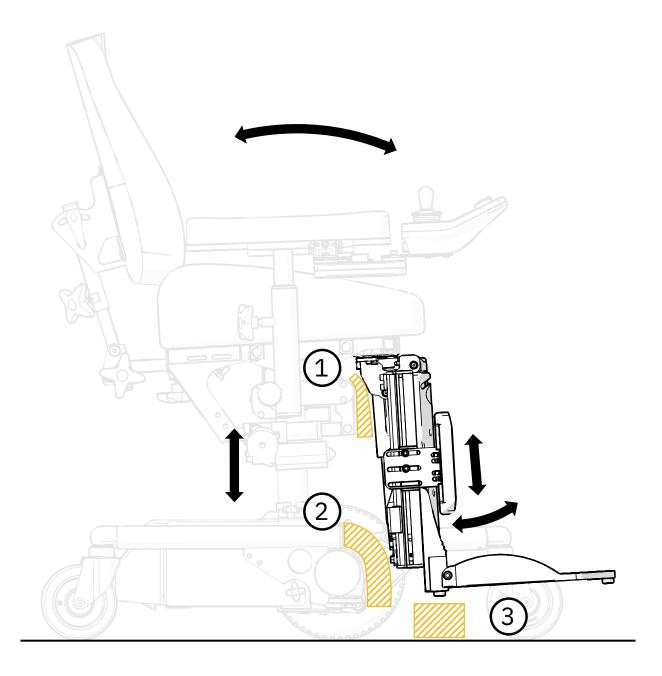


# 3. Montageanleitung

#### 3.1. Anbringung der Fußbretter

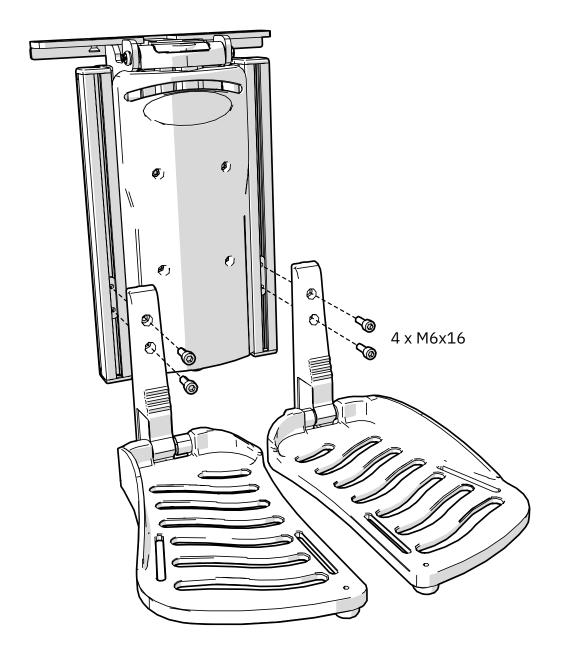


5

#### 3.2. Anbringung der Wadenstützen

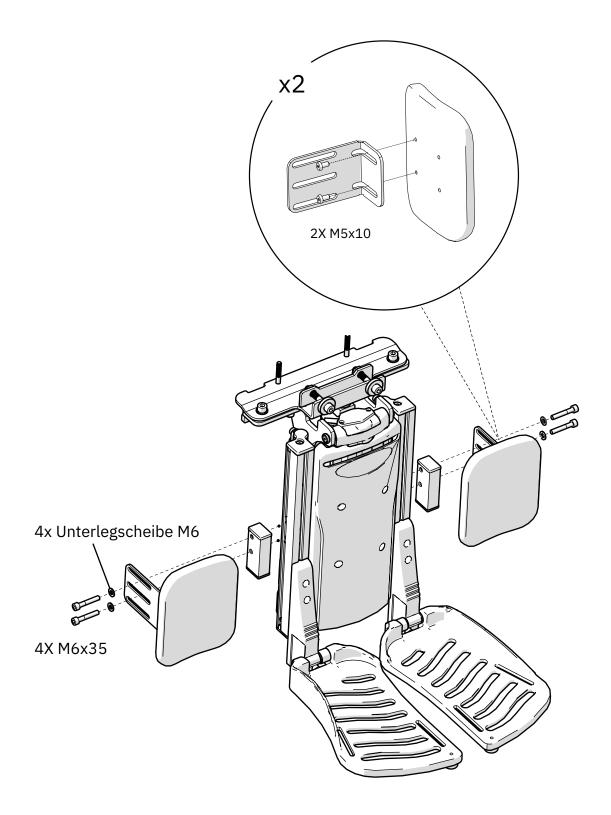


6


#### 3.3. Anbringung der Adapterplatte

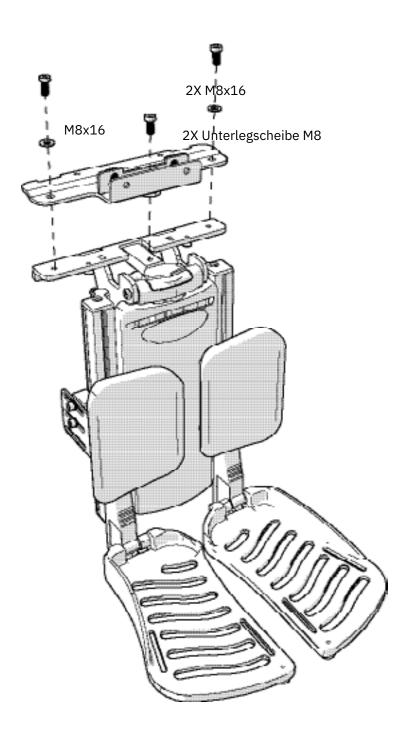

#### 3.4. Anbringung der Adapterplatte

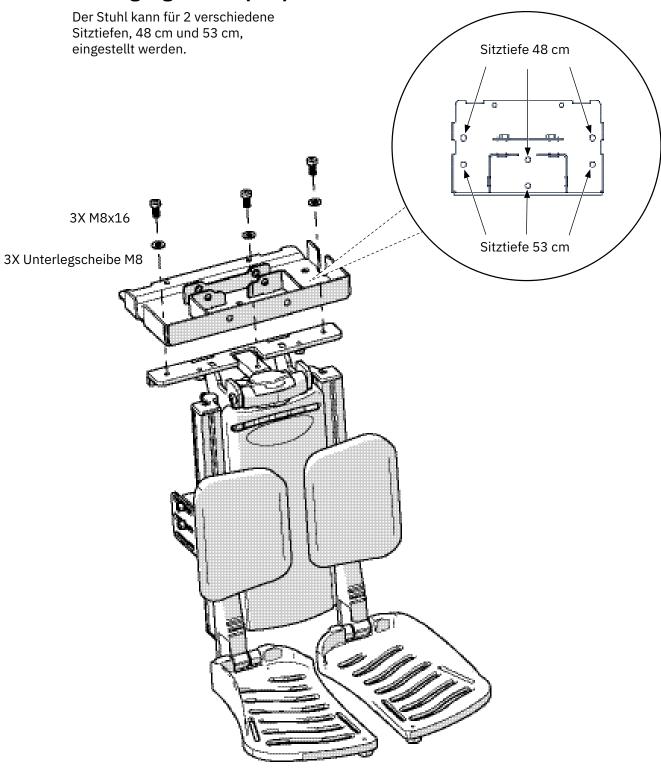


#### 3.5. Anbringung der Beinstütze

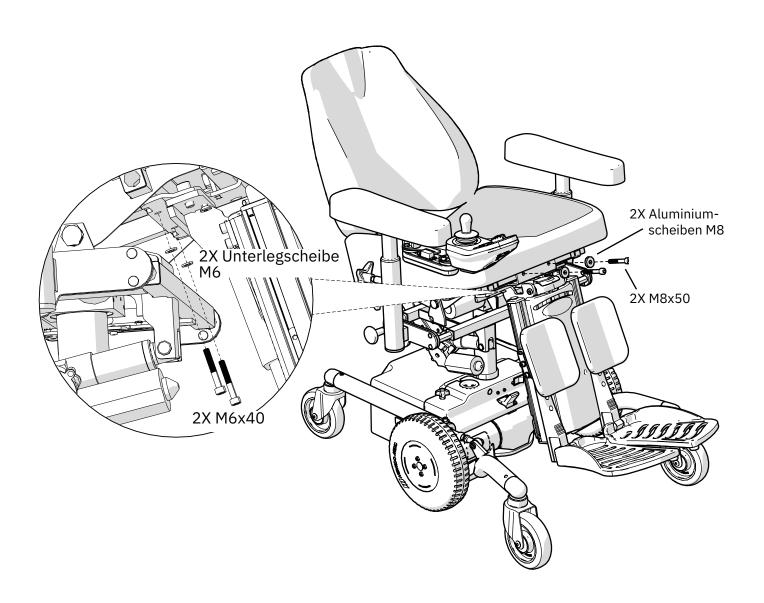

9


#### 3.6. Anbringung der Beinstütze bei einer Sitztiefe 48 und größer

- 1. Schrauben Sie das Sitzpolster ab, 4 Stück M6x40.
- 2. Befestigen Sie die Beinstütze mit dem Adapter mit den M8x50-Schrauben am Sitzrahmen. Diese befinden sich im Adapter.
- 3. Montieren Sie das Sitzpolster mit den M6x40-Schrauben (4 Stück) wieder. Die beiden vorderen Schrauben sollten nun die Beinstütze sichern.

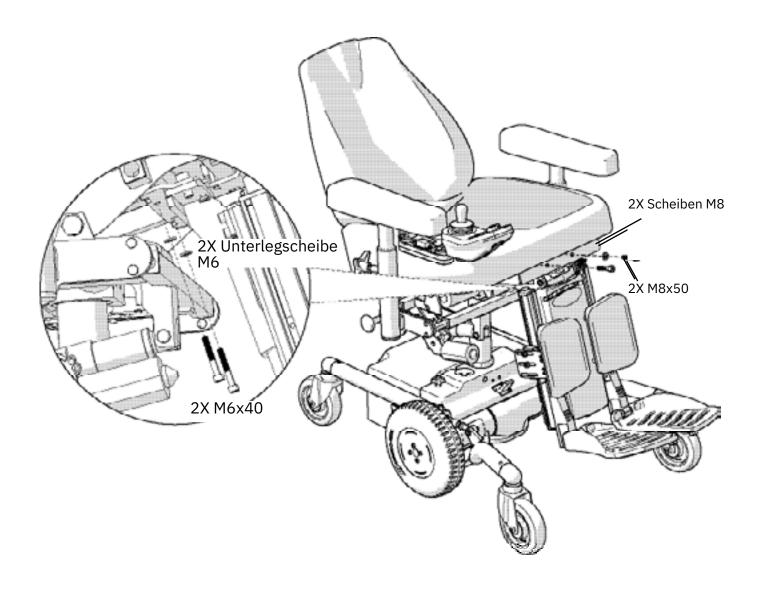

10

#### 4. Anschluss der Elektronik

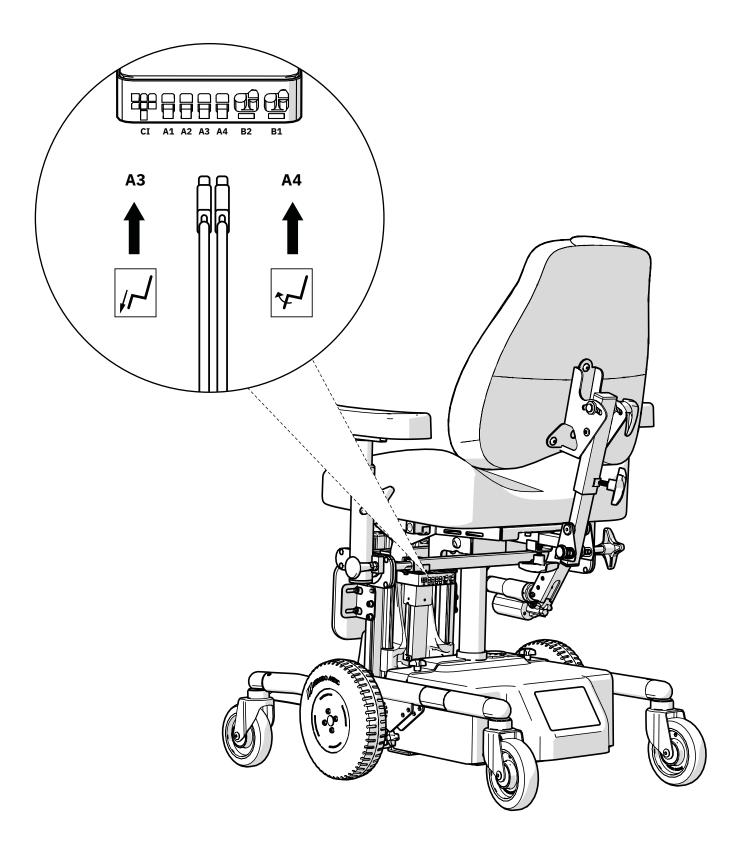

# 4. Pflegehinweise

Das Produkt ist abzuwischen und von Staub und Schmutz zu befreien. Reinigungsmittel von 7 bis maximal 12 auf der pH-Skala (konzentriert) sind zulässig.

# Entsorgung und Recycling

- 1. Abfallsortierung als Metall
- 2. Abfallsortierung als Elektronikbauteil
- 3. Abfallsortierung als verbrennbarer Rest

